




SET LAPAROSCOPICO HISTOACRYL®

PER FISSARE LA RETE RISPARMIANDO I NERVI –
NELLA CHIRURGIA LAPAROSCOPICA DELLE ERNIE

SET LAPAROSCOPICO HISTOACRYL®

APPLICAZIONE

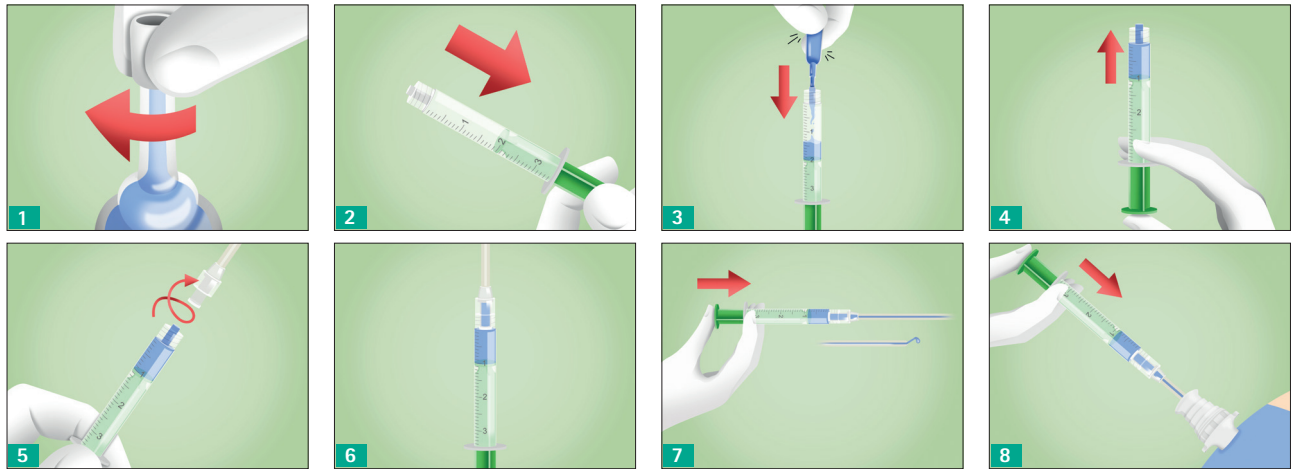

1. Svitare la punta della fiala di Histoacryl®.
 2. Tirare indietro il pistone verde fino ad avere un volume di 2 ml.
 3. Introdurre la punta aperta della fiala nel corpo della siringa, premere forte la fiala di Histoacryl® finché l'intero contenuto passa nella siringa.
 4. Eliminare l'aria dalla siringa, finché la colla Histoacryl® raggiunge la punta della Siringa.
 - 5.+6. Fissaggio della cannula sulla siringa disareata, avvitare saldamente il raccordo Luer-Lock.
 7. Premere il pistone verde, finché nella punta trasparente della cannula appare la prima goccia di Histoacryl di colore blu.
 8. Spostare la guaina protettiva scorrevole poco oltre la punta della cannula, introdurre poi la cannula attraverso il Trokar. Dirigere ora la punta nella zona desiderata d'applicazione per fissare la rete, premere con sensibile cautela il pistone verde della siringa.
- Applicare a punti – poche gocce sono sufficienti.
 - Prima di mettere un nuovo punto di fissaggio tirare indietro il sistema d'applicazione per evitare che la punta della cannula s'incolli – se la punta della cannula s'intasa durante l'applicazione: sfilare il sistema d'applicazione dal paziente ed eliminare l'occlusione sfregando la punta con una garza asciutta o tagliandone via un pezzo dell'adeguata grandezza.
 - Estrazione finale del sistema d'applicazione – Accertarsi per sicurezza prima dell'estrazione che la punta della cannula sia coperta dalla guaina protettiva onde evitare residui di Histoacryl sul Trokar. A tal fine tenere la guaina protettiva dalla parte apposta più spessa.
 - I residui di Histoacryl possono essere puliti con Acetone e del dimetilformamide

Articolo	N° articolo	Composizione
Histoacryl® Lap Mesh Fixation	1050165	5 x 0.5 ml Histoacryl® blu, 5 x Applicatore LapFix, 5 x Siringa Injekt 2 ml
	1052008	2 x 0.5 ml Histoacryl® blu, 1 x Applicatore LapFix, 1 x Siringa Injekt 2 ml



AESCULAP® – a B. Braun brand

B. Braun Medical SA | Aesculap | Seesatz 17 | 6204 Sempach
Tel. 058 258 50 00 | Fax 058 258 60 00 | www.bbraun.ch