



LAPAROSKOPIE

AESCULAP® Caiman®

FORTSCHRITTLICHE BIPOLARE GEFÄSSVERSIEGELUNG

AESCULAP® Caiman®

FORTSCHRITTLICHE BIPOLARE GEFÄSSVERSIEGELUNG

Caiman® bipolare Gefäßversiegelungsinstrumente werden in der offenen und laparoskopischen Chirurgie verwendet. Anwendung finden sie in den chirurgischen Disziplinen der **Allgemeinchirurgie, Gynäkologie, Urologie und Thoraxchirurgie.**

■ EFFEKTIVE GEFÄSSVERSIEGELUNG

Hohe Qualität der Gefäßversiegelung bei einmaliger Energie-Aktivierung

■ GLEICHMÄSSIGE GEWEBEKOMPRESSION

Reproduzierbare hohe Qualität der Gefäßversiegelung

■ DISTALES SCHLIESSEN DER INSTRUMENTENSPITZE

Gleichmäßige Gewebekompression und präzise Gefäßpositionierung

■ GEWEBE DISSEKTION

Das fein gebogene Maryland Maulteil Design ermöglicht eine Steigerung der Präparationsfähigkeit und eine verbesserte Perspektive auf die Spitze des Instruments

■ LANGE INSTRUMENTENSPITZEN


Erhöhte Versiegelungslänge und verbesserte chirurgische Effizienz

■ 80° ABWINKLUNG

Vereinfachte Navigation in schwierigen anatomischen Verhältnissen



21,5 mm Versiegelungslänge
20 mm Schnittlänge

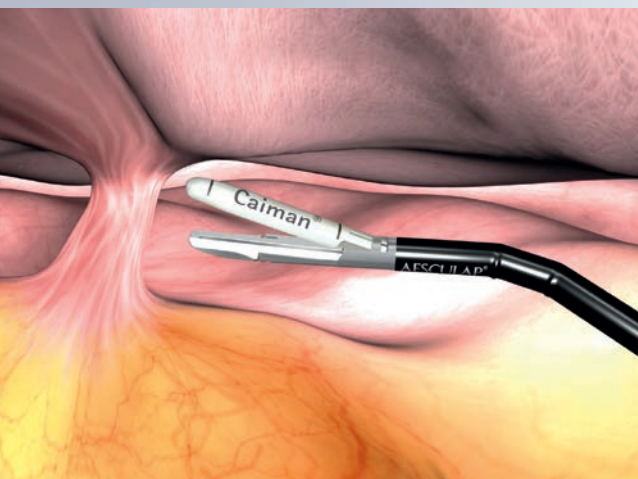


Caiman® BIPOLARE INSTRUMENTE VERSIEGELN

Gefäße bis zu 7 mm Durchmesser und verfügen über eine mittlere thermische Streuung <1 mm.* Die Versiegelung erfolgt gewissermaßen ohne Anhaftung oder Karbonisierung.

80° ABWINKLUNG

Caiman® ist das erste Gefäßversiegelungsinstrument mit einem artikulierbaren distalen Ende. Die Artikulation erweitert die Bewegungsmöglichkeit auch in engen Räumen oder schwierigen anatomischen Verhältnissen.

* Testbericht der Aesculap AG.

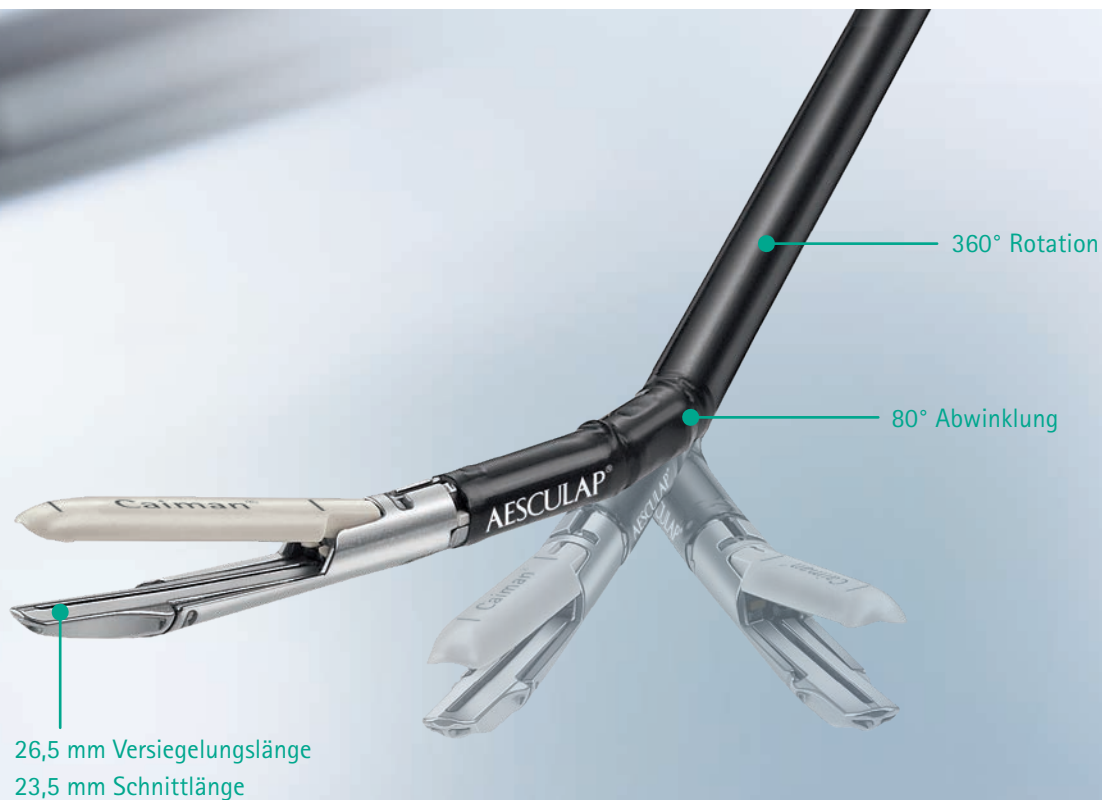






GLEICHMÄSSIGE GEWEBEKOMPRESSION innerhalb des distalen Instruments ist der Schlüssel zu einer effektiven Gefäßversiegelung. Im Gegensatz zu vergleichbaren Instrumenten ist die Flächenkompression des Caiman® stets gleichmäßig. Dies resultiert in einer reproduzierbaren hohen Qualität der Gefäßversiegelung.*

*Testbericht der Aesculap AG.

Rot steht für die minimal erforderliche Kompression (oder höher). Blau bedeutet unzureichende Kompression. Die minimal erforderliche Kompression ist berechnet auf Basis von Aesculap Anforderungen. Die Graphen der minimal erforderlichen Kompression wurden mit einem synthetischen Gewebemodell erzeugt.

BESTELLINFORMATIONEN

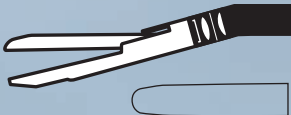		Schaft Durchmesser	Arbeitslänge	Stück pro Packung
	Caiman® 5, NICHT ABWINKELBARE SPITZE			
	PL738SU	5 mm	24 cm	6
	PL740SU	5 mm	36 cm	6
	PL742SU	5 mm	44 cm	6
	Caiman® 5, NICHT ABWINKELBARE MARYLAND SPITZE			
	PL774SU	5 mm	12,5 cm	6
	PL775SU	5 mm	17 cm	6
	PL770SU	5 mm	36 cm	6
	PL772SU	5 mm	44 cm	6
	Caiman® 5, ABWINKELBARE SPITZE			
	PL739SU	5 mm	24 cm	6
	PL741SU	5 mm	36 cm	6
	PL743SU	5 mm	44 cm	6
	Caiman® 5, ABWINKELBARE MARYLAND SPITZE			
	PL771SU	5 mm	36 cm	6
	PL773SU	5 mm	44cm	6
	Caiman® 12, ABWINKELBARE SPITZE			
	PL730SU	12 mm	24 cm	3
	PL731SU	12 mm	44 cm	3



LEKTRAFUSE HF-GENERATOR (OHNE NETZKABEL)

GN200



LEKTRAFUSE HF-GENERATOR ZUBEHÖR

TE780 / TE730 Netzkabel, Schuko-Euro-Stecker, 1,5 m / 5 m


TE676 / TE736 Netzkabel, Kaltgerätestecker, 1 m / 2,5 m

GN330 Einheitswagen mit Schiebegriff für elektrochirurgische Einheiten
B x H x T: 520 x 900 x 570 mm

PV951R Drahtkorb
B x H x T: 370 x 225 x 285 mm



GN201 Einzelfuß-Pedal für GN200

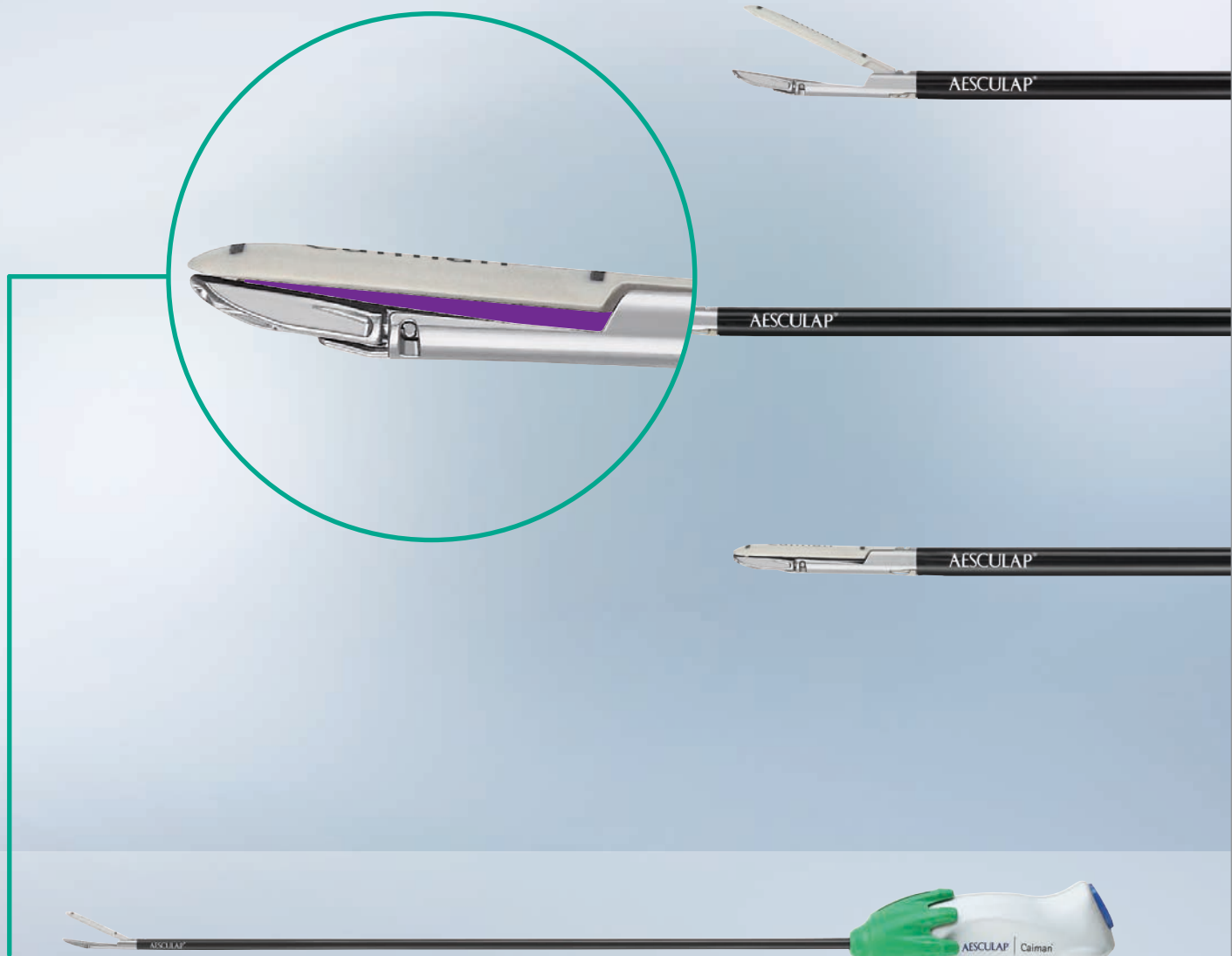

DISTALES SCHLIESSEN DES INSTRUMENTS DURCH PATENTIERTE MECHANIK

Caiman® bipolare Gefäßversiegelungsinstrumente verfügen über eine patentierte distal schließende Wippe. Diese ist der Schlüssel zur gleichmäßigen Gewebekompression und erleichtert das Greifen und Positionieren des Gewebes im Instrument. All diese Merkmale resultieren in einem ausgezeichneten Versiegelungsergebnis.

LANGE INSTRUMENTENSPITZEN

Erhöhte Gefäßversiegelungslänge und verbesserte chirurgische Effizienz.



Vertrieb Österreich

B. Braun Austria GmbH | Aesculap Division | Otto Braun-Straße 3-5 | 2344 Maria Enzersdorf
Tel. +43 2236 46541-0 | Fax +43 2236 46541-177 | www.bbraun.at

Vertrieb Schweiz

B. Braun Medical AG | Aesculap Division | Seesatz 17 | 6204 Sempach
Tel. +41 58258 5000 | Fax +41 58258 6000 | www.bbraun.ch

AESCULAP® – a B. Braun brand

Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | Deutschland
Tel. 07461 95-0 | Fax 07461 95-2600 | www.aesculap.de

Die Hauptproduktmarke „Aesculap“ und die Produktmarke „Caiman“ sind eingetragene Marken der Aesculap AG.
Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Information über unsere Erzeugnisse
verwendet werden. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.