
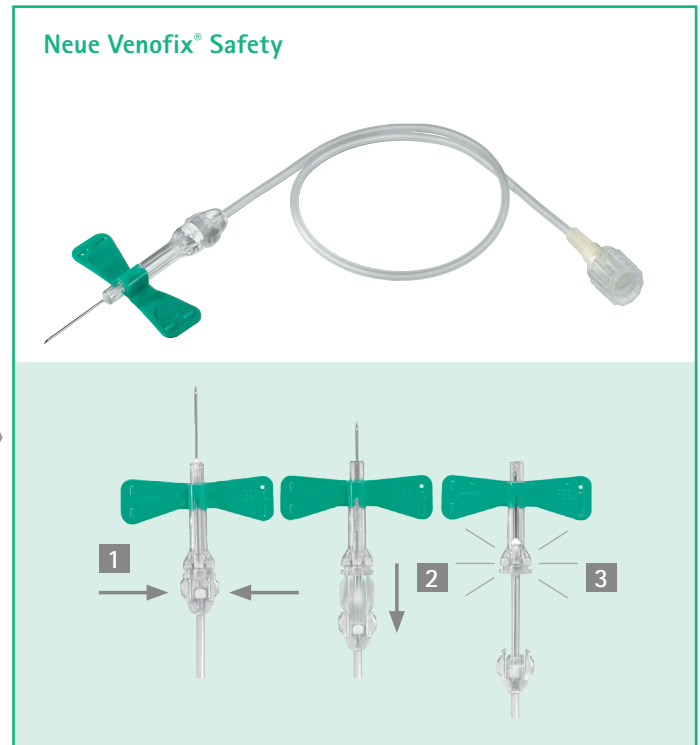


Vergleich des Sicherheitsmechanismus der Venenpunkionsbestecke Venofix® Safety

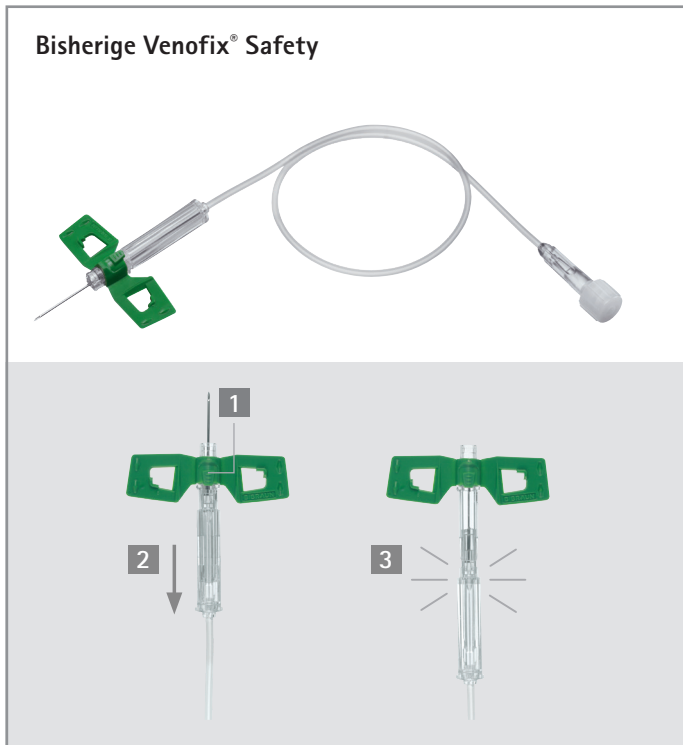

Aktiver Sicherheitsmechanismus

1. Fingerstopper leicht gedrückt halten
2. Transparentes Gehäuse mit Daumen und Mittelfinger zurückziehen, bis
3. die irreversible Aktivierung des Sicherheitsmechanismus durch ein spürbares Einrasten und hörbares Klickgeräusch bestätigt wird.

Aktiver Sicherheitsmechanismus

1. Beide Seiten des transparenten Gehäuses mit Daumen und Mittelfinger zusammendrücken
2. Gehäuse zurückziehen, bis
3. die irreversible Aktivierung des Sicherheitsmechanismus durch ein hörbares Klickgeräusch bestätigt wird.

Name	Farbcode	Art.-Nr	Pharma-code
Venofix® Safety G25, 0.5 x 19 mm, 30 cm	■	4056502-01	3781587
Venofix® Safety G23, 0.65 x 19 mm, 30 cm	■	4056503-01	3781529
Venofix® Safety G21, 0.8 x 19 mm, 30 cm	■	4056504-01	7560400
Venofix® Safety G19, 1.1 x 19 mm, 30 cm	■	4056505-01	4759644
Venofix® Safety G21, 0.8 x 19 mm, 18 cm	■	4056506-01	5539821

Name	Farbcode	Art.-Nr	Pharma-code
Venofix® Safety G25, 0.5 x 19 mm, 30 cm	■	4056502N	1516504
Venofix® Safety G23, 0.65 x 19 mm, 30 cm	■	4056503N	1516505
Venofix® Safety G21, 0.8 x 19 mm, 30 cm	■	4056504N	1516506
Venofix® Safety G19, 1.1 x 19 mm, 30 cm	■	4056505N	1516507
Venofix® Safety G21, 0.8 x 19 mm, 19 cm	■	4056506N	1516508