
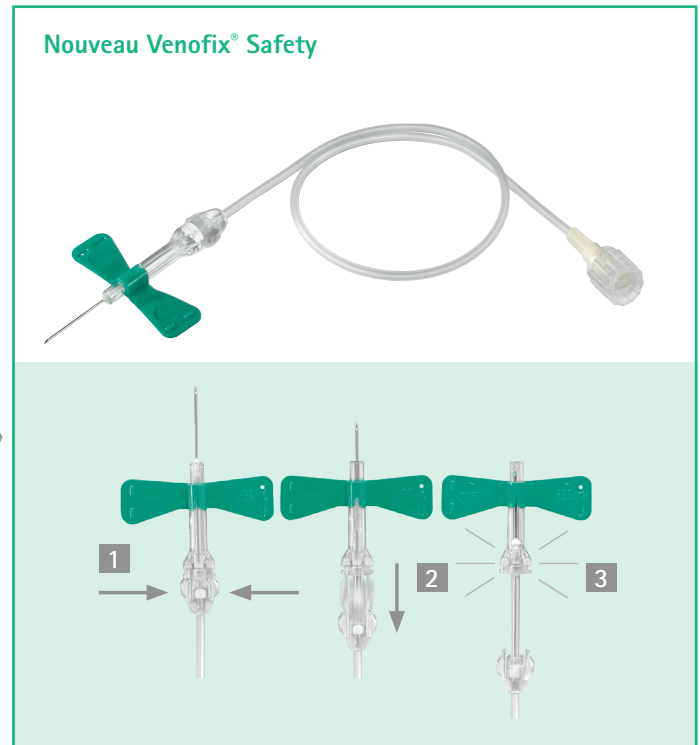


# Comparaison du mécanisme de sécurité des sets de ponction veineuse Venofix® Safety

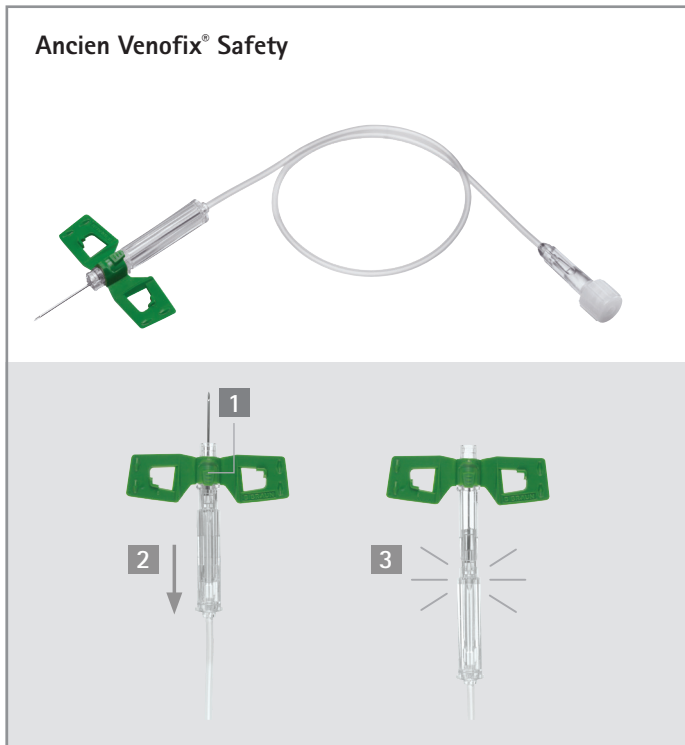

## Activation du mécanisme de sécurité

1. Maintenir le bouton de sécurité légèrement enfoncé
2. Tirer sur le corps transparent du système avec le pouce et le majeur, jusqu'à
3. entendre et sentir un déclic qui confirme l'activation du mécanisme de sécurité.

## Activation du mécanisme de sécurité

1. Presser les deux côtés du corps transparent du système entre le pouce et le majeur
2. Exercer un mouvement de retrait jusqu'à
3. l'activation définitive du mécanisme de sécurité, confirmée par un déclic audible.

Produit	Code couleur	N° art.	Pharma-code
Venofix® Safety G25, 0.5 x 19 mm, 30 cm	■	4056502-01	3781587
Venofix® Safety G23, 0.65 x 19 mm, 30 cm	■	4056503-01	3781529
Venofix® Safety G21, 0.8 x 19 mm, 30 cm	■	4056504-01	7560400
Venofix® Safety G19, 1.1 x 19 mm, 30 cm	■	4056505-01	4759644
Venofix® Safety G21, 0.8 x 19 mm, 18 cm	■	4056506-01	5539821

Produit	Code couleur	N° art.	Pharma-code
Venofix® Safety G25, 0.5 x 19 mm, 30 cm	■	4056502N	1516504
Venofix® Safety G23, 0.65 x 19 mm, 30 cm	■	4056503N	1516505
Venofix® Safety G21, 0.8 x 19 mm, 30 cm	■	4056504N	1516506
Venofix® Safety G19, 1.1 x 19 mm, 30 cm	■	4056505N	1516507
Venofix® Safety G21, 0.8 x 19 mm, 19 cm	■	4056506N	1516508