

ProSet

Hinweis Lock-Verbindungen Instructions pour les connexions Lock

Nachziehen aller Lock-Verbindungen in Sets (Anwenderinformation)

Durch Lagerung, Transport und Sterilisation können sich vorkonnectierte Verbindungen gelockert haben, deshalb ist es erforderlich, dass vor Benutzung des Infusions-Regime die Lock-Verbindungen **manuell** nachgezogen werden (gängige Praxis).

Das Piktogramm ist auf die Einzelverpackung und auf das Kartonetikett aufgedruckt.

Resserrement de toutes les connexions Lock des sets (information aux utilisateurs)

Le stockage, le transport et la stérilisation peuvent conduire à un desserrement des connexions pré-assemblées. C'est pourquoi il est nécessaire de resserrer les connexions Lock manuellement avant l'utilisation du de perfusion (pratique usuelle).

Le pictogramme est imprimé sur l'emballage individuel et sur l'étiquette du carton.

