

# Sterican® Safety

## AIGUILLES À USAGE UNIQUE AVEC MÉCANISME DE SÉCURITÉ



1 Sortez l'aiguille Sterican® Safety de l'emballage primaire conformément à la technique sans contact.



2 Insérez l'aiguille de sécurité à usage unique sur une seringue Luer-Steck ou Luer-Lock. Pour cela, tournez la seringue dans le sens des aiguilles d'une montre tout en tenant l'aiguille au niveau de l'extrémité inférieure du protecteur.




3 Placez le protecteur dans la position réglable adaptée en fonction du type et de la taille de la seringue.




4 Retirez le capuchon de protection dans l'alignement de l'aiguille et sans rotation. Vérifiez les raccords en tenant éventuellement le corps de la seringue et le protecteur.



5 Effectuez la ponction comme d'habitude, conformément à l'indication.

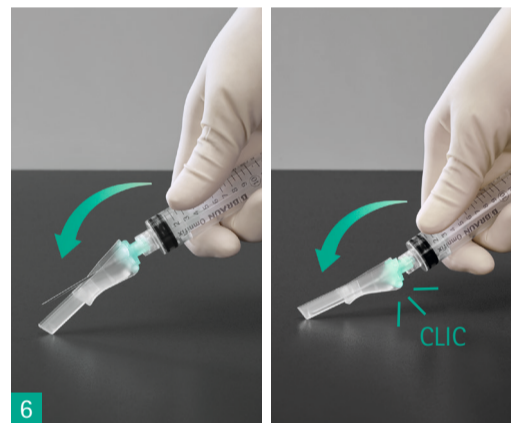

6 Activez le mécanisme de sécurité en appuyant le protecteur contre une surface dure et droite adaptée jusqu'à ce qu'un « clic » audible confirme l'enclenchement de l'aiguille.

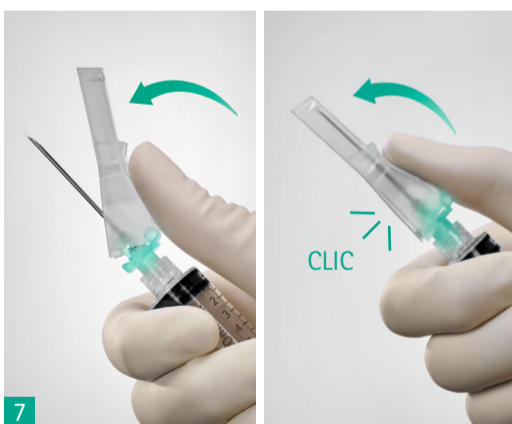

7 Si aucune surface n'est à disposition, appuyez avec le pouce ou l'index sur la surface structurée du protecteur jusqu'à sentir l'enclenchement et entendre un « clic » de confirmation. Activez toujours le mécanisme de sécurité loin de vous et de toute autre personne.



8 Assurez-vous que le mécanisme de sécurité a été activé avant d'éliminer le produit.



9 Éliminez le produit immédiatement après l'activation du mécanisme de sécurité, en respectant les prescriptions en vigueur, dans un récipient à déchets adapté aux seringues et aux instruments médicaux tranchants.