

SCHUTZ VOR  
NADELSTICH-  
VERLETZUNGEN

# Sterican® Safety

EINMALKANÜLEN MIT SICHERHEITSMECHANISMUS



# STERICAN® SAFETY

## EINMALKANÜLEN MIT SICHERHEITSMECHANISMUS


### FÜR MEHR SICHERHEIT

- Einfache, intuitive Handhabung
- Die Aktivierung des Sicherheitsmechanismus wird fühl-, sicht- und hörbar bestätigt
- Der Sicherheitsmechanismus kann unmittelbar nach Gebrauch einhändig ausgelöst werden und umschliesst die Kanüle irreversibel
- Unkomplizierte Entsorgung in Kanülen-Abwurfbehälter



### SICHERHEITSMECHANISMUS

- Abhängig von der Grösse des Schutzschilds rastet die Kanüle an bis zu drei Positionen irreversibel ein
- Die Aktivierung wird fühl-, sicht- und hörbar bestätigt

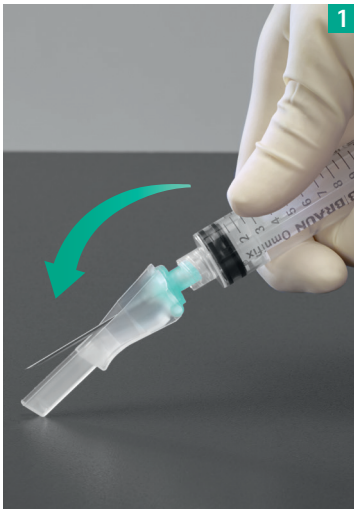

### Aktivierung des Sicherheitsmechanismus

**1** Aktivieren Sie den Sicherheitsmechanismus, indem Sie das Schutzschild gegen eine geeignete feste und gerade Oberfläche drücken, bis ein hörbares «Klicken» das Einrasten der Kanüle bestätigt.

**2** Sollte keine Oberfläche zur Verfügung stehen, drücken Sie mit Daumen oder Zeigefinger gegen die strukturierte Fläche des Schutzschilds, bis das Einrasten zu spüren ist und durch ein hörbares «Klicken» bestätigt wird. Führen Sie die Aktivierung des Sicherheitsmechanismus stets abgewandt von sich und anderen durch.





### KANÜLE

- Original Sterican®-Qualität von B. Braun:  
Dünnwand-Kanülenrohr aus Chrom-Nickelstahl mit Facettenschliff und feindosierter Silikonbeschichtung für die schmerzarme Punktion
- «Bevel Up»- Ausrichtung des Schliiffauges bei Positionierung des Kanülenschutzschilds über dem Spritzenkörper
- Kompatibel mit handelsüblichen Luer-Lock und Luer-Slip Spritzen



### KANÜLENSCHUTZSCHILD







- Das Schutzschild umschließt die Kanüle nach der Aktivierung irreversibel
- Das Schutzschild kann einhändig aktiviert werden
- Das Schutzschild kann stufenlos zurückgeklappt werden und verbleibt in der eingestellten Position



### EINZELVERPACKUNG

- Komfortable Einzelverpackungen - keine Vereinzlung nötig

# PRODUKTÜBERSICHT

Sterican® Safety	Gauge	Aussen-ø mm	Länge		Kanülen- Schutzschild	Pharmacode	Art.-Nr.
			mm	inch			
	 G 30	0.30	13	1/2	kurz	7743318	4670002S-01
	 G 27	0.40	13	1/2	kurz	7743319	4670005S-01
	 G 26	0.45	13	1/2	kurz	7743320	4670008S-01
	 G 25	0.50	16	5/8	kurz	7743321	4670012S-01
	 G 24	0.55	25	1	lang	7743322	4670022S-01
	 G 23	0.60	30	1 1/4	lang	7743323	4670027S-01
	 G 22	0.70	30	1 1/4	lang	7743324	4670032S-01
	 G 21	0.80	40	1 1/2	lang	7743325	4670045S-01
	 G 20	0.90	40	1 1/2	lang	7743326	4670050S-01
	 G 19	1.10	40	1 1/2	lang	7743327	4670052S-01
 G 18	1.20	40	1 1/2	lang	7743328	4670055S-01	

Packung à 100 Stück

B. Braun Medical AG | Hospital & Out Patient Market | Seesatz 17 | 6204 Sempach | [www.bbraun.ch](http://www.bbraun.ch)  
 Hospital Market: Tel. 0848 83 00 44 | Fax 0800 83 00 43 | [sales-hospital.bbmch@bbraun.com](mailto:sales-hospital.bbmch@bbraun.com)  
 Out Patient Market: Tel. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32 | [sales-opm.bbmch@bbraun.com](mailto:sales-opm.bbmch@bbraun.com)