

Sterican® Safety

AGHI MONOUSO CON MECCANISMO DI SICUREZZA



1 Estrarre Sterican® Safety dalla confezione primaria osservando la tecnica non-touch.



2 Collegare l'ago di sicurezza monouso con una siringa Luer o Luer Lock. Girare la siringa in senso orario, reggendo l'ago all'estremità inferiore dello scudo di protezione.




3 Portare lo scudo di protezione nella posizione regolabile consentita dal tipo e dalle dimensioni della siringa.




4 Rimuovere il cappuccio di protezione con un movimento diritto, senza girarlo. Fissare i connettori reggendo all'occorrenza la camicia della siringa e lo scudo di protezione.



5 Eseguire la punzione come d'abitudine secondo le indicazioni.

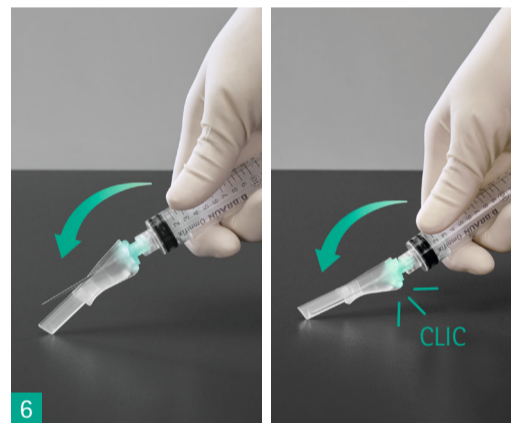

6 Attivare il meccanismo di sicurezza premendo lo scudo di protezione contro una superficie adeguatamente piana e rigida finché non si sente un «clic» a conferma del blocco dell'ago.

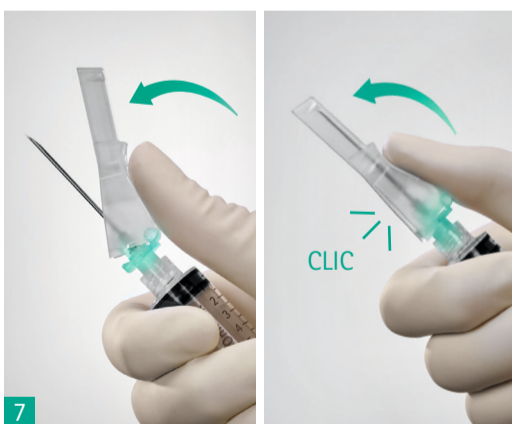

7 Se non si hanno superfici a disposizione, premere con il pollice o l'indice sulla superficie strutturata dello scudo di protezione finché non si avverte il blocco dell'ago, confermato da un «clic» udibile. Attivare il meccanismo di sicurezza sempre evitando di rivolgere l'ago verso di sé o altre persone.



8 Prima di smaltire il prodotto assicurarsi che il meccanismo di sicurezza sia stato attivato.



9 Smaltire il prodotto subito dopo l'attivazione del meccanismo di sicurezza secondo le norme vigenti in un apposito contenitore dei rifiuti per strumenti medici appuntiti e affilati.