

PROTECTION CONTRE
LES BLESSURES PAR
PIQÛRES D'AIGUILLES

Sterican® Safety

AIGUILLES À USAGE UNIQUE AVEC MÉCANISME DE SÉCURITÉ

STERICAN[®] SAFETY

AIGUILLES À USAGE UNIQUE AVEC MÉCANISME DE SÉCURITÉ

POUR DAVANTAGE DE SÉCURITÉ

- Manipulation facile et intuitive
- L'activation du mécanisme de sécurité se sent, se voit et s'entend
- Le mécanisme de sécurité peut être enclenché à une main immédiatement après l'utilisation et entoure l'aiguille définitivement
- Élimination facile dans un collecteur d'aiguilles



MÉCANISME DE SÉCURITÉ

- Selon la taille du protecteur, l'aiguille est définitivement enclenchée dans trois positions maximum
- L'activation se sent, se voit et s'entend



Activation du mécanisme de sécurité

1 Activez le mécanisme de sécurité en appuyant le protecteur contre une surface dure et droite adaptée jusqu'à ce qu'un « clic » audible confirme l'enclenchement de l'aiguille.

2 Si aucune surface n'est à disposition, appuyez avec le pouce ou l'index sur la surface structurée du protecteur jusqu'à sentir l'enclenchement et entendre un « clic » de confirmation. Activez toujours le mécanisme de sécurité loin de vous et de toute autre personne.





AIGUILLE

- Qualité Sterican® originale de B. Braun :
Tube d'aiguille à paroi mince en acier inoxydable avec biseau à facettes et revêtement en silicone précisément dosé pour une ponction indolore
- Orientation « Bevel Up » de l'œil du biseau lors du positionnement du protecteur d'aiguille au-dessus du corps de la seringue
- Compatible avec les seringues Luer-Lock et Luer-Slip du commerce



PROTECTEUR D'AIGUILLE


- Après son activation, le protecteur entoure définitivement l'aiguille
- Le protecteur peut être activé à une main
- Le protecteur peut être basculé en arrière de manière fluide et reste dans la position définie



EMBALLAGE INDIVIDUEL

- Emballage individuel pratique – pas de séparation nécessaire

VUE D'ENSEMBLE DES PRODUITS

Sterican® Safety	Gauge	ø extérieur (mm)	Longueur		Protecteur d'aiguille	Pharmacode	N° art.
			mm	pouce			
	G 30	0.30	13	1/2	court	7743318	4670002S-01
	G 27	0.40	13	1/2	court	7743319	4670005S-01
	G 26	0.45	13	1/2	court	7743320	4670008S-01
	G 25	0.50	16	5/8	court	7743321	4670012S-01
	G 24	0.55	25	1	long	7743322	4670022S-01
	G 23	0.60	30	1 1/4	long	7743323	4670027S-01
	G 22	0.70	30	1 1/4	long	7743324	4670032S-01
	G 21	0.80	40	1 1/2	long	7743325	4670045S-01
	G 20	0.90	40	1 1/2	long	7743326	4670050S-01
	G 19	1.10	40	1 1/2	long	7743327	4670052S-01
	G 18	1.20	40	1 1/2	long	7743328	4670055S-01

Boîte de 100 pièces

B. Braun Medical SA | Hospital & Out Patient Market | Seesatz 17 | 6204 Sempach | www.bbraun.ch
 Hospital Market : Tél. 0848 83 00 44 | Fax 0800 83 00 43 | sales-hospital.bbmch@bbraun.com
 Out Patient Market : Tél. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32 | sales-opm.bbmch@bbraun.com