



Introcan Safety®

Die Venenverweilkanüle für Ihre kleinsten Patienten

Ergonomisches Design für Patienten mit besonderen Gefäßverhältnissen

Die Versorgung von Patienten mit kleinen Venen und niedrigem venösem Blutdruck stellt besondere Anforderungen an die Infusionstherapie. Insbesondere in Neugeborenen- und Pädiatriestationen stellt das Legen eines peripheren Venenzugangs eine sehr belastende Situation dar – sowohl für Sie als auch für den Patienten. Introcan Safety® ist mit modernsten Sicherheitsfunktionen ausgestattet. Das ergonomisch optimierte Design macht die

Venenpunktion in allen Phasen angenehmer für Sie und Ihre kleinen Patienten. Versehentliche Nadelstichverletzungen werden durch den patentierten, selbstauslösenden Clip-Mechanismus weitestgehend vermieden.

Speziell für Neugeborene ist Introcan Safety® G24 **jetzt auch mit kürzerem Katheterstück (14 mm)** erhältlich.



Schnell – Blutrückfluss in der Kanüle

Rasche Überprüfung der korrekten Venenpunktion

Die Kanüle liegt korrekt im Gefäß, wenn in der transparenten Kammer Blut erscheint. Die Introcan Safety® G24 zeichnet sich durch eine neue Kanülentechnik mit grösserem Kanülen-Innendurchmesser aus, die für einen raschen Blutrückfluss in die transparente Kammer sorgt.



Sicher – Blutrückfluss im Katheter

Sichere Überprüfung der korrekten Katheterlage

Nach Feststellung der erfolgreichen Gefässpunktion wird der Katheter um 1 cm vorgeschoben. Wenn dabei Blut in der Kapillare hochsteigt, liegt der Katheter korrekt im Gefäß.



Bezeichnung	Gauge	Katheterlänge inch	Katheterlänge ø (mm)	Durchflussrate ml/min	Bestellnummer
Introcan Safety®	24	0.75	0.7 × 19	22	4251601-01
Introcan Safety®-W	24	0.75	0.7 × 19	22	4253523-01
Introcan Safety®	24	0.55	0.7 × 14	26	4251607-01
Introcan Safety®-W	24	0.55	0.7 × 14	26	4251614-01

