


# Vasofix® Safety

praktische Empfehlungen


Vascular Access




**1** Vor der Venenpunktion die Punktionsstelle vorschriftsgemäss desinfizieren und Katheter inspizieren. Kanüle in einem von Ihnen gewohnten Winkel einführen.

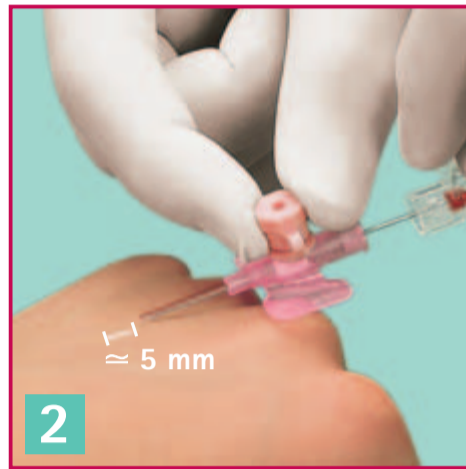

**2** Katheter einführen bis Blut in der Rückflusskammer ersichtlich ist. Danach den gesamten Katheter 3–5 mm vorschieben. Stahlkanüle 1 cm zurückziehen ohne die Katheterposition zu ändern. Achten Sie auf den Blutrückfluss im Kunststoff-Kapillar. Katheter ganz in die Vene schieben.

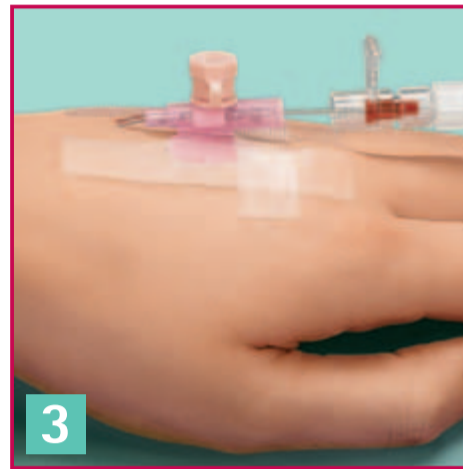

**3** Katheter bei noch eingesetzter Stahlkanüle auf der Haut fixieren. Auf diese Weise lässt sich die austretende Blutmenge minimieren.

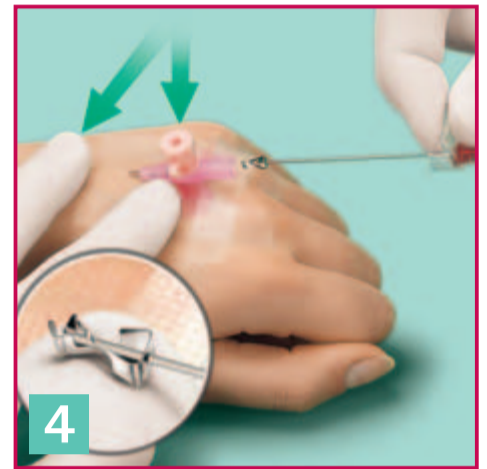

**4** Vor dem Entfernen der Stahlkanüle mittels V-Technik die Vene mit dem Mittelfinger abdrücken, gleichzeitig mit dem Zeigefinger den Katheteransatz stabilisieren. Durch den selbstaktivierenden Sicherheitsmechanismus schliesst sich beim Herausziehen automatisch der Safety-Clip um die Kanülenspitze.



**5** Infusionsleitung an den Lock-Ansatz des Katheters anschliessen und Punktionsstelle mit einem sterilen Verband abdecken.



**6** Für die Arzneimittelinjektion die Spritze mit einer leichten Drehbewegung am integrierten Port ansetzen. Der Port ist mit einem Ventil ausgestattet, das sich automatisch öffnet und wieder schliesst, so dass kein Rückfluss möglich ist.



**7** Nach der Injektion die Ventil-Schutzkappe sofort wieder schliessen.




**8** Bei längerer Unterbrechung der Infusion kann zur Abdichtung des Katheterlumens ein steriler Mandrin eingesetzt werden.

## Ihr Vorteil:

Sie punktieren wie gewohnt, der Sicherheitsmechanismus aktiviert automatisch – zu Ihrer Sicherheit.

[www.infusionsecurity.ch](http://www.infusionsecurity.ch)

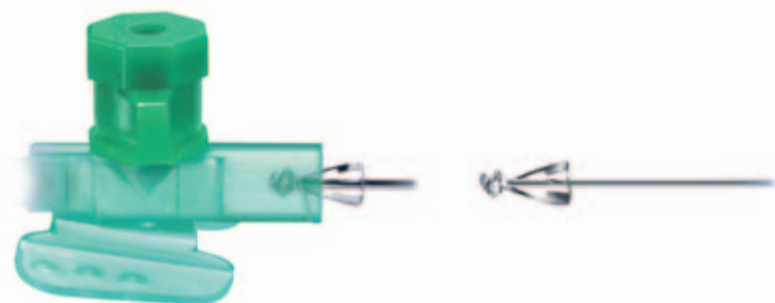

**B | BRAUN**  
SHARING EXPERTISE