

COVID Impfset Erwachsene & Jugendliche

Gebrauchsinformation

COVID kit de vaccination adultes & jeunes

Mode d'emploi

COVID set di vaccinazione adulti & giovani

Istruzioni per l'uso

Nuvaxovid® (Novavax)

Hinweis: Blaufärbung der Flüssigkeit dient nur zu Illustrationszwecken

Remarque: la coloration bleue du liquide ne sert qu'à des fins d'illustration

Nota: la colorazione blu del liquido è solo a scopo illustrativo



1
Hygienische Händedesinfektion
Désinfection hygiénique des mains
Disinfezione igienica delle mani.



2
Zur Vorbereitung das Impfstoff-Vial schwenken.
→ **NICHT SCHÜTTELN!**
Impfstoff-Vial mit Alkoholpad desinfizieren und einwirken lassen.

Pour la préparation tourner le flacon de vaccin.
→ **NE PAS AGITER!**
Désinfecter le flacon de vaccin avec un tampon d'alcool et laisser agir.

Per la preparazione roteare il flaconcino del vaccino.
→ **NON AGITARE!**
Disinfettare il flaconcino del vaccino con un tamponcino alcolico e lasciar agire.



3
Aufziehkanüle an Spritze konnectieren, Impfstoff-Vial anstechen und 0.5ml aufziehen.

Connecter l'aiguille d'aspiration à la seringue, percer le flacon de vaccin et prélever 0.5 ml du contenu.

Innestare l'ago di aspirazione sulla siringa, perforare la fiala del vaccino e prelevare 0.5 ml.



4
Spritze dekonnectieren. Aufziehkanüle im Vial stecken lassen wenn unmittelbar mehrere Entnahmen gemacht werden, ansonsten Aufziehkanüle abziehen und verwerfen.

Déconnecter la seringue. Laisser l'aiguille d'aspiration dans le flacon de vaccin si plusieurs prélèvements sont prévus immédiatement, sinon retirer l'aiguille d'aspiration et les jeter.

Scollegare la siringa lasciando l'ago di aspirazione nel flaconcino se si procede subito ad altri prelievi, altrimenti estrarre e smaltire l'ago di aspirazione.



5
Neue 30 mm Injektionskanüle an vorgefüllte Spritze konnectieren
→ **ready to use.**

Montez la nouvelle aiguille d'injection de 30 mm sur la seringue préremplie.
→ **prêt à l'emploi.**

Collegare alla siringa preimpunita il nuovo ago per iniezione da 30 mm.
→ **pronta all'uso.**



6
Patienteneinstichstelle mit neuem Alkoholpad desinfizieren und einwirken lassen.
Désinfecter le site d'injection du patient avec un nouveau tampon d'alcool et laisser agir.
Disinfettare il sito di iniezione con un nuovo pad con alcool e lasciar agire.



7
Impfung verabreichen.
Administrier le vaccin.
Somministrare il vaccino.



8
Mit Tupper Blutung stillen und mit Pflaster abdecken.
Arrêter le saignement en appliquant un tampon d'ouate et recouvrir d'un pansement.
Fermare il sanguinamento con il tampone e coprire con un cerotto.



www.bbraun.ch/vaccinationkit

Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.

In Einzelfällen kann gemäss Anordnung der QvP (Qualitätsverantwortlichen Person) eine Anpassung erfolgen, z.B. kein Nadelwechsel zwischen Aufziehen und Applikation.

Sous réserve de modification, toutes les indications étant sans garantie.

Dans certains cas la personne responsable de la qualité peut ordonner une adaptation, p. ex. de ne pas changer d'aiguille entre l'aspiration et l'application.

Salvo modifiche, tutte le informazioni senza garanzia.

In singoli casi, può esserci un adattamento in base all'ordine della persona responsabile della qualità, ad esempio nessuna sostituzione dell'ago tra l'aspirazione e l'applicazione.