



- Petit
- Discret
- Sûr

Be 1

L'INNOVATION POUR PLUS DE CONTRÔLE

Colostomie

LIMITATION DE LA QUALITÉ DE VIE

Une colostomie, qu'elle soit permanente ou seulement temporaire, est un changement sérieux dans la vie quotidienne de vos patients, qui est associé à de nombreux nouveaux défis.^{1,2} La perte du contrôle des selles et des gaz ainsi que la formation de bruits^{3,4} ont des suites directes sur la vie en société, la vie intime, ainsi que les loisirs et d'autres activités des personnes concernées.⁵ Le port d'une poche modifie également de façon significative la sensation corporelle.

DES ÉTUDES LE PROUVENT

50 %

des porteurs de colostomie ont le sentiment de

➤ **PERDRE LE
CONTRÔLE DE
LEUR CORPS**

car ils ne peuvent plus contrôler la sortie des selles et des gaz.^{3,4}

1/3

des porteurs de colostomie se sentent

➤ **LIMITÉS DANS
LEUR VIE SOCIALE
ET LEURS LOISIRS.**

Le 3^e

plus grand souci des porteurs de colostomie est

➤ **LES BRUITS
PROVOQUÉS PAR
LA STOMIE ET LA
POCHE⁵,**


que l'on ne peut pas dissimuler.

Be 1

LA SOLUTION INNOVANTE

Be 1 est un concept novateur pour le traitement de la colostomie : une capsule compacte qui offre la sécurité et le contrôle. Elle est utilisée par des porteurs de colostomie côté gauche, ayant des selles bien formées ou pâteuses. Be 1 se fixe sur le support de base Softima® 3S Be 1 plat. Le diamètre de la stomie ne devrait pas être plus grand que 40 mm et la proéminence de la stomie env. 10 mm.

QU'EST-CE QUE BE 1 ?

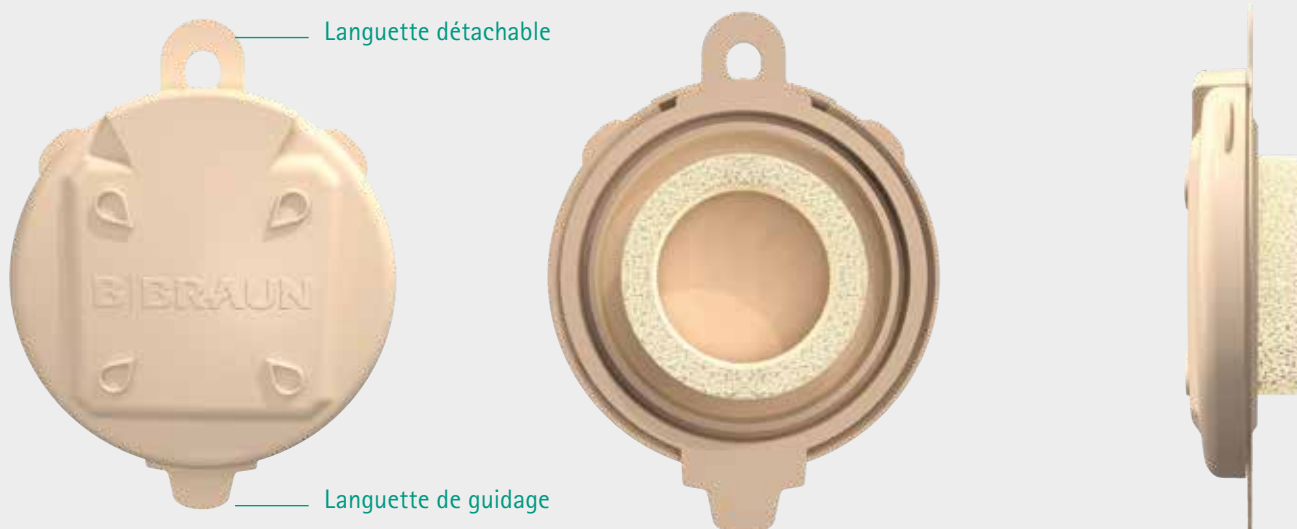

CAPSULE BE 1

Pour fixer sur le support de base Softima® 3S Be 1 avec languette de guidage et languette détachable intégrées

MOUSSE HYGIÉNIQUE

Conduit les selles dans la poche, facilite le nettoyage du support de base et diminue les bruits désagréables

PETITE, DISCRÈTE


10 mm d'épaisseur et ne provoque aucun bruit lors du port

Be 1

RETROUVER LE CONTRÔLE


Avec la capsule Be 1 les gaz libérés sont neutralisés grâce au filtre à charbon actif intégré, comme dans les poches fermées conventionnelles. En cas d'une formation plus importante de gaz, les patients peuvent laisser les gaz s'échapper manuellement, en appuyant sur la touche de libération des gaz. Dans ce cas, le filtre intégré est inactivé. Voilà pourquoi nous recommandons aux patients de se retirer auparavant dans un endroit discret.

ÉVACUATION DES GAZ CONTRÔLÉE

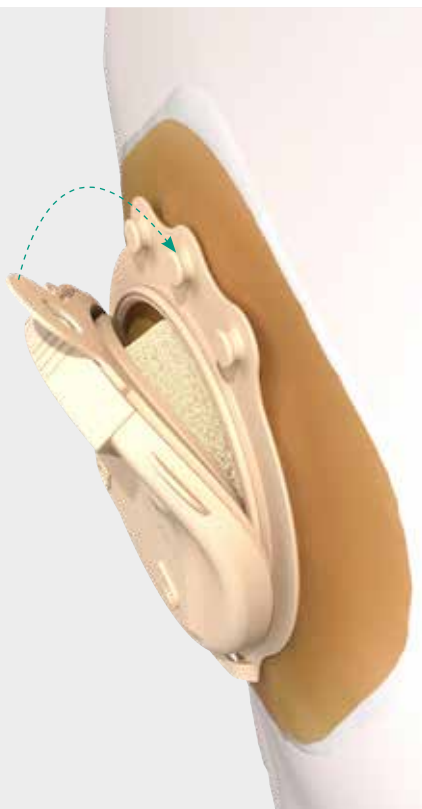

SYSTÈME DE GUIDAGE

Positionnement exact et intuitif

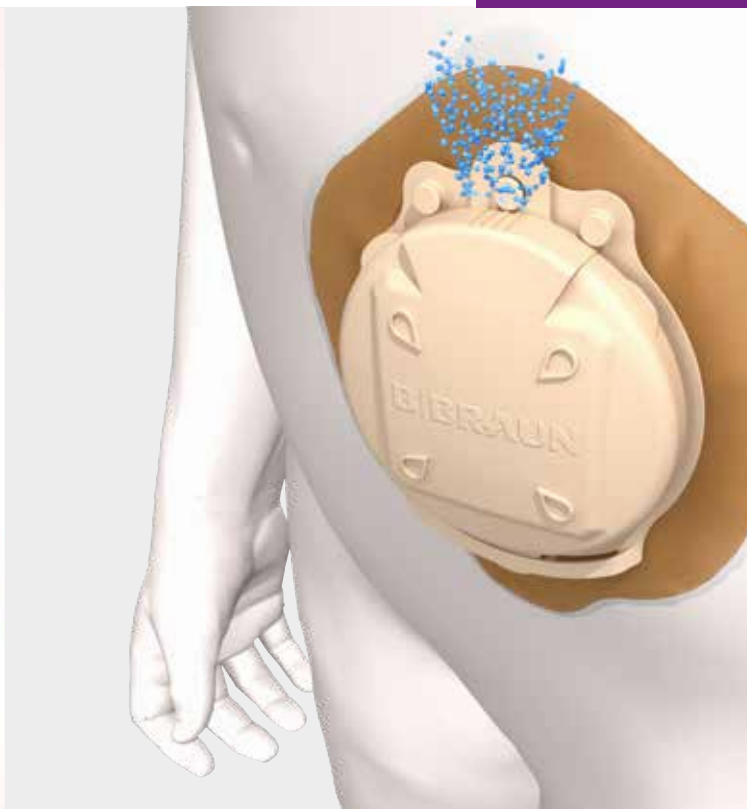

ÉVACUATION DES GAZ

Passif continuellement, avec filtre intégré en charbon actif



Actif, par la touche de libération des gaz

Par la sensation d'une tension sur la peau ou le gonflement du couvercle de la capsule Be 1, les patients ressentent l'arrivée des excréments. Ils peuvent alors déplier la poche enfermée dans la capsule, dans un endroit discret. Après l'évacuation des selles, la capsule sera éliminée et remplacée par une nouvelle capsule Be 1.

ÉVACUATION DES SELLES CONTRÔLÉE



SYSTÈME DE POCHE DISSIMULÉ

Éloigner le couvercle manuellement, resp. s'ouvre automatiquement en cas de pression trop élevée



EXCRÉTIONS

Ôter la capsule et la remplacer par une nouvelle

Be 1

POUR UNE JOURNÉE ACTIVE



+



+



ÉPROUVÉE EN CLINIQUE

75 %

des patients ont retrouvé

➤ **LE CONTRÔLE DE LEUR CONTINENCE**

et ainsi sur leur évacuations de gaz et de selles.⁶

60 %

des patients déclarent ressentir

➤ **UNE BONNE JUSQU'À TRÈS BONNE IMAGE CORPORELLE**

en portant Be 1.⁶

79 %

des patients confirment que

➤ **BE 1 NE PRODUIT PAS DE BRUITS**

et que les bruits de la poche sont évités.⁶

➤ **Vos patients seront dès maintenant accompagnés d'une image corporelle nettement meilleure et d'une nouvelle joie de vivre. Actifs, positifs, en société, sûr de soi et heureux – GRÂCE À BE 1 !**

1) «Quality of life outcomes in 599 cancer and non-cancer patients with colostomies», Krouse R & al, J Surg Res. 2007 Mar 138(1): 79-87

2) «Quality of life in colorectal cancer. Stoma vs non stoma patients», Sprangers MA & al, Dis Colon Rectum. 1995 Apr; 38(4): 361-369

3) «The pursuit of colostomy continence», Roberts DJ, J Wound Ostomy Continence Nurs. 1997 Mar 24(2):92-97







4) «Psychological impact of colostomy pouch change and disposal», Mc Kenzie F & al, Br J Nurs. 2006 Mar 23-Apr 12;15(6):308-316

5) «Stoma surgery for colorectal cancer: a population-based study of patient concerns», Lynch BM, J Wound Ostomy Continence Nurs. 2008 Jul-Aug; 35(4): 424-428

6) Multicenter, pilot open-label interventional clinical study on 30 colostomates performed in 7 French sites. Ref OPM-G-H-1604

Be 1

SURVOL DU PRODUIT

	Article	Contenu Ø stomie	Unité	N° art.	Pharmacode
	Softima® 3S capsule Be 1				
	55 mm	615 ml	10	9350155A	
	55 mm	615 ml	30	9350355A	
	65 mm	635 ml	10	9350165A	
	65 mm	635 ml	30	9350365A	
	Softima® 3S Be 1 Support de base plat				
	55 / 15 - 40 mm ☞	Ø bis 30 mm	5	936517A	
	55 / 15 - 40 mm ☞	Ø bis 30 mm	10	936516A	
	65 / 15 - 50 mm ☞	Ø bis 40 mm	5	936617A	
	65 / 15 - 50 mm ☞	Ø bis 40 mm	10	936616A	
	Softima® 3S colostomie Midi				
	55 mm beige	460 ml	30	931055A	6096254
	65 mm beige	460 ml	30	931065A	6096260
	Softima® 3S colostomie Maxi				
	55 mm beige	600 ml	30	931455A	6096219
	65 mm beige	600 ml	30	931465A	6096225
	Softima® 3S iléostomie Midi Roll'up				
	55 mm beige	560 ml	30	932055A	6096952
	65 mm beige	560 ml	30	932065A	6096969
	Softima® 3S iléostomie Maxi Roll'up				
	55 mm beige	720ml	30	932455A	6096900
	65 mm beige	720 ml	30	932465A	6096917

Plus d'informations sur Be 1 :
www.bbraun.ch/be1



Supported by



B. Braun Medical SA | Hospital & Out Patient Market | Seesatz 17 | 6204 Sempach
Tél. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32 | sales-opm.bbmch@bbraun.com | www.bbraun.ch/be1