

# OTC SPOTLIGHT

B. BRAUN MEDICAL AG | DEZEMBER 2018



## Editorial

Liebe Leserinnen und Leser

Wir begrüßen Sie herzlich zur Dezember-Ausgabe 2018 von OTC SPOTLIGHT – dem Apotheken-Newsletter von B. Braun Medical AG.

In dieser Ausgabe behandeln wir das Thema Verbrennungen. Wir zeigen Ihnen, nach welchen Kriterien Sie eine Verbrennung beurteilen und wie Sie Verbrennungen Grad 1 und 2a direkt in der Apotheke versorgen können.

Zudem finden Sie mehr Informationen zu Narbenpflege, Wundauflagen sowie ein attraktives Angebot speziell für Apotheken.

Viel Spass beim Lesen!

### Ihr Redaktionsteam

Giovanna Gasperetti  
Marketing Manager

Franziska Leu  
Product Manager OTC

## Unsere Themen

### WUNDVERSORGUNG BEI VERBRENNUNGEN

**Prontosan® acute Wundgel** kühlt und befeuchtet Verbrennungen Grad 1 und 2a optimal. Zudem lindert es den Schmerz und minimiert die Narbenbildung.

### WUNDVERBÄNDE BEI VERBRENNUNGEN

Das **Askina® Pad** verklebt nicht mit der Wunde und eignet sich ideal bei Verbrennungen.

**Askina® Finger Bob** ist der praktische Fingerverband mit dem schnellen Dreh.

### NARBENPFLEGE NACH VERBRENNUNGEN

**Askina® Scar Repair** kann zu einem schöneren und verbesserten Narbenbild beitragen.

### JETZT PROFITIEREN

Profitieren Sie von unserem attraktiven Angebot zu:

- Prontosan® acute Wundgel
- Askina® Scar Repair
- Askina® Finger Bob

# Verbrennungen

## WINTERZEIT IST FEUERZEIT

Schnell ist es passiert: Man verbrennt sich am Streichholz, am heissen Feuerzeug, der Kerze oder gar am Cheminée-F Feuer. Die Haut schmerzt, ist gerötet und es entsteht oftmals eine Brandblase. Vor der richtigen Versorgung einer Verbrennungswunde sollte vorgängig immer eine korrekte Beurteilung erfolgen.


### Kriterien zur Beurteilung der Verbrennung

Als Erstes wird aufgrund der Verbrennungstiefe der Verbrennungsgrad bestimmt. Der zweite entscheidende Punkt ist die **Verbrennungsausdehnung**.

## VERBRENNUNGSGRAD

Beurteilungskriterien	Grad 1	Grad 2a	Grad 2b	Grad 3	Grad 4
<b>Betroffene Hautschicht</b>	Epidermis	Epidermis und oberste Schicht der Dermis	Epidermis und tiefere Schicht der Dermis	Dermis und Subkutis	Alle Hautschichten sowie darunterliegende Knochen und Faszien
<b>Hautzustand</b>	Rötung, leichte Schwellung	Blasenbildung (Blasengrund rot)	Blasenbildung (Blasengrund rot-weiss)	Schwarz-weiße Nekrosen/Blasen	Verkohlung
<b>Schmerzempfinden</b>	Mittel	Stark	Stark	Kein bis schwach (Nervenenden zerstört)	Kein
<b>Prognose</b>	Vollständig reversibel	Vollständig reversibel	Reversibel mit Narbenbildung oder irreversibel	Irreversibel	Irreversibel


## SCHEMATISCHE VERBRENNUNGSGRAD 1 – 4

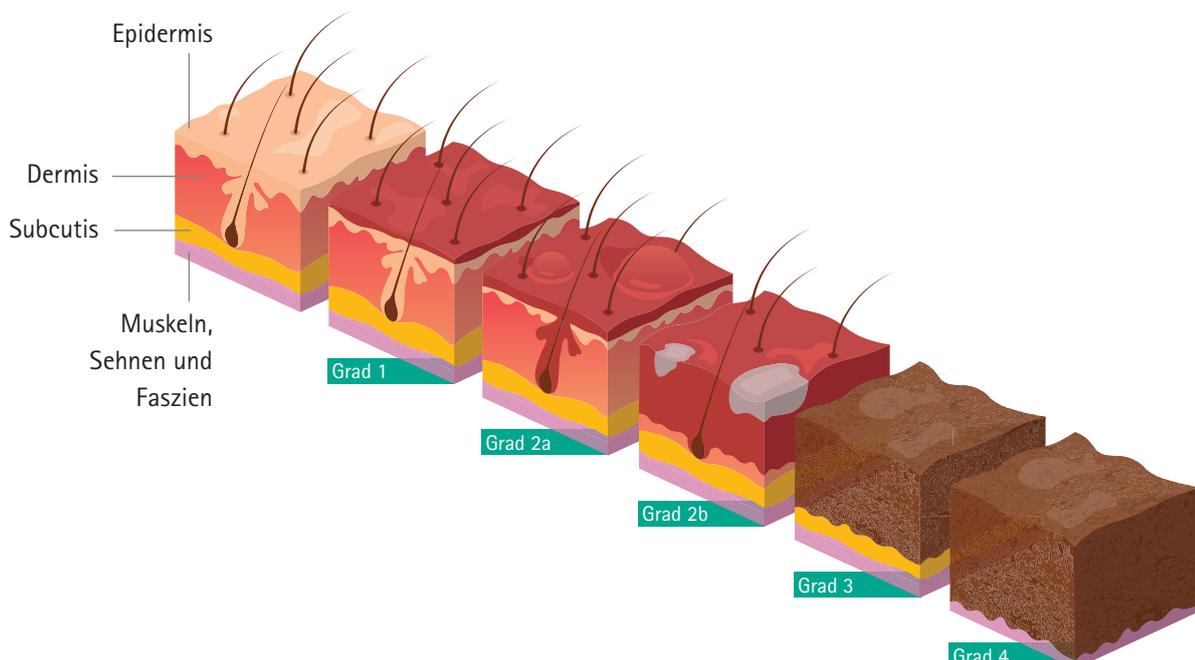

## VERBRENNUNGS-AUSDEHNUNG

Zur Einschätzung der Verbrennungsausdehnung bei Erwachsenen kann man sich auf die Neuner-Regel nach Wallace beziehen:

- Der Körper wird in elf Areale von je 9% Körperoberfläche eingeteilt.
- Die Handfläche macht ca. 1% der Körperoberfläche aus und kann dabei als Hilfsmittel verwendet werden.

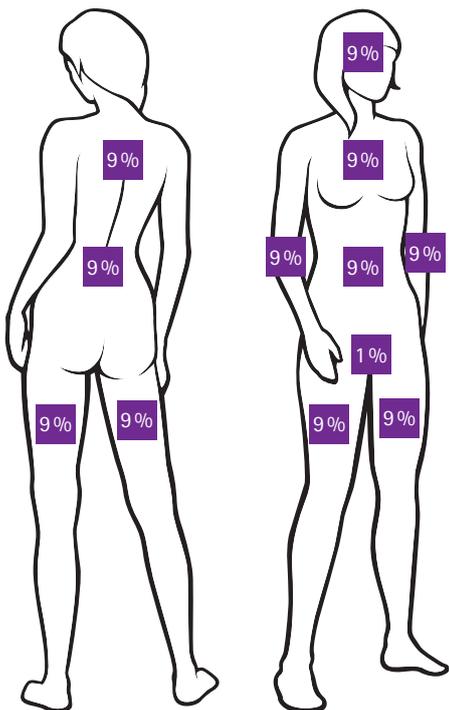

- Kopf 9%
  - Arme inkl. Handflächen 2 x 9%
  - Stamm vorne 2 x 9%
  - Stamm hinten 2 x 9%
  - Beine vorne 2 x 9%
  - Beine hinten 2 x 9%
  - Genitalien 1%
- Total 11 x 9% + 1% = 100%.

### Erstversorgung Verbrennungen Grad 1 und 2a

Kleinflächige Verbrennungen (bis maximal Grösse Handfläche) können direkt in der Apotheke versorgt werden:

- Mit fliessendem lauwarmem Leitungswasser bis zu 10 Minuten kühlen
- Brandblasen wenn möglich immer geschlossen halten
- Zur Kühlung, Befeuchtung und Schmerzlinderung **Prontosan® acute Wundgel** grosszügig auf die Verbrennung auftragen
- Wunde mit einer semi-okklusiven Wundauflage oder beschichteten Mullkompressen abdecken.

Bei Verbrennungswunden, die schnell austrocknen, empfehlen wir ein wiederholtes Auftragen von Prontosan® acute Wundgel alle 10 Stunden.

### Erstversorgung Verbrennungen Grad 2b, 3 und 4

Bei tiefen und grossflächigen Verbrennungen (10% bis 20% der Körperoberfläche) sowie bei Patienten mit Kreislaufbeschwerden ist unverzüglich der Notfall zu alarmieren. Als Sofortmassnahme können Sie den Körper des Patienten vor Wärmeverlust mit einer Alu-Decke locker abdecken.



## Weitere Helfer

### Askina® Pad Vlieskompressen

- Nehmen das Wundexsudat sehr gut auf
- Kein Verkleben mit der Wunde
- Schmerzärmer Verbandwechsel



Zur Fixation eignet sich die Askina® kohäsive Fixierbinde.

### Askina® Finger Bob®

Der patentierte Fingerfixierverband mit dem schnellen Dreh.



Der Askina® Finger Bob® ist ein Finger-Schnellverband zur sicheren und sekundenschnellen Fixierung von Gaze-Kompressen an den Fingern:

1. Primärverband am Finger anbringen
2. Askina® Finger Bob® auf der Fingerspitze ansetzen und über den Finger abrollen.

### Askina® Scar Repair

- Dünnes hautfarbiges Silikonpflaster zur Narbenbehandlung
- Tragezeit mind. 2 Monate, 24 Stunden pro Tag
- Mehrfach wiederverwendbar
- Behandlung ab Re-Epithelisierungsphase

Die 5 Silikon-Pflaster pro Packung reichen für eine Monats-Behandlung.



# Offerte: B. Braun Dezember 2018

Gültig vom 3. – 21. Dezember 2018

Artikel	Pharmacode	Rabatt auf Ex-Factory-Preis*	Bestellung
 <b>Prontosan® acute Wundgel</b> <b>30 g</b>	5439278	ab 15 Stück = 20% ab 20 Stück = 25%	Stück
 <b>Askina® FingerBob®</b> farbig, 180 mm 12er Pack x 6 Stück	1612662	ab 4 Stück = 10% ab 6 Stück = 15%	Stück
 <b>Askina® Scar Repair</b> Silikon-Pflaster zur Narbenpflege 5 x 7.5 cm / 5 Stück	7084773	ab 2 Stück = 20% ab 4 Stück = 25%	Stück

Von diesen Konditionen können Sie nur profitieren, wenn Sie direkt bei B. Braun Medical AG bestellen. Die Konditionen sind nicht beim Grossisten hinterlegt. \*Ex-Factory per Grossist exkl. MwSt. und indiv. (Logistik-) Kosten. Auslieferung und Verrechnung der Ware erfolgt über Ihren Grossisten. Es gelten die AGBs Ihres Grossisten.

## Grossist

- Amedis       Galexis  
 PharmaFocus       Unione      \_\_\_\_\_  
 Voigt      Kunden-Nr. Grossist

## Bestellung

Fax: 0800 83 00 32 / E-Mail: sales-opm.bbmch@bbraun.ch

Vorname/Name \_\_\_\_\_

Funktion \_\_\_\_\_

Institution \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Datum / Unterschrift \_\_\_\_\_

## Nächste Ausgabe

erscheint im Frühling 2019

### WUNDREINIGUNG

Erfahren Sie in der nächsten Ausgabe von OTC SPOTLIGHT mehr zum Thema Wundreinigung



ONLINE – [www.bbraun.ch](http://www.bbraun.ch)

Hier erfahren Sie mehr über B. Braun und finden unseren aktuellen Newsletter OTC SPOTLIGHT.