

OTC SPOTLIGHT

B. BRAUN MEDICAL SA | MAI 2016



Saison des vacances – Saison Prontosan®



Engagement total pour le soin des plaies

Éditorial

Chères lectrices, chers lecteurs,

Nous sommes heureux de vous présenter le premier numéro d'OTC SPOTLIGHT, la nouvelle newsletter pour pharmacies de B. Braun Medical SA.

Nous avons pour ambition de vous proposer désormais des informations concises et distrayantes, mais qui restent scientifiquement fondées. Chaque newsletter approfondira un sujet professionnel en vous fournissant des idées très utiles pour conseiller vos clients, mais aussi des trucs et astuces au sujet des produits et de leurs applications possibles. En résumé : il s'agit de vous transmettre des connaissances qui vous fassent progresser et profitent à vos clients.

OTC SPOTLIGHT commence avec le thème des biofilms : Qu'est-ce que les biofilms ? Comment se forment-ils ? Comment peut-on les éliminer ? En complément du thème principal, vous trouverez de petites informations passionnantes ainsi que des offres intéressantes, spécialement dédiées aux pharmacies.

Au passage, vous ferez plus ample connaissance avec notre entreprise. Saviez-vous, par exemple, que cette entreprise familiale est l'un des plus grands fournisseurs médicaux au monde ? Et que B. Braun a fêté ses 175 ans d'existence en 2014 ? B. Braun est présent en Suisse depuis plus de 40 ans, sur aujourd'hui 4 sites différents.

Bonne lecture !

L'équipe de rédaction



Giovanna Gasperetti
Marketing Manager



Patricia Gander
Product Manager OTC

Nos thèmes

BIOFILMS - LES ÉLIMINER EFFICACEMENT

Bien que les biofilms soient omniprésents dans la nature (caries dentaires, tuyaux d'évacuation, etc.), leur importance clinique est souvent sous-estimée en médecine. Nous allons vous faire découvrir le rôle qu'ils jouent dans le cadre des troubles de la cicatrisation.

IDÉAL POUR TOUTES LES TROUSSES À PHARMACIE

Lorsqu'on part en vacances, les petites plaies aiguës sont si vite arrivées ! Pour être prêt à faire face à ce type de situation, il suffit de glisser **Prontosan® acute Gel cicatrisant et Prontosan® Spray pour plaies** dans sa trousse à pharmacie.

HYGIÈNE DES MAINS PENDANT LES VOYAGES

Pour que cette saison ne soit pas marquée par d'autres maladies que la fièvre des voyages, les vacanciers doivent particulièrement veiller à l'hygiène de leurs mains ! **desinfect** sera leur allié idéal.

OFFRE À SAISIR

Profitez dès maintenant de notre promotion d'été exceptionnelle.

Bien retirer les biofilms des plaies chroniques

De plus en plus de patients présentent des plaies chroniques. Si elles tardent à cicatriser, cela peut être dû à la présence d'un biofilm. Selon les dernières études, 90% des plaies chroniques sont couvertes d'un biofilm. Pour que le processus de cicatrisation s'opère rapidement, il est donc essentiel de bien l'éliminer.

QU'EST-CE QUE LES BIOFILMS ?



Pour faire simple, les biofilms sont des communautés bactériennes intégrées dans une épaisse couche de protection visqueuse, composée de sucre, de protéines et de lipides. Typiquement, des biofilms peuvent se former sur les plaies chroniques.

POURQUOI IL VAUT LA PEINE DE RÉAGIR PROMPTEMENT

Des analyses expérimentales en laboratoire ont démontré que les bactéries excrétrices en suspension peuvent se fixer à nouveau en quelques minutes, devenir plus résistantes aux biocides comme les antibiotiques et les antiseptiques après 6 à 12 heures, et construire de nouveaux biofilms mûrs en 24 heures. Ces connaissances permettent de conclure qu'après le retrait du biofilm, on ne dispose que de 24 heures au maximum pour commencer efficacement un traitement antimicrobien avant qu'un nouveau biofilm ne se forme.

SEULE UNE PLAIE PROPRE PEUT GUÉRIR

Le moyen le plus efficace pour nettoyer une plaie chronique est le débridement chirurgical. Il s'agit de sectionner les dépôts et les tissus nécrosés pour les enlever. Cependant, le biofilm protège les bactéries qui y sont incluses. Les substances actives n'ont donc qu'un effet limité voire nul sur les bactéries. Il est donc nécessaire que la solution de nettoyage contienne une substance capable de briser le bouclier de protection du biofilm.

COMBATTRE LES BIOFILMS AVEC DES TENSIO-ACTIFS

Les agents tensio-actifs sont en mesure de rompre les biofilms. Ils favorisent également leur élimination sur le long terme. Pour le rinçage et le nettoyage des plaies présentant des biofilms, les produits à la polihexanide avec agents tensio-actifs, tels que **Prontosan® Solution de rinçage de plaies** de B.Braun, ont fait leurs preuves. L'agent tensio-actif bêtaïne présent dans Prontosan® réduit la tension à la surface de l'eau ce qui a pour effet de rompre le bouclier protecteur formé par le biofilm. En outre, les tensio-actifs possèdent une structure moléculaire spéciale, avec une partie hydrophile (c'est-à-dire qui attire l'eau) et une autre, hydrophobe (qui repousse l'eau). La partie hydrophobe permet aux tensio-actifs de détacher les petites particules solides des surfaces fixes.



COMBATTRE LES BACTÉRIES AVEC LA POLIHEXANIDE

Rien d'étonnant à ce que les produits à base de la polihexanide soient utilisés dans la pratique pour le traitement des plaies : le résultat est un succès et il n'y a quasiment aucune intolérance. À l'heure actuelle, on ne connaît pas de bactérie résistante à la polihexanide, car ce principe actif détruit les parois cellulaires des bactéries sans différenciation. De plus, une étude a vérifié que les solutions de rinçage à la polihexanide accélèrent de manière significative la cicatrisation comparativement aux solutions de Ringer ou solutions salines traditionnelles.



Avant le nettoyage



Après le nettoyage avec Prontosan®

À mettre dans toutes les troussees à pharmacie

PARÉ POUR LES VACANCES

C'est dans l'attente que se savoure le plaisir. Mais avant de partir pour ces vacances tant attendues, il faut d'abord faire les valises et ne pas oublier la trousse à pharmacie. En tant que professionnel, vous êtes tout indiqué pour conseiller au mieux vos clients à ce sujet.



LES PETITES PLAIES GUÉRISSENT VITE

Un moment d'inattention et ça y est : les petites plaies ou les coups de soleil sont si vite arrivés ! L'important est alors de bien nettoyer la plaie pour prévenir une éventuelle infection. C'est là que **Prontosan® Spray pour plaies** entre en action. Il suffit de l'appliquer généreusement sur la plaie. La substance active qu'il contient, la polihexanide, réduit les germes tandis que le tensio-actif bêtaïne élimine les impuretés et nettoie la plaie... sans piquer !



RÉAGIR VITE EN CAS DE PLAIE AIGUË

Pour que la plaie cicatrise bien, il faut la maintenir humide. C'est pourquoi il est recommandé de compléter le traitement en appliquant **Prontosan® acute Gel cicatrisant**. Cet hydrogel crée un milieu humide idéal au niveau de la plaie et accélère ainsi la cicatrisation tout en minimisant la formation de cicatrices. Il contient en outre une substance antimicrobienne qui réduit encore les risques d'infection. De plus, son effet froid soulage rapidement la douleur, surtout en cas de coup de soleil. Par conséquent, recommandez Prontosan® acute Gel cicatrisant : **le geste efficace pour soigner rapidement les petites coupures, écorchures et brûlures légères (des 1^{er} et 2^e degrés).**



POUR QUE LA FIÈVRE DES VOYAGES RESTE LA SEULE MALADIE DES VACANCES

Lorsqu'on part en vacances, il faudrait penser à se laver les mains plusieurs fois par jour, notamment après avoir serré la main de quelqu'un ou être allé aux toilettes. Malheureusement, on n'a pas toujours de l'eau et du savon à portée de main. **desinfect**

permet de se « laver les mains » à tout moment. Efficace, pratique et sûre, la lingette desinfect détruit 99,99 % des bactéries, champignons et virus indésirables. Contrairement aux lingettes rafraîchissantes, elle laisse les mains vraiment propres. Pour se protéger des éventuelles infections, tout le monde devrait avoir **desinfect** dans sa trousse à pharmacie.

desinfect est également disponible sous la forme d'un gel pratique qui ne laisse aucun résidu sur les mains.



Le saviez-vous ?

90% DES PLAIES CHRONIQUES PRÉSENTENT UN BIOFILM

Et comme celui-ci entrave nettement la cicatrisation, il est très important de nettoyer la plaie et d'éliminer le biofilm pour que le processus de guérison se déroule bien. Prontosan® élimine efficacement les résidus tissulaires, les croûtes et les germes présents dans les plaies et détruit le biofilm. Il prévient en outre la prolifération bactérienne dans la plaie et offre ainsi une alternative efficace aux antibiotiques et aux pansements antimicrobiens.

Prontosan® – stérile versus non stérile

Prontosan® acute Gel cicatrisant et Spray pour plaies sont parfaitement adaptés à l'automédication tandis que le Prontosan® stérile est utilisé dans le traitement professionnel des plaies.

STÉRILE : POUR LES PLAIES CHRONIQUES



- Pour le traitement professionnel des plaies chroniques
- Stérile
- Se conserve jusqu'à 8 semaines après ouverture
- Contient de la polihexanide et le tensio-actif bêtaïne



NON STÉRILE : POUR LES PLAIES AIGUËS

- Pour l'automédication
- Non stérile
- Se conserve jusqu'à 36 semaines (date d'expiration)
- Contient de la polihexanide et le tensio-actif bêtaïne



Promotion d'été : Prontosan® & desinfect

Offre valable du 22 mai au 11 juin 2016

Article	Pharma-code	Réduction sur le prix de base*	Commande
 Prontosan® Spray pour plaies 75 ml	5439261	À partir de 8 unités = 20% À partir de 12 unités = 25% À partir de 20 unités = 30%	Unité(s)
 Prontosan® acute Gel cicatrisant 30 g	5439278	À partir de 15 unités = 20% À partir de 20 unités = 25% À partir de 35 unités = 30%	Unité(s)
 Présentoir de comptoir desinfect avec 6 boîtes de 14 lingettes	3947964	6 boîtes = 20%	Présentoir de comptoir

Ces conditions sont disponibles chez les grossistes. *Prix de base par grossiste hors TVA et frais de logistique individuels. Les articles vous seront livrés et facturés par votre grossiste. Les CGV de votre grossiste s'appliquent.

Grossiste

- Amedis Galexis _____
 PharmaFocus Unione N° de client grossiste
 Voigt

Commande

Fax : 0800 83 00 32 / courriel : sales-opm.bbmch@bbraun.ch

Prénom/nom
Fonction
Établissement
Adresse
CP/ville
Courriel
Date/signature

Prochain numéro

à paraître à l'automne 2016

TRAITEMENTS DES PLAIES

Dans notre prochain numéro de « OTC Spotlight », apprenez-en plus sur les plaies chroniques et sur leur traitement



EN LIGNE – www.bbraun.ch

Pour en savoir plus sur B. Braun
et découvrir la newsletter
« OTC Spotlight » du moment