

OTC SPOTLIGHT

B. BRAUN MEDICAL SA | JUIN 2017



Éditorial

Chères lectrices, chers lecteurs,

Nous sommes heureux de vous présenter le numéro de mai 2017 d'OTC SPOTLIGHT, la newsletter pour pharmacies de B. Braun Medical SA.

Dans la dernière newsletter, nous avons traité du syndrome du pied diabétique (SPD) et vous avons présenté les traitements et mesures recommandés pour le traitement des plaies. Suite à cela, nous abordons dans ce numéro le traitement à l'argent des plaies infectées. Vous découvrirez comment les préparations pour les plaies contenant de l'argent agissent et sont utilisées.

Vous trouverez également des informations intéressantes sur les domaines thérapeutiques tels que le diabète, désinfection des surfaces et le traitement par perfusion, ainsi qu'une offre attrayante spéciale pour les pharmacies.

Les recommandations supplémentaires sont de plus en plus importantes et très attrayantes. Les aiguilles pour stylo **Omnican® fine Set** vous offrent cette possibilité. Demandez à vos clients diabétiques quels stylos à insuline ils utilisent, comment se passe l'utilisation et à quel point ils sont satisfaits des actuelles aiguilles pour stylo. Vous trouverez plus d'informations sur les avantages des aiguilles deux pages plus loin.

Bonne lecture !

L'équipe de rédaction


Giovanna Gasperetti
Marketing Manager


Patricia Gander
Product Manager OTC

Nos thèmes

TRAITEMENT À L'ARGENT

La **pâte Askina® Calgitrol®** permet de réduire de manière ciblée la charge bactérienne dans les plaies infectées. Il est ainsi possible d'éviter efficacement la propagation d'une infection et de relancer ou de favoriser le processus de guérison de la plaie.

PRISE EN CHARGE DU DIABÈTE – AIGUILLES POUR STYLO

Les aiguilles pour stylo **Omnican® fine Set** offrent aux patients diabétiques une manipulation simple, sûre et une pénétration peu douloureuse lors du traitement par insuline avec des systèmes d'injection par stylo.

DÉSINFECTION DES SURFACES

Meliseptol® Wipes sensitive 100/XL en flowpack pratique vous aide à effectuer la désinfection et le nettoyage des surfaces de routine, mais aussi pour le matériel sensible, de manière simple et efficace.

OFFRE À SAISIR

Profitez de notre offre attrayante sur **Omnican® fine Set** et **Meliseptol® Wipes sensitive 100/XL**.

Thérapie à l'argent: traitement des plaies infectées

CONTRÔLE IMPORTANT DES INFLAMMATIONS ET INFECTIONS

L'inflammation de la plaie indique que les défenses du corps ont été mobilisées. On parle d'une infection locale uniquement lorsque le système immunitaire du corps ne parvient plus à maîtriser les microorganismes. Les bactéries sont le groupe d'agents le plus fréquent.

En cas de suspicion concrète d'une infection locale sérieuse, il faut immédiatement empêcher une propagation systémique ou la formation d'une plaie chronique.

RÉDUCTION CIBLÉE DE LA CHARGE BACTÉRIENNE AVEC DE L'ARGENT

Les pansements et préparations pour plaies contenant de l'argent permettent de réduire la charge bactérienne d'une plaie infectée ou à risque. Il est ainsi possible d'éviter efficacement la propagation d'une infection et de relancer ou de favoriser le processus de guérison.¹⁾ La guérison complète de la plaie n'est pas l'objectif d'une thérapie à l'argent. Conformément aux directives internationales, les pansements contenant de l'argent ne doivent être utilisés que deux semaines initialement.

Le principe d'action des ions argent

Sous sa forme métallique élémentaire, par exemple comme bijou, l'argent ne peut pas réagir. Mais l'argent s'ionise au contact de l'air et encore davantage en milieu aqueux, c'est-à-dire quand il est par ex. en contact avec l'exsudat d'une plaie. Cela génère des ions d'argent chargés positivement (Ag+), qui sont hautement réactifs et ont un effet bactéricide. Ils attaquent les cellules bactériennes à plusieurs endroits et tuent ainsi les germes de manière fiable.

EFFICACITÉ RAPIDE DE LA PÂTE ASKINA® CALGITROL®



Une étude démontre le potentiel bactérien de la **pâte Askina® Calgitrol®** qui contient de l'argent. En effet, après une incubation de seulement 12 heures, une mortalité élevée des germes a été observée et toutes les cultures ont été tuées à presque 100 % après 24 heures.²⁾

L'applicateur long permet une excellente application de la matrice argent-alginate de la **pâte Askina® Calgitrol®**, même dans les plaies profondes. La pâte s'y dépose proprement sur le lit de la plaie, où elle développe efficacement son effet antimicrobien en libérant continuellement des ions d'argent sur une période allant jusqu'à 7 jours.



La **pâte Askina® Calgitrol®** est prête à l'emploi, « ready to use » et n'a pas besoin d'être humidifiée. Les ions d'argent bactéricides agissent dès le premier contact avec le lit de la plaie.

La **pâte Askina® Calgitrol®** doit toujours avoir un revêtement secondaire. **Askina® Foam** par ex. convient très bien, car il contribue également à soulager la pression sur la plaie infectée.



RISQUE RÉDUIT DE FORMATION DE RÉSISTANCES

Contrairement aux antibiotiques, les préparations et pansements contenant de l'argent ont une action non spécifique sur les microbes. Il y a donc un faible risque de formation de résistances. Aucune résistance à l'argent n'est connue jusqu'à présent.

REMARQUES

Pâte Askina® Calgitrol®

- Contient de l'argent sous forme ionisée et est prête à l'emploi
- Elle peut être appliquée directement sur le lit de la plaie grâce au long applicateur
- Elle a un effet de réduction des germes efficace dès le début

Avec la **pâte Askina® Calgitrol®**, vous pouvez réduire de manière ciblée la charge bactérienne dans les plaies infectées ou les plaies à haut risque d'infection.



Vous trouverez la vidéo de l'application de la pâte Askina® Calgitrol sur www.bbraun.ch.

Sources :

1) Consensus international, utilisation adéquate des pansements à l'argent sur les plaies

2) Dr Anthony Hayes et Marc Isaacs, département de microscopie confocale et bio-imagerie, Cardiff School of Biosciences, Cardiff, Royaume-Uni. 2007

Diversité des produits de B. Braun

PRISE EN CHARGE DU DIABÈTE – AIGUILLES POUR STYLO PEU DOULOUREUSES

Lors du traitement par insuline avec des stylos à insuline, il est recommandé d'utiliser des aiguilles pour stylo garantissant une injection peu douloureuse. Les **aiguilles à stylo Omnican® fine Set** avec boîte de mise au rebut sont simples, pratiques, sûres et s'adaptent à tous les systèmes d'injection à stylo courants.



Sans douleur – les aiguilles pour stylo Omnican® fine Set existent en cinq longueurs différentes (4, 6, 8, 10 ou 12 mm). Ces petites merveilles de haute technologie assurent une injection pratiquement sans douleur. Grâce au fin poli à trois facettes et au revêtement en silicone, l'aiguille pénètre dans la peau en douceur et sans douleur. La technologie à paroi fine de l'aiguille a un grand diamètre intérieur et garantit ainsi un flux d'insuline optimal même pour les aiguilles très fines en assurant une injection en douceur.



Mise au rebut sûre – la boîte Omnican® offre à vos clients un grand confort pour mettre au rebut les aiguilles pour stylo utilisées sans toucher l'aiguille. Insérer simplement l'aiguille utilisée dans le dispositif intégré, tourner, jeter, terminé !

DÉSINFECTION DES SURFACES AVEC LES LINGETTES PRATIQUES

Tout contact implique un échange : ainsi, nous recevons des germes présents sur des objets et d'autres personnes et nous transmettons aussi des germes. Les germes présents sur les objets du quotidien tels que les téléphones ou les poignées de porte sont déposés sur les surfaces et transmis par contact direct.

Le chemin jusqu'au patient est court. C'est pourquoi une désinfection et un nettoyage des surfaces irréprochables du point de vue hygiénique, y compris en pharmacie, assurent la propreté et la prévention contre les infections, pour protéger les clients et le personnel.

Meliseptol® Wipes sensitive 100/XL en flowpack pratique vous aide à effectuer la désinfection et le nettoyage de surface de routine, mais aussi pour le matériel sensible, de manière simple et efficace !



TRAITEMENT PAR PERFUSION – MANIPULATION SÛRE ET SIMPLE

Ecoflac® plus est un contenant semi-rigide pour le traitement par perfusion. Il dispose de deux ports identiques pouvant être utilisés à la fois pour l'administration de médicaments et pour l'application. Il est donc possible d'administrer des médicaments même lorsque **Ecoflac® plus** est déjà connecté au kit de perfusion. Veuillez vous assurer que la surface de l'élément d'étanchéité sous le rabat de protection est exempte de germes. Aucune désinfection n'est requise pour la première utilisation, juste après avoir retiré le rabat de protection.



Pour une insertion optimale de l'aiguille ou du kit de perfusion, il est recommandé de stabiliser le goulot d'étranglement avec l'autre main.

Le saviez-vous ?

desinfect – LAVEZ-VOUS LES MAINS OÙ VOUS VOULEZ

Saviez-vous que 80 % des infections sont transmises par contact manuel ? Pour éviter cela, vous devriez vous laver ou désinfecter plus souvent les mains. **En particulier en période de grippe, dans les situations du quotidien ou en voyage.** Après être allé aux toilettes, après avoir touché des objets que beaucoup d'autres personnes ont utilisé, (par ex. des poignées de porte, poignées dans les TP, écouteurs de téléphone, claviers, appareils de sport, caddies, etc.), il est recommandé de bien se désinfecter les mains.

Lavez-vous les mains où vous voulez.



desinfect tue 99,99 % des bactéries, champignons et virus indésirables et rend les mains vraiment propres en 15 secondes.




Grâce aux substances de soin qu'il contient, les mains sont soignées et protégées contre le dessèchement.



Les **serviettes de nettoyage desinfect** et le **gel desinfect** sont pratiques en déplacement et trouvent leur place partout.

Offre : Omnican® fine Set et Meliseptol® Wipes sensitive 100 / XL

Valable jusqu'au 30 juin 2017

Article	Pharmacode	Promotion sur prix de base*	Commande
 Meliseptol® Wipes sensitive 100	6810042	à partir de 4 unités = 20 % à partir de 6 unités = 25 %	Unités
 Meliseptol® Wipes sensitive XL	6810013	à partir de 4 unités = 20 % à partir de 6 unités = 25 %	Unités
 Omnican® fine Set Aiguilles pour stylo 100 unités/boîte de mise au rebut	4 mm 6185176 6 mm 4358767 8 mm 4358750 10 mm 4358744 12 mm 4358738	assortiment à partir de 4 unités = 20 % à partir de 6 unités = 25 %	Unités Unités Unités Unités Unités

Vous pouvez profiter de ces conditions uniquement si vous commandez directement auprès de B. Braun Medical SA. Les conditions ne sont pas disponibles chez les grossistes. *Prix de base par grossiste hors TVA et frais de logistique individuels. Les articles vous seront livrés et facturés par votre grossiste. Les conditions générales de vente du grossiste sont applicables.

Grossiste

- Amedis Galexis
 PharmaFocus Unione N° de client grossiste
 Voigt

Commande

Fax : 0800 83 00 32 / E-mail : sales-opm.bbmch@bbraun.ch

Prénom / nom

Fonction

Établissement

Adresse

NPA / localité

E-mail

Date / signature

Prochain numéro

à paraître en été 2017

TRAITEMENTS DES PLAIES

Dans notre prochain numéro de OTC SPOTLIGHT, apprenez-en plus sur le thème du changement de pansement hygiénique.



EN LIGNE – www.bbraun.ch

Pour en savoir plus sur B. Braun et découvrir la newsletter OTC SPOTLIGHT du moment