



PRAKTISCH UND SPARSAM



B. Braun Wipes / B. Braun Wipes mini

Nachfüllbare Vliestuchspender

B. Braun Wipes / B. Braun Wipes mini

Sparsamer Verbrauch und einfach in der Anwendung

EIGENSCHAFTEN

- Bequeme Entnahme der einzeln abreissbaren B. Braun Wipes
- Gebrauchsfertige Lösung ist 4 Wochen anwendbar
- Wiederverschliessbarer Deckel schützt vor Kontamination und Verdunsten der Lösung
- Sparsam im Verbrauch von Tüchern und Anwendungslösung
- Saugfähige und fusselarme Tücher, die den Desinfektionswirkstoff an die zu desinfizierende Fläche abgeben
- Mit B. Braun Flächendesinfektionsmitteln geprüft
- B. Braun Wipes:
Zum Befüllen mit ca. 2.5 l Desinfektionsmittellösung
- B. Braun Wipes mini:
Zum Befüllen mit ca. 500 ml Desinfektionsmittellösung

WEITERE HINWEISE

Wenn alle Vliestücher aufgebraucht sind oder das Haltbarkeitsdatum der gebrauchsfertigen Lösung erreicht ist, kann das Spendersystem neu befüllt werden. Vorher alle Oberflächen des B. Braun Wipes Spendersystems gründlich mit einem in Desinfektionsmittellösung getränkten Lappen reinigen, desinfizieren und trocknen lassen. Einwirkzeit der Desinfektionsmittellösung beachten.

Artikel	Art.-Nr.	Pharmacode
Spendersystem B. Braun Wipes	19873	6716834
Vliesrolle mit 100 Tüchern à 19 x 36 cm	19164	3781601
Vliesrolle ECO mit 120 Tüchern à 19 x 36 cm	19726	6700939
Spendersystem B. Braun Wipes mini	19874	6716840
Vliesrolle mini mit 25 Tüchern à 24 x 28 cm	19183	3781593
Vliesrolle mini ECO mit 60 Tüchern à 15 x 20 cm	19725	6700945

GEPRÜFTE B. BRAUN DESINFIZIERUNGSMITTEL

Die in der Tabelle gelisteten B. Braun Produkte sind mit dem B. Braun Wipes Spendersystem geprüft. B. Braun Wipes Vliestücher lagern den Desinfektionswirkstoff nicht an, sondern geben ihn an die zu desinfizierende Fläche ab.

B. Braun Produkt	Mindestkonz.	EZ
Hexaquant® plus	0.5%	60 Min.
Hexaquant® plus lemon fresh	0.5%	60 Min.
Meliseptol® rapid	konz.	1 Min.
Meliseptol® Foam pure	konz.	1 Min.

Das eingefüllte Desinfektions- und/oder Reinigungsmittel muss mit dem B. Braun Wipes Spendersystem sowie den B. Braun Wipes Vliesrollen kompatibel sein. Lassen Sie sich die Kompatibilität vom Hersteller der Desinfektions- und Reinigungsmittel bescheinigen.



Praktisch und sparsam