

# Helimatic® Disinfectant

Désinfectant liquide pour endoscopes souples et matériaux thermolabiles

Désinfection – chimio-thermique

## Helimatic® Disinfectant ... pour la préparation chimio-thermique

Helimatic® Disinfectant est spécialement destiné au procédé de préparation chimio-thermique automatique, qui intervient après l'étape de nettoyage.

L'action bactéricide, tuberculocide, fongicide et virucide<sup>1)</sup> complète, combinée à un mode opératoire non moussant et particulièrement bien toléré par les matériaux, garantit la désinfection dans la plage de températures indiquée.

### Propriétés

Helimatic® Disinfectant

- Pour la préparation chimiothermique
- Action bactéricide, tuberculocide, fongicide et virucide<sup>1)</sup>
- Ne mousse pas, sans tensioactifs
- Très bien toléré par les matériaux

### Dosage et mode d'emploi

Exemple de procédure pour appareils automatiques R/D. Hamo LS-950-FC/LC.

(Prof. H.-P. Werner, HygCen, Schwerin) :

- Prénettoyage à l'eau froide, durée : 2 min.
- Nettoyage avec Helimatic® Cleaner enzymatic, concentration 0.5 %, température 38 °C, durée : 3 min.
- Désinfection avec Helimatic® Disinfectant. Concentration 1.0 %, température 55 °C, temps de maintien : 5 min.
- Rinçage final à l'eau déminéralisée stérilisée
- Séchage

Procédures pour autres appareils automatiques R/D sur demande.

### Spectre d'action/activité microbiologique d'Helimatic® Disinfectant (in vitro)

Organisme expérimental	Conc.	DA	Temp.
S. aureus	0.25 %	5 min.	45 °C
P. aeruginosa	1.0 %	5 min.	35 °C
M. terrea	1.0 %	5 min.	45 °C
E. hirae	1.0 %	5 min.	45 °C
C. albicans	0.5 %	5 min.	45 °C
Polio	1.0 %	5 min.	50 °C
Adéno	1.0 %	5 min.	45 °C

<sup>1)</sup> selon les recommandations de l'Institut Robert Koch, Bundesgesundheitsblatt 01-2004

Article	N° art.
Bidon 5 litres	18562
Bidon 25 litres	18789



Action complète

### Helimatic® Disinfectant

Composition : 100 g de solution contiennent : 20.0 g glutaraldéhyde, sels des acides organiques, solvants, anti-corrosifs, additifs.

Indications selon le règlement (CE) n°648/2004 relatif aux détergents : < 5 % phosphonate

Indications selon l'ordonnance sur les substances dangereuses : contient du glutaral. Nocif par inhalation et par ingestion. Provoque des brûlures. Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau.

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et des lunettes / un masque de protection.

En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin. Conserver hors de la portée des enfants.