



EFFICACE CONTRE
LES NOROVIRUS
DANS 1 MINUTE



Meliseptol[®] HBV lingettes

Pratiques et rapides

Meliseptol® HBV lingettes

VUE D'ENSEMBLE

- Désinfection pratique par essuyage – rapide et active en 1 min.*
- Sans aldéhydes
- Économique – avec recharge à faible coût
- Listage : Meliseptol® rapid est certifié DGHM¹⁾/VAH²⁾ et figure sur la liste des virucides IHO³⁾

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Essuyer la surface à traiter en veillant à l'imprégner entièrement de solution active et laisser agir 1 minute. Ne pas frotter les surfaces pour les sécher. Contrôler avant la désinfection la résistance envers la solution active des matériaux sensibles à l'alcool (tels que le plexiglas). Ne pas utiliser sur des surfaces chaudes ou des appareils électriques sous tension.

LINGETTES DÉSINFECTANTES – RAPIDES ET ÉCONOMIQUES

Remplir la boîte à lingettes Meliseptol® HBV vide avec la recharge en plastique souple. Ceci permet de réaliser des économies tout en contribuant à la réduction des déchets. Les lingettes Meliseptol® HBV sont sans aldéhydes et sans alkylamines, et présentent un parfum frais et agréable.

SPECTRE D'ACTION / DURÉES D'ACTION (DA)

| Domaine d'utilisation | DA |
|--|---------|
| Désinfection des surfaces pour la prévention des infections hospitalières et la désinfection routinière (selon DGHM ¹⁾ /VAH ²⁾) | 1 min.* |
| Action virucide limitée (y compris VHB/VHC/VIH) ⁴⁾ | 1 min. |
| Virucide ⁴⁾ | 10 min. |
| Rotavirus | 1 min. |
| Adénovirus | 1 min. |
| Virus de la vaccine | 30 sek. |
| Poliovirus | 10 min. |
| Polyomavirus | 5 min. |
| Norovirus** | 1 min. |

* La valeur de listage la plus courte possible est de 5 min. pour VAH

** Modèle NVM

| Article | N° art. | Pharmacode |
|-------------------------------------|---------|------------|
| Distributeur pour 100 lingettes | 18706 | 2417951 |
| Sachet de recharge de 100 lingettes | 18707 | 2417968 |

Données physico-chimiques

Aspect : lingettes blanches | Odeur : alcoolisée | Densité : 0.91 g/ml à 20 °C
Point d'inflammation : + 31 °C

Meliseptol® HBV lingettes

100 g de solution contiennent : 50.0 g de 1-Propanol, 0.075 g de chlorure de didécylidiméthylammonium, parfum, additifs. Indications selon le règlement (CE) n°648/2004 relatif aux détergents : < 5% de tensioactifs non-ioniques, parfum

Indications selon l'ordonnance sur les substances dangereuses : inflammable. Ne pas vaporiser sur une flamme nue. Conserver le récipient bien fermé. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. Ne pas fumer ! Risque de lésions oculaires graves (en cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à grande eau). Conserver hors de la portée des enfants. Point d'inflammation 31 °C selon DIN 51755. Débit max. 50 ml/m².



Efficace contre
les norovirus

Mise en garde

Utiliser les désinfectants en toute sécurité. Toujours lire l'étiquetage et les informations sur le produit avant toute utilisation.

1) DGHM = Société allemande de l'hygiène et de la microbiologie (Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie)

2) VAH = Association pour l'hygiène appliquée (Verband für Angewandte Hygiene)

3) www.iho-viruzidie-liste.de

4) selon les recommandations de l'Institut Robert Koch, Bundesgesundheitsblatt 01-2004