



Nettoyer les mains avec un produit de désinfection des mains à base d'alcool ou par un lavage à l'eau et au savon. Enfiler les gants.

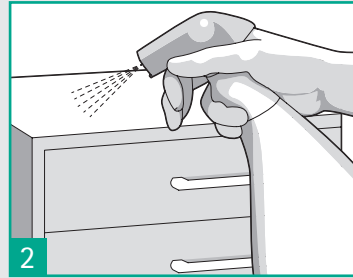

Gicler le produit de désinfection (Meliseptol® Foam pure p. ex.) sur les surfaces à nettoyer et à désinfecter.

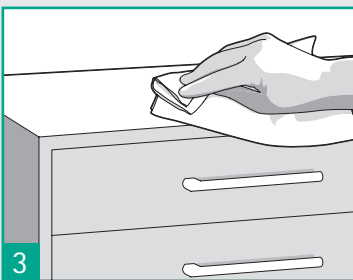

En cas de salissures visibles, le processus devrait être fait en deux étapes :

- a) Enlevez d'abord la saleté avec une lingette en non tissé à usage unique trempée dans un produit de désinfection (Meliseptol® Foam pure p. ex.).
- b) Ensuite finir la désinfection avec une autre lingette trempée (Meliseptol® Foam pure p. ex.).



Ôter les gants. Nettoyer les mains pour terminer avec un produit de désinfection des mains à base d'alcool ou par un lavage à l'eau et au savon.

Les surfaces visiblement propres seront directement désinfectées. Il faut prendre garde que tous les secteurs de surfaces soient humidifiés avec la solution de désinfection. Les surfaces doivent être complètement sèches avant de pouvoir être utilisées à nouveau.

DÉSINFECTION DE SURFACE AGISSANT RAPIDEMENT

PETITES SURFACES