



Die Hände mit einem Hände-Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis oder durch Waschen mit Wasser und Seife reinigen. Handschuhe anziehen.

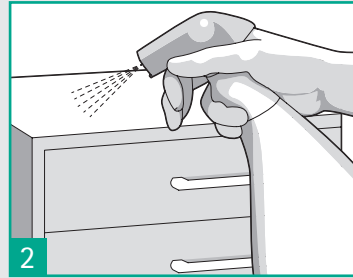

Desinfektionsmittel (z.B. Meliseptol® Foam pure) auf die zu reinigenden und zu desinfizierenden Flächen sprühen.

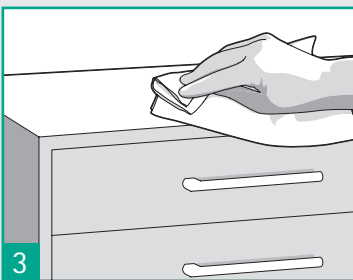

Bei sichtbarer Verschmutzung sollte das Verfahren in zwei Schritten durchgeführt werden:

- a) Zunächst die Verschmutzung mit einem in Desinfektionsmittel getränkten Einmal-Vliestuch (z. B. Meliseptol® Foam pure) entfernen.
- b) Anschliessend erfolgt die Desinfektion mit einem weiteren getränkten Vliestuch (z.B. Meliseptol® Foam pure).



Handschuhe ausziehen. Anschliessend die Hände mit einem Hände-Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis oder durch Waschen mit Wasser und Seife reinigen.

Sichtbar saubere Oberflächen werden in einem Schritt desinfiziert. Es ist darauf zu achten, dass alle Oberflächenbereiche mit der Desinfektionslösung benetzt werden. Die Oberflächen müssen vollständig trocknen, bevor sie wieder verwendet werden dürfen.

RASCH WIRKENDE OBERFLÄCHEN-DESINFEKTION

KLEINER FLÄCHEN