



Lavare le mani con un apposito disinfettante a base alcolica oppure con acqua e sapone. Indossare i guanti.

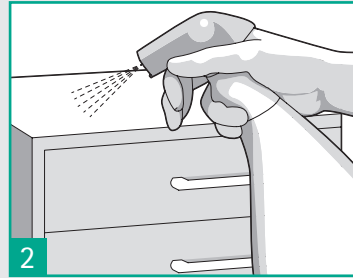

Spruzzare il disinfettante (ad es. Meliseptol® Foam pure) sulle superfici da pulire e da disinfettare.

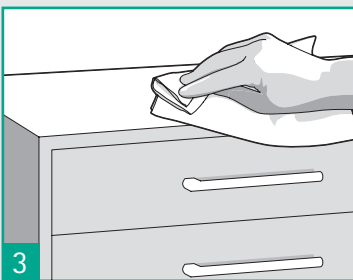

Se è presente dello sporco visibile il procedimento deve essere eseguito in due passaggi:

- a) Per prima cosa rimuovere lo sporco con una salviettina monouso imbevuta di disinfettante (ad es. Meliseptol® Foam pure).
- b) Quindi procedere alla disinfezione con un'altra salviettina imbevuta (ad es. Meliseptol® Foam pure).



Togliere i guanti. Infine lavarsi le mani con un apposito disinfettante a base alcolica oppure con acqua e sapone.

Le superfici visibilmente pulite possono essere disinfettate in un unico passaggio. Accertarsi che tutte le zone superficiali siano inumidite con la soluzione disinfettante. Le superfici devono essere perfettamente asciutte prima di poter essere riutilizzate.

# DISINFEZIONE DI SUPERFICI AD AZIONE RAPIDA

PICCOLE SUPERFICI