



RUBAN DE MESURE
POUR ÉTUI PÉNIEN et
BRÈVE EXPLICATION
INCLUS

Urimed[®] Vision

ÉTUI PÉNIEN AUTOADHÉRENT POUR PLUS DE SÉCURITÉ

Urimed® Vision




TRÈS AGRÉABLE POUR LA PEAU – AVEC PROTECTION ANTI-PLIS – LONGUE DURÉE DE PORT

L'étui pénien Urimed® Vision présente pour l'homme une solution judicieuse par rapport aux cathéters à demeure ou aux produits absorbants. Alors que l'utilisation avec les cathéters à demeure présente un danger d'infection urinaire, les produits absorbants ont le désavantage de produire des odeurs et des irritations cutanées. Avec Urimed® Vision la sphère intime est préservée par un traitement individuel simple et discret.



CONSEILS D'UTILISATION

- La peau du pénis doit être sèche et exempte de gras, afin que l'étui pénien puisse adhérer suffisamment
- Les poils pubiens doivent être raccourcis ou enlevés afin que le secteur adhésif ne s'y colle pas
- L'ouverture du canal urinaire doit avoir une bonne distance de sécurité avec l'écoulement de l'étui pénien, afin de permettre l'évacuation de l'urine dans la poche urinaire
- L'étui pénien devrait être changé toutes les 24 heures pour des raisons d'hygiène

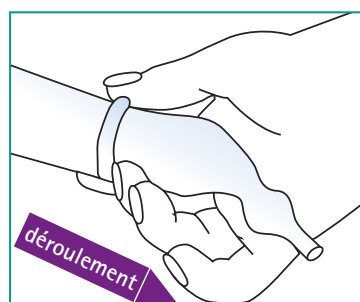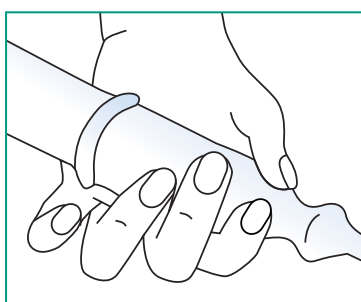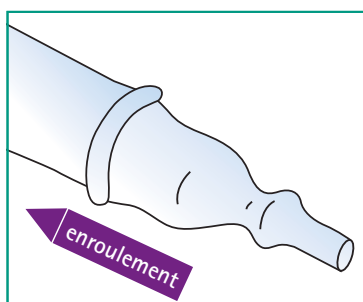


VOS AVANTAGES

- 100% en silicone **empêche les irritations cutanées** dues aux allergies au latex
- Une colle agréable à la peau et hydrophobe privilégie **une utilisation à plus longue durée**
- Protection anti-plis à la tige **empêche l'engorgement de l'urine**
- Matière transparente pour un **contrôle optimal de la peau**
- **5 tailles différentes** permettent une tenue optimale ainsi qu'une utilisation sûre
- La version « Short » avec une partie adhésive modifiée **spécialement pour les hommes avec un pénis rétracté**


Ruban de mesure pour l'étui pénien

BRÈVE EXPLICATION


Prenez le ruban de mesure. Ce ruban de mesure sert à déterminer la taille exacte de l'étui pénien nécessaire. Sachez que plus l'étui pénien est adapté, plus sûre sera le lien adhésif.

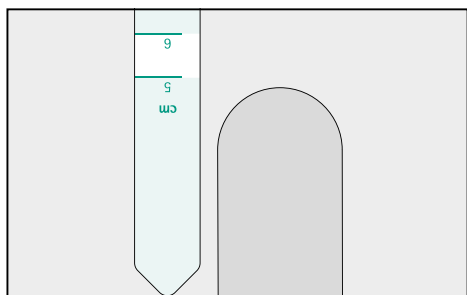

Veillez mesurer d'abord la longueur du pénis (cf. fig.)

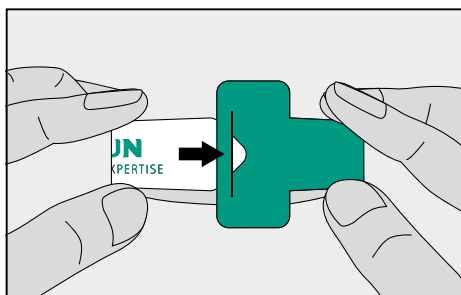



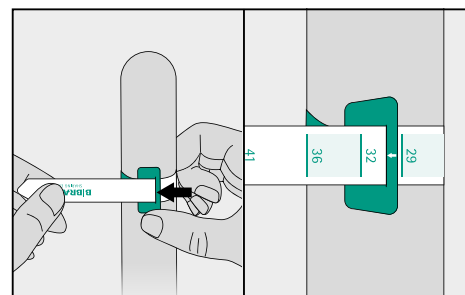






Pour estimer le diamètre, veuillez utiliser l'échelle de mesure sur le devant. Faites glisser la pointe du ruban de mesure à travers la fente à l'arrière.



Placez la bande de mensuration par-dessus le pénis et tirez-le milieu de la tige du pénis. Veillez à ce que le ruban n'étrangle pas le pénis. La pointe de la flèche indique la taille correcte de l'étui pénien (32 mm p.ex.)

Survol des produits

TRAITEMENT DE L'INCONTINENCE – UNE SENSATION SÛRE

	Article	Unité	LiMA	N° art.	Pharmacode
	Urined® Vision Standard – autoadhésif				
	Ø 25 mm	30	15.16.02.00.1	IH2525A	3013807
	Ø 29 mm	30	15.16.02.00.1	IH2529A	3013813
	Ø 32 mm	30	15.16.02.00.1	IH2532A	3013836
	Ø 36 mm	30	15.16.02.00.1	IH2536A	3013842
	Ø 41 mm	30	15.16.02.00.1	IH2541A	3013859
	Urined® Vision Short – autoadhésif				
	Ø 25 mm	30	15.16.02.00.1	IH4525A	3013865
	Ø 29 mm	30	15.16.02.00.1	IH4529A	3013871
	Ø 32 mm	30	15.16.02.00.1	IH4532A	3013888
	Ø 36 mm	30	15.16.02.00.1	IH4536A	3013894
	Ø 41 mm	30	15.16.02.00.1	IH4541A	3013902
	Urined® B'Bags				
	2000 ml, conditionnement individuel stérile	100	15.15.02.00.1	29400	6322118
	2000 ml, non stérile, carton d'origine	30	15.15.01.00.1	29416	6380972
	2000 ml, avec robinet de vidange et système anti-reflux, non stérile	30	15.15.03.00.1	29451	6380989
	2000 ml, avec robinet de vidange et système anti-reflux, conditionnement individuel stérile	100	15.15.04.00.1	29440	6322176
	Medicare® poche de recueil				
	2000 ml, avec robinet de vidange coulissant, système anti-reflux, conditionnement individuel stérile	10	15.15.04.00.1	28115	6380995
	Urined® Bag Plus				
	500 ml	10	15.14.03.00.1	28501A	6322124
	Urined® Tribag Plus avec tubulure de 20 cm (poche de jambe)				
	500 ml stérile avec soupape d'évacuation	10	15.14.04.00.1	28203	5015874
	Urined® Strap				
	Bande Velcro pour la fixation de poche	2	15.14.99.02.1	68551	5433293
	Urined® Fix				
	Taille S, jaune	2	15.14.99.01.1	68520R	6133239
	Taille M, bleu	2	15.14.99.01.1	68530R	6133245
	Taille L, marron	2	15.14.99.01.1	68540R	6133251
	Urined® Klett				
	Petit taille 2	10		29260	7848607
	Grand taille 3	10		29261	7848608