



INKL. MASSBAND
KONDOM-URINALE
& KURZANLEITUNG

Urimed[®] Vision

SELBSTHAFTENDE KONDOM-URINALE FÜR MEHR SICHERHEIT

Urimed® Vision




SEHR HAUTFREUNDLICH – MIT KNICKSCHUTZ – LANGE TRAGDAUER

Urimed® Vision Kondom-Urinale stellen beim Mann eine sinnvolle Alternative zu Dauerkathetern oder aufsaugenden Produkten dar. Während bei der Versorgung mit Dauerkathetern die Gefahr von Harnwegsinfekten besteht, werden bei den aufsaugenden Produkten Undichtigkeiten, auftretende Gerüche und Hautirritationen als Nachteile empfunden. Mit Urimed® Vision wird die Intimsphäre durch eine einfache und diskrete Selbstversorgung sicher gestellt.



TIPPS ZUR ANWENDUNG

- Die Penishaut sollte trocken und fettfrei sein, damit das Kondom-Urinal ausreichend haften kann
- Damit der Haftbereich nicht mit der Schambehaarung verklebt, sollte das Schamhaar gekürzt oder entfernt werden
- Die Harnröhrenöffnung muss einen sicheren Abstand zum Ablauf des Kondom-Urinals haben, damit ein Abfließen des Urins in die Beutelversorgung gewährleistet ist
- Kondom-Urinale sollten aus hygienischen Gründen alle 24 Stunden gewechselt werden

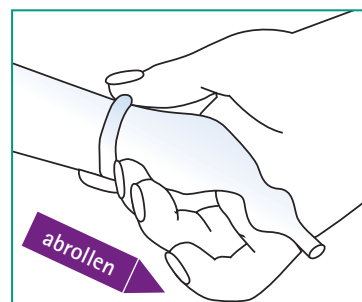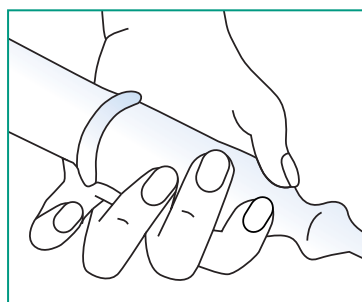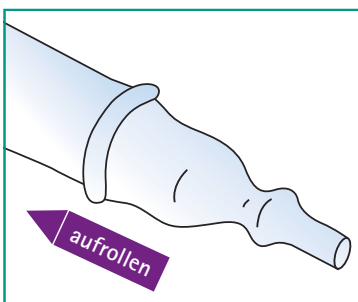



IHRE VORTEILE

- 100% Silikon **verhindert Hautreizungen** durch Latexallergien
 - Hautfreundlicher und flüssigkeitsabweisender Kleber sorgt für eine **lange Tragdauer**
 - Knickschutz am Schaft **verhindert den Urin-Stau**
 - Transparentes Material für eine **optimale Kontrolle der Haut**
 - **5 verschiedene Größen** gewährleisten optimalen Halt und eine sichere Anwendung
 - Version «Short» mit modifiziertem Klebeansatz **speziell für Männer mit retrahiertem Penis**
-


Massband Kondom-Urinale

KURZANLEITUNG


Entnehmen Sie das Massband. Dieses Massband dient der Ermittlung der exakten Grösse des benötigten Kondom-Urinals. Bitte beachten Sie, je genauer ein Kondom-Urinal angepasst wird, desto sicherer ist die Klebeverbindung.

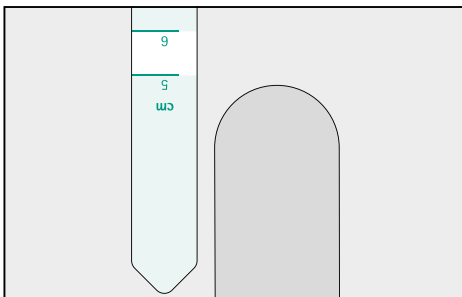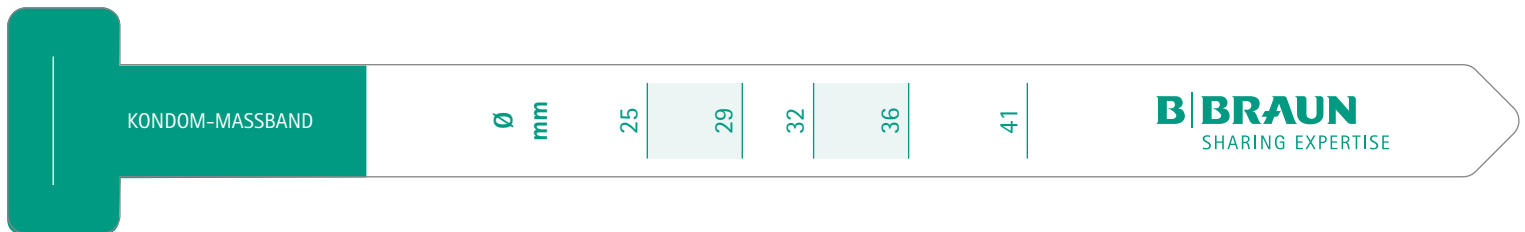

Bitte messen Sie zunächst die Penislänge (siehe Abbildung).

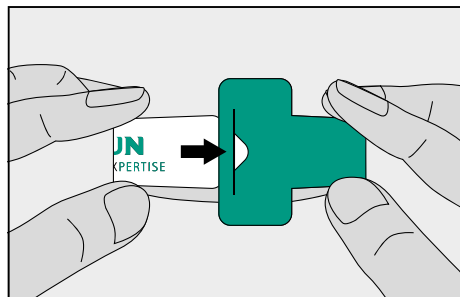



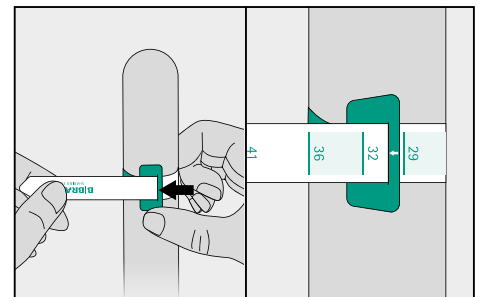






Um den Durchmesser zu bestimmen, verwenden Sie bitte die Mess-Skala auf der Vorderseite. Schieben Sie die Spitze des Massbandes durch den Schlitz am hinteren Ende.



Führen Sie das Massband über den Penis und ziehen Sie es in der Mitte des Penischaftes zusammen. Achten Sie darauf, dass das Band die Penishaut nicht abschnürt. Die Pfeilspitze zeigt die korrekte Kondom-Urinal-Grösse an (z. B. 32 mm).

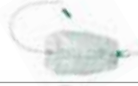Produktübersicht

KONTINENZVERSORGUNG – EIN SICHERES GEFÜHL

	Artikel	Einheit	MiGeL	Art.-Nr.	Pharmacode
	Urimed® Vision Standard – selbsthaftend				
	Ø 25 mm	30	15.16.02.00.1	IH2525A	3013807
	Ø 29 mm	30	15.16.02.00.1	IH2529A	3013813
	Ø 32 mm	30	15.16.02.00.1	IH2532A	3013836
	Ø 36 mm	30	15.16.02.00.1	IH2536A	3013842
	Ø 41 mm	30	15.16.02.00.1	IH2541A	3013859
	Urimed® Vision Short – selbsthaftend				
	Ø 25 mm	30	15.16.02.00.1	IH4525A	3013865
	Ø 29 mm	30	15.16.02.00.1	IH4529A	3013871
	Ø 32 mm	30	15.16.02.00.1	IH4532A	3013888
	Ø 36 mm	30	15.16.02.00.1	IH4536A	3013894
	Ø 41 mm	30	15.16.02.00.1	IH4541A	3013902
	Urimed® B'Bags				
	2000 ml, einzeln steril verpackt	100	15.15.02.00.1	29400	6322118
	2000 ml, unsteril im Original Karton verpackt	30	15.15.01.00.1	29416	6380972
	2000 ml, mit Schiebehahn und Rücklaufsperr, unsteril	30	15.15.03.00.1	29451	6380989
	2000 ml, mit Schiebehahn und Rücklaufsperr, einzeln steril verpackt	100	15.15.04.00.1	29440	6322176
	Medicare® Beutel				
2000 ml, mit Schiebehahn und Rücklaufsperr, einzeln steril verpackt	10	15.15.04.00.1	28115	6380995	
	Urimed® Bag Plus				
500 ml	10	15.14.03.00.1	28501A	6322124	
	Urimed® Tribag Plus mit 20 cm Schlauch (Beinbeutel)				
500 ml steril mit Ablassventil	10	15.14.04.00.1	28203	5015874	
	Urimed® Strap				
Klettband zur Fixierung von Beinbeuteln	2	15.14.99.02.1	68551	5433293	
	Urimed® Fix				
	Grösse S, gelb	2	15.14.99.01.1	68520R	6133239
	Grösse M, blau	2	15.14.99.01.1	68530R	6133245
	Grösse L, braun	2	15.14.99.01.1	68540R	6133251
	Urimed® Klett				
	Klein Gr. 2	10		29260	7848607
	Gross Gr. 3	10		29261	7848608