



INCL. NASTRO DI  
MISURAZIONE PER  
CONDOM URINARI  
& ISTRUZIONI  
SINTETICHE

# Urimed<sup>®</sup> Vision

CONDOM URINARI AUTOADESIVI PER MAGGIOR SICUREZZA

# Urimed® Vision




ESTREMAMENTE DERMOCOMPATIBILI – CON PROTEZIONE ANTIPIEGA –  
TEMPI DI APPLICAZIONE LUNGI

I **condom urinari Urimed® Vision** rappresentano nell'uomo una valida alternativa ai cateteri permanenti o ai prodotti assorbenti. Mentre il trattamento con cateteri permanenti comporta infatti il pericolo di infezioni alle vie urinarie, i prodotti assorbenti sono gravati da svantaggi quali perdite, cattivi odori e irritazioni cutanee. Con Urimed® Vision la sfera intima è messa al sicuro grazie all'autotrattamento semplice e discreto.



## SUGGERIMENTI PER L'USO

- La pelle del pene deve essere asciutta e sgrassata affinché il condom urinario possa aderire adeguatamente
- Affinché l'adesivo non si appiccichi ai peli del pube, questi ultimi devono essere tagliati o rasati
- L'apertura delle vie urinarie deve trovarsi a distanza di sicurezza dallo scarico del condom urinario in modo che sia garantito il deflusso dell'urina nella sacca
- Per motivi igienici, i condom urinari devono essere sostituiti ogni 24 ore

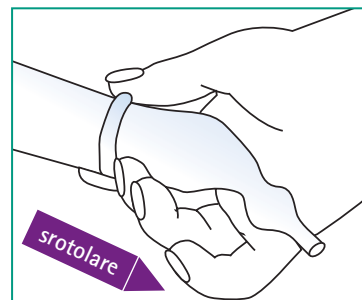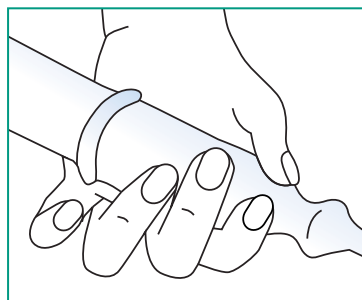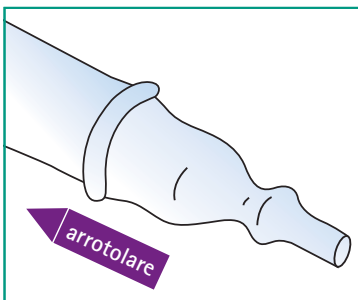

---



## I VOSTRI VANTAGGI

- Il silicone al 100% **previene le irritazioni cutanee** dovute alle allergie al lattice
  - L'adesivo dermocompatibile e idrorepellente assicura **tempi di permanenza lunghi**
  - La protezione antipioga sullo stelo **previene i ristagni di urina**
  - Materiale trasparente per un **controllo ottimale della pelle**
  - **5 misure diverse** garantiscono una tenuta ottimale e un uso sicuro
  - Versione «Short» con attacco adesivo modificato **specifico per uomini con pene retratto**
-


# Nastro di misurazione per condom urinari

## ISTRUZIONI SINTETICHE


Estrarre il nastro di misurazione. Tale nastro serve a determinare la misura esatta di condom urinario richiesta. Si tenga presente che quanto più preciso è l'adattamento del condom tanto più sicuro è il fissaggio adesivo.

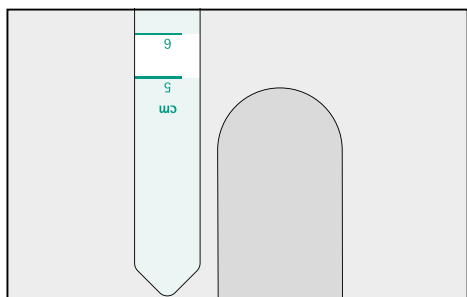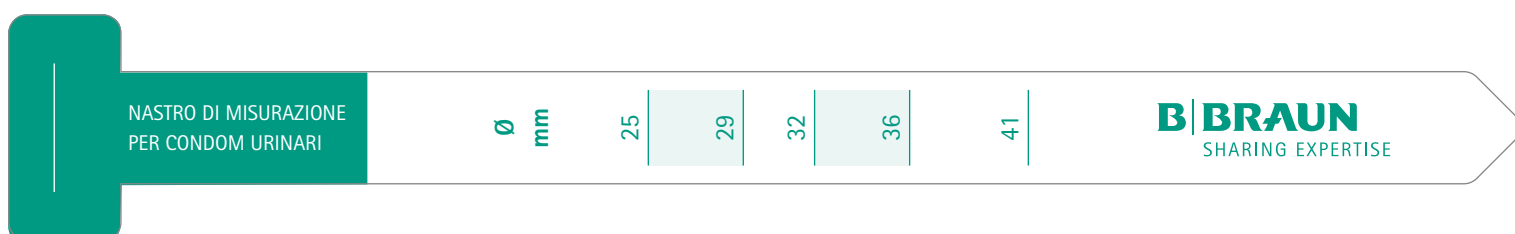

Misurare prima la lunghezza del pene (vedere la figura).

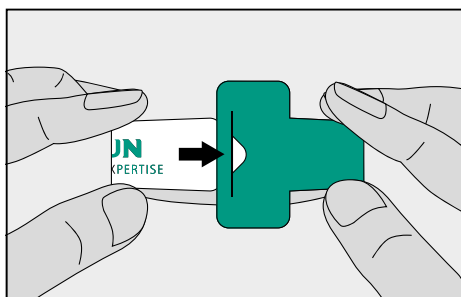



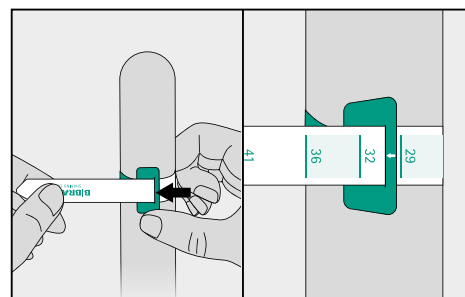






Per determinare il diametro utilizzare la scala presente sul davanti. Inserire la punta del nastro nella fessura sull'estremità posteriore.



Far passare il nastro attorno al pene e congiungerlo al centro dello stelo. Fare attenzione che il nastro non provochi abrasioni alla pelle del pene. La punta della freccia indica la misura di condom urinario corretta (ad es. 32 mm).

# Panoramica dei prodotti

## TRATTAMENTO DELLA CONTINENZA – UNA SENSAZIONE DI SICUREZZA

	Articolo	Unità	EMAp	Cod. art.	Pharmacode
	<b>Urimed® Vision Standard – autoadesivo</b>				
	Ø 25 mm	30	15.16.02.00.1	IH2525A	3013807
	Ø 29 mm	30	15.16.02.00.1	IH2529A	3013813
	Ø 32 mm	30	15.16.02.00.1	IH2532A	3013836
	Ø 36 mm	30	15.16.02.00.1	IH2536A	3013842
	Ø 41 mm	30	15.16.02.00.1	IH2541A	3013859
	<b>Urimed® Vision Short – autoadesivo</b>				
	Ø 25 mm	30	15.16.02.00.1	IH4525A	3013865
	Ø 29 mm	30	15.16.02.00.1	IH4529A	3013871
	Ø 32 mm	30	15.16.02.00.1	IH4532A	3013888
	Ø 36 mm	30	15.16.02.00.1	IH4536A	3013894
	Ø 41 mm	30	15.16.02.00.1	IH4541A	3013902
	<b>Urimed® B'Bags</b>				
	2000 ml, in confezione singola sterile	100	15.15.02.00.1	29400	6322118
	2000 ml, non sterile in cartone originale	30	15.15.01.00.1	29416	6380972
	2000 ml, con morsetto scorrevole e dispositivo antireflusso, non sterile	30	15.15.03.00.1	29451	6380989
	2000 ml, con morsetto scorrevole e dispositivo antireflusso, in confezione singola sterile	100	15.15.04.00.1	29440	6322176
	<b>Sacca Medicare®</b>				
2000 ml, con rubinetto scorrevole, dispositivo antiritorno, in confezione singola sterile	10	15.15.04.00.1	28115	6380995	
	<b>Urimed® Bag Plus</b>				
500 ml	10	15.14.03.00.1	28501A	6322124	
	<b>Urimed® Tribag Plus con tubicino da 20 cm (sacca da gamba)</b>				
500 ml sterile con valvola di scarico sacca da drenaggio	10	15.14.04.00.1	28203	5015874	
	<b>Urimed® Strap</b>				
Nastro in velcro per il fissaggio delle sacche da gamba	2	15.14.99.02.1	68551	5433293	
	<b>Urimed® Fix</b>				
Misura S, giallo	2	15.14.99.01.1	68520R	6133239	
Misura M, blu	2	15.14.99.01.1	68530R	6133245	
Misura L, marrone	2	15.14.99.01.1	68540R	6133251	
	<b>Urimed® Klett</b>				
Piccolo misura 2	10		29260	7848607	
Grande misura 3	10		29261	7848608	