
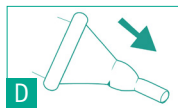


MODE D'EMPLOI Urimed® Vision

Urimed® Vision est un étui pénien en silicone, autoadhésif pour les hommes, auxquels il faut apposer une déviation urinaire lors d'incontinence. Il est destiné à un usage unique.

UTILISATION

- 1) Laver le pénis avec du savon et de l'eau chaude et sécher à fond.
- 2) Raser les poils du pubis dérangeants si nécessaire.
- 3) Ouvrir l'emballage à la perforation.
- 4) Pour enlever le capuchon en plastique, presser l'étui pénien à la pointe du capuchon blanc et retirer le capuchon en plastique.
Ne concerne que la version « short ». **A**
- 5) Placez l'étui pénien sur le gland et déroulez-le le long du pénis. **B**
- 6) Presser avec précaution l'étui pénien tout autour et aplatissez les petits plis, afin de garantir une bonne tenue. **C**
IMPORTANT : la résistance de la bonne tenue peut être sensiblement entravée par une pression négligente.
- 7) Connectez l'étui pénien avec une poche urinaire. Utilisez pour cela la poche urinaire de jambe Tribag® p.ex.
- 8) Urimed® Vision sera ôtée en déroulant le produit dans le sens inverse. **D**

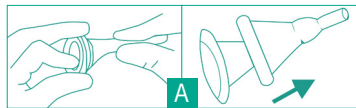

MODE D'EMPLOI Urimed® Vision

CONSEILS IMPORTANTS

- Ne pas utiliser sur une peau irritée ou lésée, ni en cas de réactions allergiques.
- Pour des raisons d'hygiène, le produit devrait être changé quotidiennement.
- Une utilisation plus longue que 24 heures peut augmenter le risque de complications.

CONSEILS DE PRÉCAUTION

La réutilisation de produits médicaux à usage unique présente un risque potentiel pour le patient ou l'utilisateur.

Elle peut présenter une contamination et/ou un préjudice de la fonctionnalité comme suite. Une contamination et/ou un fonctionnement du produit diminué, peuvent conduire à des blessures, une maladie, voire la mort du patient.