


ISTRUZIONI PER L'USO Urimed® Vision

Urimed® Vision è un condom urinario autoadesivo in silicone per uomini utilizzato per il deflusso dell'urina nei casi di incontinenza. E' un prodotto monouso.

USO

- 1) Lavare il pene con acqua calda e sapone e quindi asciugarlo accuratamente.
- 2) Se necessario, tagliare i peli pubici che possono causare fastidi.
- 3) Aprire la confezione lungo la perforazione.
- 4) Per rimuovere il cappuccio in plastica, afferrare il condom urinario per la punta del cappuccio bianco e sfilare il cappuccio.
Riguarda soltanto la versione «Short». **A**
- 5) Posizionare il condom urinario sul glande e quindi srotolarlo lungo il pene. **B**
- 6) Far aderire bene il condom urinario a spirale e lisciare le pieghe in modo da garantire una buona aderenza. **C**
IMPORTANTE: La qualità dell'adesione può essere notevolmente compromessa da pressioni inaccurate.
- 7) Collegare il condom urinario a una sacca di raccolta dell'urina. Usare ad es. la sacca per raccolta dell'urina Tribag®.
- 8) Urimed® Vision va rimosso dopo l'uso riavvolgendo il prodotto in senso inverso. **D**

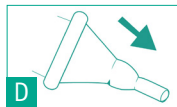

ISTRUZIONI PER L'USO Urimed® Vision

AVVERTENZE IMPORTANTI

- Non usare su cute irritata, con lesioni o in presenza di reazioni allergiche.
- Per motivi igienici, il prodotto deve essere sostituito ogni 24 ore.
- Utilizzi per tempi superiori alle 24 ore possono aumentare il rischio di complicazioni.

AVVERTIMENTO

Il riutilizzo dei presidi medico-chirurgici monouso comporta rischi potenziali per il paziente o l'utilizzatore.

Può avere come conseguenza contaminazioni e/o compromissioni della funzionalità.

Contaminazioni e/o limitata funzionalità del prodotto possono causare lesioni, malattie o decesso del paziente.