


# GEBRAUCHSANWEISUNG Urimed® Vision

Urimed® Vision ist ein selbsthaftendes Kondom-Urinal aus Silikon für männliche Personen, welches zur Harnableitung bei Inkontinenz eingesetzt wird. Es ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt.

## ANWENDUNG

- 1) Den Penis mit Seife und warmem Wasser waschen und gründlich abtrocknen.
- 2) Wenn notwendig störende Schamhaare abschneiden.
- 3) Die Verpackung an der Perforation öffnen.
- 4) Um das Plastikhütchen zu entfernen, das Kondom-Urinal an der Spitze des weissen Hütchens zusammendrücken und das Plastikhütchen herausziehen.  
Betrifft nur die Version «Short». **A**
- 5) Legen Sie das Kondom-Urinal an der Eichel an und rollen Sie es über den Penis. **B**
- 6) Drücken Sie das Kondom-Urinal rundherum gut an und streichen Sie kleine Falten glatt, damit eine gute Haftung gewährleistet ist. **C**  
WICHTIG: Die Beständigkeit der Haftverbindung kann durch unsorgfältiges Andrücken wesentlich beeinträchtigt werden.
- 7) Verbinden Sie das Kondom-Urinal mit einem Urinauffangbeutel. Verwenden Sie dazu z.B. den Tribag® Urin-Beinbeutel.
- 8) Urimed® Vision wird nach Gebrauch entfernt, indem man das Produkt in umgekehrter Richtung wieder aufrollt. **D**

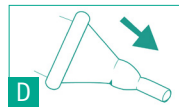

# GEBRAUCHSANWEISUNG Urimed® Vision

## WICHTIGE HINWEISE

- Nicht auf gereizter oder verletzter Haut sowie bei allergischen Reaktionen anwenden.
- Aus Hygienegründen sollte das Produkt täglich gewechselt werden.
- Eine längere Verwendung als 24 Std. kann das Risiko von Komplikationen erhöhen.

## WARNHINWEIS

Die Wieder-Verwendung von Medizinprodukten für den einmaligen Gebrauch stellt ein potenzielles Risiko für den Patienten oder den Anwender dar. Sie kann eine Kontamination und /oder Beeinträchtigung der Funktionalität zur Folge haben. Kontamination und /oder eingeschränkte Funktionalität des Produkts können zu Verletzung, Erkrankung oder Tod des Patienten führen.