




# HISTOACRYL® SET LAPAROSKOPISCH

ZUR NERVENSCHONENDEN NETZFIXIERUNG –  
IN DER LAPAROSKOPISCHEN HERNIENCHIRURGIE

# HISTOACRYL® SET LAPAROSKOPISCH

## APPLIKATION

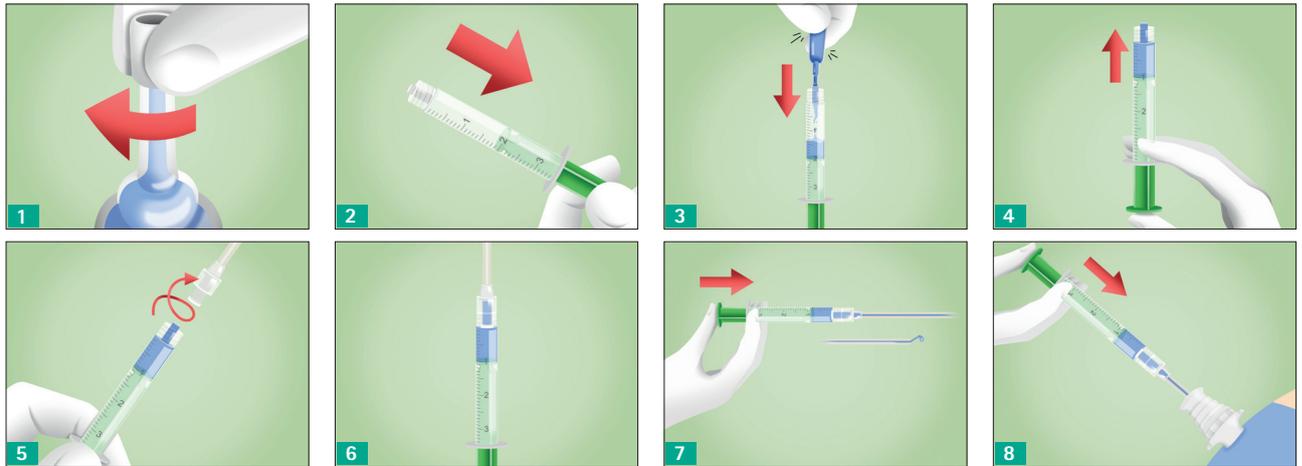

1. Abschrauben der Ampullenspitze von Histoacryl®.
  2. Zurückziehen des grünen Kolbens bis 2 ml Volumen vorhanden.
  3. Einführen der offenen Ampullenspitze in den Spritzenkörper, festes Zusammendrücken der Histoacryl® Ampulle bis sich der gesamte Inhalt in der Spritze befindet.
  4. Entlüften der Spritze, bis Histoacryl® Kleber die Spitze der Spritze erreicht.
  - 5.+6. Befestigung der Kanüle an der entlüfteten Spritze, Festschrauben des Luer-Lock-Anschluss.
  7. Vordrücken des grünen Kolbens bis erster Tropfen Histoacryl® in der Kanülenspitze erscheint.
  8. Schieben der Schutzhülle über die Spitze der Kanüle, Einführen durch den Trokar. Halten der Applikationsspitze an den gewünschten Fixationsbereich des Netzes, vorsichtiges Drücken des grünen Kolbens.
- Punktuelleres Auftragen – wenige Tropfen ausreichend.
  - Zurückziehen des Applikationssystems vor Setzen eines neuen Fixierungspunktes, um ein Verkleben der Kanülenspitze zu vermeiden – bei Verstopfung der Kanülenspitze während der Anwendung: Herausziehen des Systems aus dem Patienten und Beseitigung der Verstopfung, indem die Spitze mit trockenem Mull abgerieben oder ein Teil abgeschnitten wird.
  - Entfernung des Applikationssystems – Sicherstellung, dass die Kanülenspitze vor Entfernung von der Schutzhülle bedeckt ist, um eine Kontamination des Trokars mit Histoacryl®-Resten zu vermeiden. Dabei Festhalten der Schutzhülle am dicken Ende.

Bezeichnung	Artikel-Nr.	Inhalt
Histoacryl® Lap Mesh Fixation	1050165	5 x 0.5 ml Histoacryl® blau, 5 x LapFix Applikator, 5 x Injekt Spritze 2 ml
	1052008	2 x 0.5 ml Histoacryl® blau, 1 x LapFix Applikator, 1 x Injekt Spritze 2 ml



AESCULAP® – a B. Braun brand

B. Braun Medical AG | Aesculap | Seesatz 17 | 6204 Sempach  
Tel. 058 258 50 00 | Fax 058 258 60 00 | www.bbraun.ch