




SET LAPAROSCOPIE HISTOACRYL®

POUR LA FIXATION ATRAUMATIQUE DU FILET
EN CHIRURGIE LAPAROSCOPIQUE DES HERNIES

SET LAPAROSCOPIE HISTOACRYL®

APPLICATION

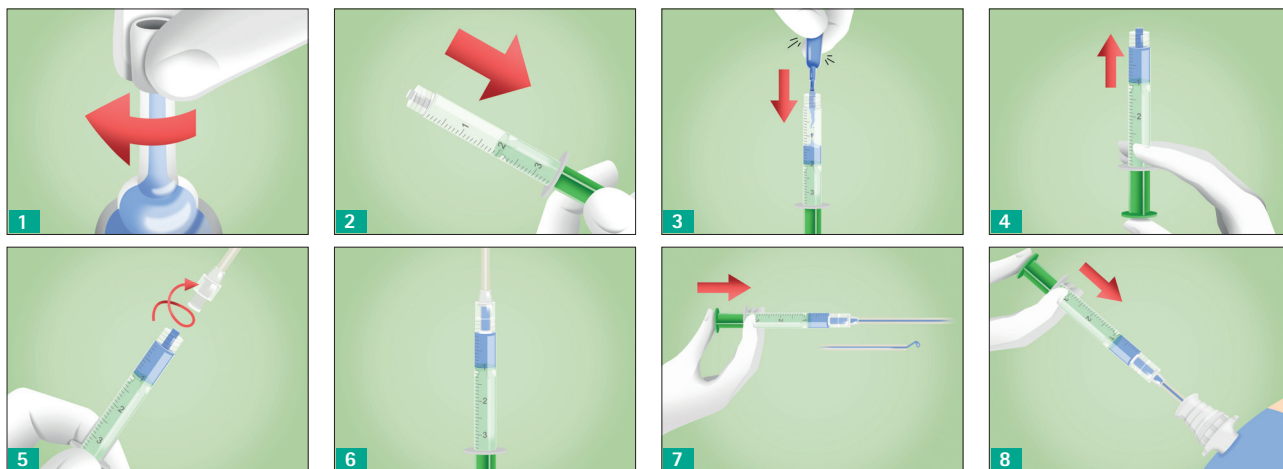

1. Dévisser le bouchon de l'ampoule Histoacryl®.
 2. Tirer le piston vert de la seringue jusqu'à obtenir un volume de 2 ml.
 3. Introduire la pointe de l'ampoule ouverte dans le corps de la seringue et presser fermement sur l'ampoule Histoacryl® jusqu'à ce que tout le contenu se trouve dans la seringue.
 4. Purger la seringue jusqu'à ce que la colle Histoacryl® atteigne l'embout de la seringue.
 - 5.+6. Fixer la canule sur la seringue purgée, visser le raccord Luer-Lock.
 7. Pousser le piston vert jusqu'à ce que la première goutte d'Histoacryl® apparaisse dans la pointe de la canule.
 8. Pousser le dispositif de protection sur l'extrémité de la canule et l'introduire à travers le trocar. Maintenir l'extrémité de la canule contre la zone de fixation souhaitée du filet et pousser avec précaution sur le piston vert.
- Pour une application ponctuelle, quelques gouttes suffisent.
 - Retirer le dispositif d'application avant de poser un nouveau point de fixation afin d'éviter que l'extrémité de la canule ne s'obstrue – en cas d'obstruction de l'extrémité de la canule pendant l'utilisation: Retirer le système du patient et éliminer les obstructions avec une compresse sèche ou en coupant une partie de l'extrémité de la canule.
 - Retrait du dispositif d'application – s'assurer que le dispositif de protection recouvre l'extrémité de la canule avant le retrait du système afin d'éviter toute contamination du trocar par des résidus d'Histoacryl®. Maintenir ainsi le dispositif de protection par son extrémité la plus épaisse.
 - Les instruments contaminés avec l'Histoacryl® peuvent être nettoyés avec de l'acétone et du diméthylformamide.

Article	N°art.	Composition
Histoacryl® Lap Mesh Fixation	1050165	5 x 0.5 ml Histoacryl® bleu, 5 x Applicateur LapFix, 5 x Seringue Injekt 2 ml
	1052008	5 x 0.5 ml Histoacryl® bleu, 5 x Applicateur LapFix, 5 x Seringue Injekt 2 ml



AESCULAP® – a B. Braun brand

B. Braun Medical SA | Aesculap | Seesatz 17 | 6204 Sempach
Tél. 058 258 50 00 | Fax 058 258 60 00 | www.bbraun.ch