

MODE D'EMPLOI Actreen® Hi-Lite^{Cath}

Actreen® Hi-Lite^{Cath} est un cathéter à usage unique stérile, immédiatement prêt à l'emploi, revêtu d'un lubrifiant. Il convient spécialement aux personnes de sexe masculin pour l'auto-sondage intermittent.



longueur : 41 cm

PRÉPARATION

- 1) Veuillez vérifier avant l'ouverture de l'emballage que celui-ci soit en bon état.
- 2) Lavez-vous soigneusement les mains avant et après le sondage. Nettoyez aussi les parties intimes autour de l'entrée de l'urètre.

OUVRIR LE PRODUIT

Ôtez la feuille de protection du connecteur tout en saisissant la feuille de protection à la marque « 1 » et enlevez-la. **A**

Méthode sans contact


Saisissez la feuille de protection à la marque « A » et retirez-la. Ou alors saisissez le cathéter d'une main, enfitez le pouce de l'autre main dans la fente à la marque « A » et ôtez la feuille de protection. **B** Enfin pliez l'enveloppe ensemble comme un accordéon, sans toucher le cathéter. **C**

Méthode sans contact facilitée

Ôtez l'enveloppe amovible. Saisissez pour cela la feuille de protection à la marque « B » et retirez-la. La pièce amovible de la feuille de protection protège le cathéter de la contamination lors de la manipulation. **D**

Retrait de l'ensemble du cathéter de l'emballage

Tenez le cône fermement, après avoir retiré la feuille à la marque « 1 » du connecteur, et sortez le cathéter de l'emballage. **E**

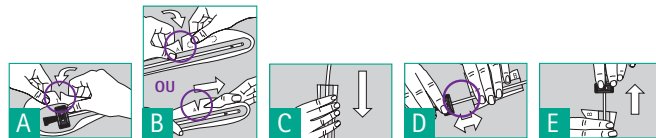

MODE D'EMPLOI Actreen® Hi-Lite^{Cath}



SONDAGE POUR PERSONNES DE SEXE MASCULIN

- 1) Tenez le pénis vers le haut, afin de restreindre la première courbure de l'urètre.
- 2) Introduisez précautionneusement le cathéter avec l'autre main à travers l'urètre dans la vessie, jusqu'à ce que l'urine commence à couler de la vessie.
- 3) Pour que la vessie se vide complètement, vous pouvez pratiquer une légère pression sur le bas-ventre à la fin du sondage.
- 4) Lorsque plus aucune urine ne sort du cathéter, vous pouvez ressortir celui-ci précautionneusement.

Sondage avec pointe Tiemann

Afin de maintenir la bonne position de la pointe lors du sondage, observez la marque sur le connecteur.

ÉLIMINATION DU CATHÉTER

Le cathéter peut être discrètement éliminé dans sa feuille de protection dans une poubelle.

REMARQUES

Actreen® Hi-Lite^{Cath} peut être utilisé en combinaison avec une poche urinaire, telle qu'Urimed® Bag de B. Braun p.ex. L'auto-sondage doit se pratiquer uniquement sur prescription médicale et suite à une instruction correspondante.