



DOMAINES D'APPLICATION

- Ulcères des jambes
- Ulcères diabétiques
- Escarres de décubitus
- Abscesses
- Fistules/cavités de plaies
- Brûlures
- Zones de prélèvement de peau
- Plaies infectées

Askina[®] Sorb

ALGINATE DE CALCIUM POUR LES PLAIES EXSUDÉES

Askina® Sorb

EXCELLENTE ABSORPTION, PROTECTION OPTIMALE DES BORDS DE LA PLAIE

La composition idéale d'Askina® Sorb avec 85 % d'alginate de calcium et 15 % de carboxyméthylcellulose (CMC) assure une excellente absorption en même temps qu'une protection des bords de la plaie contre une macération.

AVANTAGES

- S'adapte à la plaie
- Absorbe rapidement l'excès d'exsudat
- Évite une macération des bords de la plaie
- Favorise la guérison naturelle des plaies
- Permet un changement de pansement atraumatique et presque indolore grâce à la gélatine
- Peut être retiré en un morceau




MODE D'EMPLOI



1
Le matériau très souple d'Askina® Sorb (compresse ou mèche) est aisément placé dans la plaie.



2
Remplir la plaie d'Askina® Sorb sans comprimer.

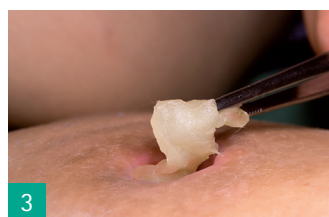

3
Grâce à son excellent pouvoir d'absorption et à sa stabilité, Askina® Sorb peut très aisément être retiré en un morceau.

SURVOL DES PRODUITS

Article	Unité	N° art.	Pharmacode	LiMA
Askina® Sorb compresse				
6 x 6 cm	15	2100S	2753703	35.05.06.01.1
10 x 10 cm	15	2101S	2753726	35.05.06.02.1
Askina® Sorb mèche				
2.7 x 34 cm	10	2105S	2753732	35.05.06.08.1

B. Braun Medical SA | Hospital & Out Patient Market | Seesatz 17 | 6204 Sempach | www.bbraun.ch
Hospital Market : Tél. 0848 83 00 44 | Fax 0800 83 00 43 | sales-hospital.bbmch@bbraun.com
Out Patient Market : Tél. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32 | sales-opm.bbmch@bbraun.com