

EXTENSION DE
LA GAMME



efficaces



rapides



douces



- Deux tailles de lingette : standard et extra grande
- Technique de pliage spéciale – sans sortir d'autres lingettes
- Optimales pour matériaux sensibles

Meliseptol[®] Wipes sensitive 100 Meliseptol[®] Wipes sensitive XL

Lingettes de désinfection en flowpack pour matériaux sensibles

Meliseptol® Wipes sensitive 100/XL

PROPRIÉTÉS

- Flowpacks en deux tailles de lingette, standard et extra grande, pour une désinfection optimale de toutes les surfaces avec une seule lingette
- La technique de pliage spéciale des lingettes exclut la sortie d'autres lingettes
- Permet d'ouvrir, de prélever les lingettes et de fermer d'une seule main
- La « fermeture encliquetable » assure que les lingettes restent humides
- La solution imbibée Meliseptol® Foam pure n'attaque pas les surfaces, même les plus sensibles
- Les lingettes douces non pelucheuses respectent vos surfaces très sensibles
- Lingettes stables 90 jours après ouverture

COMPATIBILITÉ AVEC LES MATÉRIAUX

Meliseptol® Wipes sensitive 100 Et XL convient particulièrement aux surfaces délicates, comme p. ex. SpaceStation, Perfusor® Space, Infusomat® Space, glucomètres, les feux OP, Lenovo® notebooks aussi des endoscopes.

Autres compatibilités des matériaux sur demande.

SPECTRE D'ACTION/TEMPS D'ACTION (TA)

Domaine d'utilisation	TA
Désinfection de surfaces selon DGHM ² /VAH ³ bactéricide/levuricide	1 min* faible contamination
Test 4 champs (bactéricide/levuricide)	2 min
Action virucide limitée (avec VHB, VHC, VIH) ¹	1 min
Rotavirus	1 min
TbB (M. terrae)	3 min
Polyomavirus SV40	5 min
Norovirus**	5 min

* La valeur mentionnable la plus courte possible pour l'association allemande d'hygiène appliquée VAH est 5 min.

** Virus de substitution NVM

OBSERVATIONS SUR L'UTILISATION

Essuyer les surfaces avec Meliseptol® Wipes sensitive 100/XL de sorte qu'elles soient entièrement humectées de solution active. Voir les temps d'action dans le tableau. Garder humide pendant le temps d'action, ne pas sécher en frottant. Ne pas utiliser sur des surfaces chaudes ou sur des appareils électriques sous tension!
Meliseptol® Wipes sensitive 100 : pour surfaces d'env. 1 m²
Meliseptol® Wipes sensitive XL : pour surfaces d'env. 2 m²

Article	N° art.	Taille de lingette	Contenu	Pharmacode
 Meliseptol® Wipes sensitive XL	19893	24 x 30 cm	42 lingettes	6810013
 Meliseptol® Wipes sensitive 100	19894	18 x 20 cm	100 lingettes	6810042

Données physico-chimiques

Apparence : lingettes blanches | odeur : discrète | densité : env. 0.98 g/ml
Point d'éclair : + 31 °C

Meliseptol® Wipes sensitive 100/XL (Liquide d'imprégnation: Meliseptol® Foam pure)

100 g de solution contiennent : 17 g de propan-1-ol, 0.23 g de chlorure de didécylidiméthylammonium, tensioactifs non ioniques
Indications selon l'ordonnance (CE) n° 648/2004 sur les détergents : < 5% tensioactifs non ioniques

1) Selon recommandation du Robert Koch-Institut RKI, Bundesgesundheitsblatt 01-2004 (fiche de santé fédérale allemande)

3) VAH = Verbund für Angewandte Hygiene (Association allemande d'hygiène appliquée)

2) DGHM = Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie (Société allemande d'hygiène et de microbiologie)