

SORTIMENTS-
ERWEITERUNG



wirksam



schnell



sanft

- Zwei Tuchgrößen:
Standard und extra-gross
- Spezielle Falttechnik – ohne
Nachziehen weiterer Tücher
- Optimal für empfindliche
Materialien

Meliseptol® Wipes sensitive 100 Meliseptol® Wipes sensitive XL

Desinfektionstücher im Flowpack für empfindliche Materialien

Meliseptol® Wipes sensitive 100/XL

EIGENSCHAFTEN

- Flowpacks in zwei Tuchgrössen, Standard und extra-gross, damit jede Fläche mit nur einem Tuch optimal desinfiziert werden kann
- Die spezielle Falttechnik der Tücher schliesst ein Nachziehen weiterer Tücher aus
- Öffnen, Herausnehmen der Tücher und Schliessen ist mit einer Hand möglich
- Der «Klick-Verschluss» stellt sicher, dass die Tücher feucht bleiben
- Die Tränklösung Meliseptol® Foam pure greift selbst hochempfindliche Oberflächen nicht an
- Weiche, fusselfreie Tücher sind sanft zu ihren hochempfindlichen Oberflächen
- 90 Tage Anbruchstabilität der Tücher

MATERIALVERTRÄGLICHKEIT

Meliseptol® Wipes sensitive 100 & XL eignet sich speziell für empfindliche Oberflächen wie z.B. SpaceStation, Perfusor® Space, Infusomat® Space, Blutzuckermessgeräte, OP-Leuchten, Lenovo® Notebooks sowie flexible Endoskope.

Weitere Materialkompatibilitäten sind auf Anfrage erhältlich.

WIRKSPEKTRUM/EINWIRKZEITEN (EZ)

Einsatzgebiet	EZ
Flächendesinfektion gem. DGHM ² /VAH ³ bakterizid/levurozid	1 Min.* geringe Belastung
4-Felder Test (bakterizid/levurozid)	2 Min.
Begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV) ¹	1 Min.
Rotaviren	1 Min.
TbB (M. terrae)	3 Min.
Polyomaviren SV40	5 Min.
Noroviren**	5 Min.

* Der kürzest mögliche Listungswert beim VAH beträgt 5 Min.



** Surrogatvirus MNV

HINWEISE ZUR ANWENDUNG

Flächen mit Meliseptol® Wipes sensitive 100/XL wischen, so dass sie vollständig mit der Wirkstofflösung benetzt sind. Einwirkzeiten siehe Tabelle. Während der Einwirkzeit feucht halten, nicht trocken reiben. Nicht auf heissen Flächen oder an unter Spannung stehenden elektrischen Geräten anwenden!

Meliseptol® Wipes sensitive 100: für ca. 1 m² grosse Flächen

Meliseptol® Wipes sensitive XL: für ca. 2 m² grosse Flächen

Artikel	Art. Nr.	Tuchgrösse	Inhalt	Pharmacode
 Meliseptol® Wipes sensitive XL	19893	24 x 30 cm	42 Tücher	6810013
 Meliseptol® Wipes sensitive 100	19894	18 x 20 cm	100 Tücher	6810042

Physikalisch-chemische Daten

Aussehen: weisse Tücher | Geruch: unauffällig | Dichte: ca. 0.98 g/ml

Flammpunkt: + 31 °C

Meliseptol® Wipes sensitive 100/XL (Tränkflüssigkeit: Meliseptol® Foam pure)

100 g Lösung enthalten: Propan-1-ol 17 g, Didecylidimethylammoniumchlorid 0.23 g, nicht-ionische Tenside
Angaben gemäss Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien: < 5% nicht-ionische Tenside

1) gem. RKI-Empfehlung, Bundesgesundheitsblatt 01-2004

3) VAH = Verbund für Angewandte Hygiene

2) DGHM = Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie