

AESCULAP® STERILCONTAINER FUNKTIONSPRÜFUNG


BASIS STERILCONTAINER

Alle Bestandteile des Sterilcontainers sind vor jedem Einsatz visuell auf Beschädigungen und korrekte Funktion zu prüfen. Für den sicheren Einsatz ist die Beachtung der Gebrauchsanweisung TA015110-DE zwingend notwendig. Falls Ihnen die neueste Ausgabe der Gebrauchsanweisung nicht vorliegt, wenden Sie sich bitte an Aesculap.

1. METALLTEILE NICHT VERFORMT



- Containerwanne und Deckel überprüfen

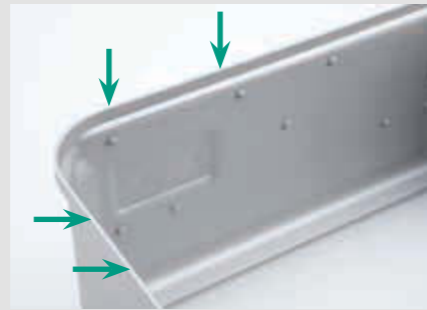

- Keine Dellen im Wannenrand




- Keine Dellen im Deckelrand
- Aluminiumdeckel nicht verzogen

2. FILTERHALTER PRÜFEN



- Die Filterhalterung hat eine Vorspannung und liegt vollflächig am Rand auf

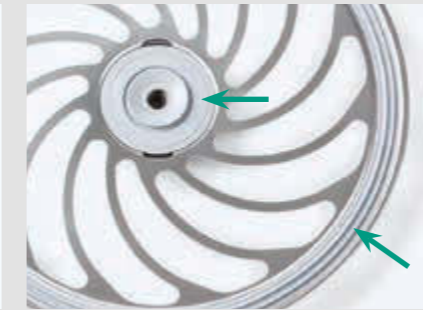

- Dichtung ist vorhanden und unversehrt



- Bolzen im Deckel und ggf. Wanne wackeln nicht

3. UNVERSEHRTE DICHTUNGEN



- Dichtungen sind vorhanden und unversehrt
- Keine Risse, Brüche, usw.

4. FILTERINSPEKTION



- Filter unbeschädigt (keine Knicke, Löcher, Risse oder Spalten)
- Einmalfilter gewechselt (intakt)



- Die Filterhalterung rastet deutlich ein

5. FUNKTIONSTÜCHTIGER VERSCHLUSS



- Der Verschluss ist funktionstüchtig und weist keine Beschädigungen auf
- Verschlusscharniere gelegentlich mit Sterilit® I ölen (JG600)



6. RICHTIGE DECKELSCHLIESSUNG



- Deckel und Wanne justieren ohne Druck

7. UNVERSEHRTE TRAGEGRIFFE



- Verschluss des Deckels rastet hörbar in das Gegenstück an der Wanne ein



- Tragegriffe sind unversehrt und zeigen keine Beschädigungen auf

8. UNBESCHÄDIGTE STERILCONTAINER 9. KENNZEICHNEN UND VERPLOMBEN



- Nur unbeschädigte Sterilcontainer verwenden
- Beschädigte Teile sofort durch Originalersatzteile ersetzen oder reparieren (Aesculap Technischer Service)



- Sterilcontainer verschlossen



- Wahlweise mit Produktionsetikett verplombt oder Produktionsetikett und Kunststoffplombe angebracht

AESCULAP® STERILCONTAINER FUNKTIONSPRÜFUNG

PRIMELine® PRO STERILCONTAINER

Alle Bestandteile des Sterilcontainers sind vor jedem Einsatz visuell auf Beschädigungen und korrekte Funktion zu prüfen. Für den sicheren Einsatz ist die Beachtung der Gebrauchsanweisung TA015110-DE zwingend notwendig. Falls Ihnen die neueste Ausgabe der Gebrauchsanweisung nicht vorliegt, wenden Sie sich bitte an Aesculap.

1. METALLTEILE NICHT VERFORMT



- Containerwanne und Deckel überprüfen




- Keine Dellen im Wannenrand



- Keine Dellen im Deckelrand
- Aluminiumdeckel nicht verzogen

2. UNVERSEHRTE DICHTUNGEN

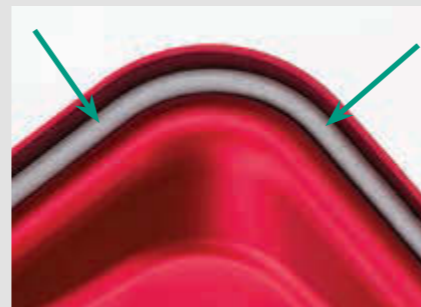

- Dichtungen sind vorhanden und unversehrt
- Keine Risse, Brüche, usw.

3. FILTERINSPEKTION



- Lamellenplatte zur Überprüfung abnehmen (Drehbewegung)



- Primeline Filter unbeschädigt (keine Knicke, Löcher, Risse oder Spalten)
- Filter bleibt bei der Überprüfung in der Kartusche

4. FUNKTIONSTÜCHTIGER VERSCHLUSS



- Dreiecke zeigen zueinander (eingerastet)



- Der Verschluss ist funktionstüchtig und weist keine Beschädigungen auf
- Verschlusscharniere gelegentlich mit Sterilit® I ölen (JG600)



5. RICHTIGE DECKELSCHLIESSUNG



- Deckel und Wanne justieren ohne Druck



- Verschluss des Deckels rastet hörbar in das Gegenstück an der Wanne ein

6. UNVERSEHRTE TRAGEGRIFFE



- Tragegriffe sind unversehrt und zeigen keine Beschädigungen auf

7. UNBESCHÄDIGTE STERILCONTAINER



- Nur unbeschädigte Sterilcontainer verwenden
- Beschädigte Teile sofort durch Originalersatzteile ersetzen oder reparieren (Aesculap Technischer Service)

8. KENNZEICHNEN UND VERPLOMBEN



- Sterilcontainer verschlossen
- Wahlweise mit Produktionsetikett verplombt oder Produktionsetikett und Kunststoffplombe angebracht

