



- Tecnologia a microfibra
- Veloce e delicato sui tessuti
- Per un letto della ferita e una cute limitrofa puliti
- Rimuove patine, batteri e biofilm
- Assorbe l'essudato della ferita
- Salvaguardia il tessuto intatto
- Uso indolore

Prontosan® Debridement Pad

DETERSIONE DI FERITE EFFICACE E DELICATA

Prontosan® Debridement Pad

DETERSIONE DI FERITE EFFICACE E DELICATA


Prontosan® Debridement Pad è stato sviluppato quale componente di supporto meccanico del sistema per la pulizia delle ferite Prontosan®.

Il tampone è composto da un lato detergente in microfibra e da uno strato assorbente sovrapposto. Il lato in microfibra rimuove patine, batteri e biofilm, mentre l'essudato in eccesso assorbito durante quest'operazione è accumulato nel lato esterno assorbente.

Il tampone ottiene buoni risultati anche su incrostazioni e patine necrotiche purché venga precedentemente attuata un'apposita fase di ammollo. Per questa sono idonei in particolare Prontosan® Soluzione detergente per ferite o Prontosan® Wound Gel / Prontosan® Wound Gel X.

FUNZIONAMENTO

Le microfibre sono in grado di legare a sé le particelle microscopiche e quindi di rimuoverle dal letto della ferita. Per contro i monofilamenti sono strutture molto grosse, che non sono in grado di assorbire, bensì solamente di «spazzolare via» le particelle. Le microfibre agiscono mediante forze adesive che attraggono le particelle, le assorbono nella loro struttura espletando così un'azione detergente delicata ma ugualmente efficace. Il gran numero di fibre garantisce una capacità assorbente elevata.

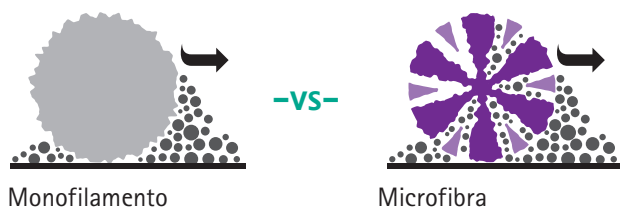

USO

Il lato non stampato del tampone deve venir inumidito con 15 – 20 ml di Prontosan® Soluzione detergente per ferite*. Questa operazione può essere effettuata nella confezione blister. Quindi, con movimenti circolari ed esercitando una leggera pressione, detergere la superficie della ferita con tale lato inumidito.

Dopo questa procedura di pulizia si raccomanda di sciacquare nuovamente con Prontosan® Soluzione detergente per ferite*, in modo da eliminare i residui di patina distaccati.

E' necessario prestare attenzione ad afferrare il tampone, mediante tecnica «non-touch», solo lateralmente lungo il bordo e per il retro stampato. La ferita non deve essere toccata con le mani.



Il lato largo del tampone deve essere usato per la pulizia di superfici estese.



Con il lato appuntito è possibile detergere zone della ferite strette, come piccole tasche ad es. sotto ai margini della ferita.

*Se per inumidire i tamponi non è disponibile Prontosan® Soluzione detergente per ferite, è possibile utilizzare qualsiasi altra soluzione detergente per ferite idonea.

PANORAMICA DEI PRODOTTI

Articolo	Unità	Cod. art.	Pharmacode
12 x 8.3 cm, forma a goccia	3 pezzi	3908456	7313096
12 x 8.3 cm, forma a goccia	10 pezzi	3908457	7313104

Composizione

Microfibre in poliestere / polipropilene, strato assorbente in propilene.
I tamponi sono confezionati singolarmente in maniera sterile.

B. Braun Medical SA | Hospital & Out Patient Market | Seesatz 17 | 6204 Sempach | www.bbraun.ch
Hospital Market: Tel. 0848 83 00 44 | Fax 0800 83 00 43 | sales-hospital.bbmch@bbraun.com
Out Patient Market: Tel. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32 | sales-opm.bbmch@bbraun.com