



- Mikrofaser-Technologie
- Schnell und gewebeschonend
- Für ein sauberes Wundbett und Wundumfeld
- Entfernt Wundbeläge, Keime und Biofilm
- Absorbiert Wundexsudat
- Schont intaktes Gewebe
- Schmerzarme Anwendung

Prontosan[®] Debridement Pad

EFFEKTIVE UND SANFTE WUNDREINIGUNG

Prontosan® Debridement Pad

EFFEKTIVE UND SANFTE WUNDREINIGUNG


Prontosan® Debridement Pad wurde als mechanisch unterstützende Komponente des Prontosan® Wundreinigungs-Systems entwickelt.

Das Pad besteht aus einer reinigenden Mikrofaserseite und einer darüber liegenden absorbierenden Schicht. Die Mikrofaserseite entfernt Wundbeläge, Keime und Biofilm, während das dabei aufgenommene überschüssige Wundexsudat in der absorbierenden Aussenseite gespeichert wird.

Das Pad erzielt auch bei Verkrustungen und nekrotischen Belägen gute Erfolge, wenn eine entsprechende Einweichphase vorausgegangen ist. Dazu eignen sich besonders Prontosan® Wundspüllösung oder Prontosan® Wound Gel/Prontosan® Wound Gel X.

DIE FUNKTION

Mikrofaser sind in der Lage, kleinste mikroskopische Partikel an sich zu binden und damit aus dem Wundbett zu entfernen. Im Gegensatz dazu sind Monofilamente sehr grobe Strukturen, die Partikel nicht aufnehmen können, sondern nur «wegbürsten». Mikrofasern funktionieren über adhäsive Kräfte, die die Partikel anziehen, in ihrer Struktur aufnehmen und damit eine sanfte und gleichermassen effektive Reinigungswirkung erzielen. Die grosse Anzahl der Fasern gewährleistet eine hohe Aufnahmekapazität.

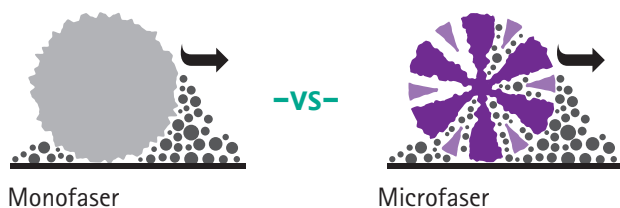

Monofaser

Microfaser

ANWENDUNG

Die unbedruckte Seite des Pads muss mit 15 – 20 ml Prontosan® Wundspüllösung befeuchtet werden*. Dies kann in der Blisterverpackung erfolgen. Anschliessend mit dieser befeuchteten Seite die Wundoberfläche mit leichtem Druck in zirkulären Bewegungen reinigen.

Nach diesem Reinigungsvorgang empfiehlt es sich, erneut mit Prontosan® Wundspüllösung zu spülen*, um restliche, gelöste Beläge zu entfernen.

Es ist darauf zu achten, dass das Pad gemäss der Non-Touch-Technik nur seitlich am Rand und an der bedruckten Rückseite angefasst wird. Die Wunde darf nicht mit den Händen berührt werden.



Die breite Seite des Pads sollte zur grossflächigen Reinigung eingesetzt werden.



Mit der spitzen Seite lassen sich schmale Wundbereiche sowie kleine Taschen z.B. unter dem Wundrand reinigen.

* Falls keine Prontosan® Wundspüllösung zum Tränken des Pads verfügbar ist, kann jede andere geeignete Wundspüllösung verwendet werden.

PRODUKTÜBERSICHT

Artikel	Einheit	Art.-Nr.	Pharmacode
12 x 8.3 cm, tropfenförmig	3 Stück	3908456	7313096
12 x 8.3 cm, tropfenförmig	10 Stück	3908457	7313104

Zusammensetzung

Mikrofaser aus Polyester/Polypropylen, absorbierende Schicht aus Propylen. Die Pads sind einzeln steril verpackt.