



NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

B. Braun SpaceStation et B. Braun Space Perfusor® / Infusomat®

B. Braun SpaceStation

Nettoyage et désinfection



Toutes les connexions électroniques et liaisons EDP doivent être débranchées du réseau électrique avant tout nettoyage ou toute désinfection de la SpaceStation.



Examiner la SpaceStation pour voir s'il existe des traces visibles de contamination et nettoyer avec un chiffon humide pré-imprégné mais NON mouillé. Jeter le chiffon après utilisation.

Notre recommandation : Meliseptol® Wipes sensitive ou Meliseptol® Foam pure prêts à l'emploi.



En cas de forte contamination, enlever le couvercle – déverrouiller le bouton de verrouillage et enlever le SpaceCover. Enlever les traces visibles de contamination sur le SpaceCover et le rail de guidage comme décrit ci-dessus. Jeter le chiffon après utilisation.

Afin d'améliorer le nettoyage/la désinfection, répéter l'étape de nettoyage et de désinfection



Aucun liquide ne doit entrer dans la ventilation et les connexions. Remettez le SpaceCover seulement après séchage complet du désinfectant et le verrouiller

Ensuite, réinsérez la pompe propre et désinfectée dans la SpaceStation et protégez l'unité de la contamination.

B. Braun Space Perfusor® / Infusomat®

Nettoyage et désinfection



Toutes les connexions électroniques doivent être débranchées du réseau électrique avant tout nettoyage ou toute désinfection.



Nettoyer/désinfecter toutes les faces de la pompe Space Infusion. Commencer par l'écran d'affichage et utiliser des lingettes prêtes à l'emploi ou un chiffon humidifié. Nettoyer avec un chiffon humidifié mais NON mouillé. Jeter le chiffon après utilisation.

Notre recommandation : Meliseptol® Wipes sensitive ou Meliseptol® Foam pure prêts à l'emploi.



Pour nettoyer le câble flexible de l' Infusomat® Space et du Perfusor® Space, nous recommandons d'utiliser Meliseptol® Foam pure. Nettoyer avec un chiffon en coton non pelucheux.



Aucun liquide ne doit entrer dans la ventilation et les connexions. Ne remettez les pompes dans la station ou support qu'après le séchage complet du désinfectant (voir le plan de nettoyage de la SpaceStation). Protégez l'unité de la contamination.

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

B. Braun SpaceStation et B. Braun Space Perfusor® / Infusomat®

Afin d'assurer la sécurité du patient ainsi qu'un fonctionnement correct, nettoyer/désinfecter l'appareil après chaque contamination et après chaque traitement réalisé sur un patient.

NOTE

- Pour le nettoyage et la désinfection, nous recommandons l'utilisation d'agents nettoyants/désinfectants Meliseptol® Wipes sensitive ou Meliseptol® Foam pure de B. Braun.
- En cas de forte contamination ne pouvant être enlevée à l'aide de la méthode décrite plus haut, veuillez contacter le service technique de la clinique.
- Veiller à respecter les plans et mesures d'hygiène de la clinique.
- Lire les instructions d'utilisation avant d'utiliser le dispositif.

CONDITIONNEMENT COMMERCIAL/DUREE DE CONSERVATION

Meliseptol® Wipes sensitive	N° art.	Durée	Taille	Wipes
Boîte distributrice	19582	2 ans	15.2 cm x 20 cm	60 pcs
Pack de recharges	19530	2 ans	15.2 cm x 20 cm	60 pcs
100 Flow pack	19894	2 ans	18 cm x 20 cm	100 pcs
XL Flow pack	19893	2 ans	24 cm x 30 cm	42 pcs



Meliseptol® Foam pure	N° art.	Durée
Pulvérisateur 750 ml	19796	3 ans
Bidon 5 litres	19288	3 ans



B. Braun Medical SA | Hospital & Out Patient Market | Seesatz 17 | 6204 Sempach | www.bbraun.ch
Hospital Market: Tél. 0848 83 00 44 | Fax 0800 83 00 43 | sales-hospital.bbmch@bbraun.com
Out Patient Market: Tél. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32 | sales-opm.bbmch@bbraun.com