

Uso di Fluo-Add

SOLUZIONE FLUORESCENTE PER LA FORMAZIONE SULLA DISINFEZIONE DELLE MANI



1 Aprire i flaconi



2 Prelevare 1 ml di Fluo-Add



3 Versare il Fluo-Add prelevato in 100 ml di disinfettante per le mani



4 Chiudere il coperchio e agitare bene. La soluzione di prova è ora pronta per la sessione di formazione e può essere utilizzata immediatamente.



5 Affiggere l'etichetta sulla soluzione preparata per la formazione. **Il liquido può essere utilizzato soltanto ai fini della prova!**