


Infusomat[®] plus tubulure - poster d'utilisation

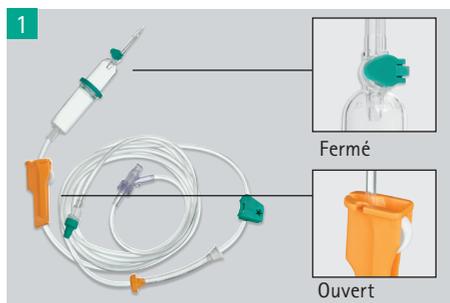

Retirer le matériel de perfusion de son emballage :

- Valve d'aération fermée
- Pince à roulette ouverte



- Percer le récipient de solution de perfusion en position verticale (par ex. flacon en verre, Ecoflac[®], etc.)
- Fermer la pince à roulette



- Régler le niveau de liquide :
- Remplir la chambre compte-gouttes jusqu'à l'anneau vert
 - Ensuite, encliqueter contre la partie inférieure de la chambre compte-goutte



- Ouvrir la pince à roulette
- Purger manuellement la tubulure



- Démarrer l'appareil et attendre le test automatique
- Ouvrir la porte de la pompe en tirant le levier vers l'avant



(Attention: de gauche à droite)

- 1 Mettre en place la tubulure
Infusomat[®] plus : introduire la pince de sécurité verte dans le port vert puis appuyer (→ CLIC)
- 2 Placer le clip orange dans l'ouverture orange de la pompe
- 3 Pousser la tubulure de perfusion dans l'encoche à gauche et à droite vers l'arrière



- Fermer la porte de pompe à l'aide des deux mains en utilisant le levier tiré
- Suivre les indications à l'écran, **OUVRIRE LA PINCE À ROULETTE**
- Valider par OK. La pompe réalise un calibrage
- Suivre les indications à l'écran

B. Braun Medical SA | Hospital & Out Patient Market | Seesatz 17 | 6204 Sempach | www.bbraun.ch
Hospital Market : Tél. 0848 83 00 44 | Fax 0800 83 00 43 | sales-hospital.bbmch@bbraun.com
Out Patient Market : Tél. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32 | sales-opm.bbmch@bbraun.com