



Linea infusionale Infusomat[®] plus – Poster manipolazione

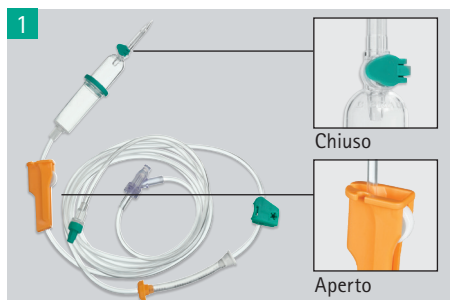

Prelevare il deflussore dalla confezione:

- Dispositivo di aerazione chiuso
- Morsetto a rulli aperto

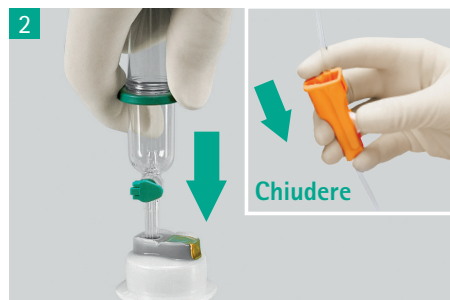

- Perforare il contenitore della soluzione da infusione posto in verticale (ad es. flacone in vetro, Ecoflac[®], ecc.)
- Chiudere il morsetto a rulli



Regolare il livello del liquido:

- Riempire la camera di gocciolamento fino all'anello verde
- Dopo il riempimento manipolare la parte inferiore della camera di gocciolamento



- Aprire il morsetto a rulli
- Sfiatare manualmente la linea



- Accendere il dispositivo e attendere il test di autodiagnostica
- Aprire lo sportellino della pompa tirando in avanti la levetta



(Attenzione: da sinistra a destra)

- 1 Inserimento della linea infusionale Infusomat[®]Plus : Inserire il morsetto di sicurezza verde nell'alloggiamento verde premendo saldamente (→ CLIC)
- 2 Inserire la clip color arancione nell'apertura arancione della pompa
- 3 Spingere indietro la parte destra e sinistra della linea di infusione in modo che vada a inserirsi nella scanalatura



- Chiudere lo sportellino della pompa, a levetta estratta, usando entrambe le mani
- Seguire le istruzioni sullo schermo, **APRIRE IL MORSETTO A RULLI**
- Confermare con OK. La pompa eseguirà una calibrazione
- Seguire le istruzioni sullo schermo