

HÄNDE-
HYGIENE



SCHULUNG FÜR DIE HÄNDEHYGIENE

ZUR ÜBERPRÜFUNG DER KORREKTEN EINREIBETECHNIK

LiteCheck UV


ZUR ÜBERPRÜFUNG DER KORREKTEN EINREIBETECHNIK

B. Braun präsentiert LiteCheck UV, ein Instrument im praktischen Aktenordnerformat, das gemeinsam mit Ihrem Händedesinfektionsmittel und dem fluoreszierenden Fluo-Add zur Händehygiene-schulung dient. Die Testlösung wird wie folgt hergestellt: Mit einer Pipette 1 ml Fluo-Add zu 100 ml Händedesinfektionsmittel zugeben. Deckel schliessen und gut schütteln. Somit ist die Testlösung bereit für die Schulung. Das Produkt kann sofort eingesetzt werden.


Nachdem die Hände mit der zubereiteten Testlösung eingerieben wurden, zeigt LiteCheck mithilfe von UV-Licht jene Bereiche der Hände an, die nicht mit der Lösung bedeckt sind. Hautstellen, welche nicht genügend mit der Flüssigkeit eingerieben wurden, bleiben dunkel. In diesen Bereichen können Keime überleben. Nach einer korrekten und lückenlosen Anwendung hingegen leuchten die Hände durchgehend blau.

ANWENDUNGSMÄNGEL

Mangelnde Benetzung auf den Handrücken nach der Händedesinfektion (in Prozent)¹

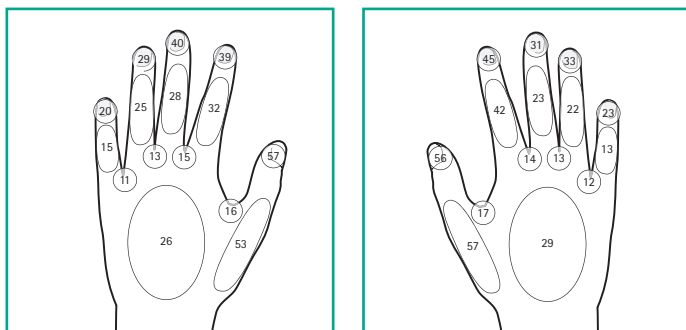

Mangelnde Benetzung auf den Handflächen nach der Händedesinfektion (in Prozent)¹

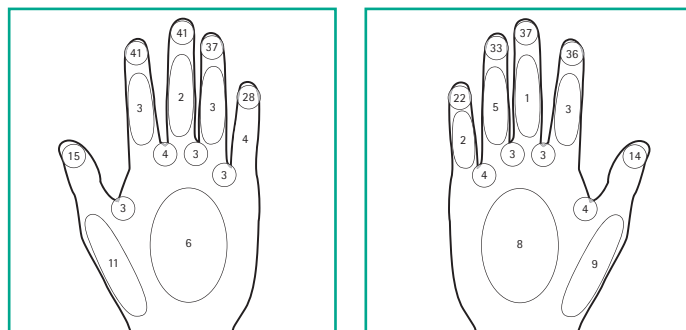

1) O. Buchrieser, G. Neuhold, A. Kristl, V. Buchrieser, T. Miorini, Incomplete wetting as a weak point of performing hygienic hand disinfection, Hyg Med, 12, 672 (1996)

VORTEILE

- Erhöht die Compliance und verbessert die Einreibetechnik
- Unterstützt eine korrekte Händedesinfektion
- Verbessert den Lernerfolg
- Sichere UV-Technologie
- Hervorragende Licht- und Kontrastleistung in Kombination mit Ihrem Händedesinfektionsmittel und Fluo-Add
- Rasch installiert und innert Sekunden anwendungsbereit
- Praktisch, leicht und stets zur Hand

PRODUKT	ART.-NR.	PHARMACODE
B. Braun Litecheck UV inkl. Fluo-Add 100 ml	3908469	7078695
Fluo-Add Flasche 100 ml	180127	7748785



B. Braun Medical AG | Hospital & Out Patient Market | Seesatz 17 | 6204 Sempach | www.bbraun.ch
 Hospital Market: Tel. 0848 83 00 44 | Fax 0800 83 00 43 | sales-hospital.bbmch@bbraun.com
 Out Patient Market: Tel. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32 | sales-opm.bbmch@bbraun.com