

PROTEZIONE DA
LESIONI DA
PUNTURA D'AGO

Sterican® Safety

AGHI MONOUSO CON MECCANISMO DI SICUREZZA



STERICAN® SAFETY

AGHI MONOUSO CON MECCANISMO DI SICUREZZA

PER UNA MAGGIORE SICUREZZA

- Uso semplice e intuitivo
- L'attivazione del meccanismo di sicurezza è confermata a livello tattile, visivo e uditivo
- Il meccanismo di sicurezza si può azionare subito dopo l'uso con una sola mano e avvolge l'ago irreversibilmente
- Smaltimento senza complicazioni negli appositi contenitori per aghi



MECCANISMO DI SICUREZZA

- A seconda della grandezza dello scudo di protezione, l'ago si blocca irreversibilmente fino a tre posizioni
- L'attivazione è confermata a livello tattile, visivo e uditivo



1



2

Attivazione del meccanismo di sicurezza

1 Attivare il meccanismo di sicurezza premendo lo scudo di protezione contro una superficie adeguatamente piana e rigida finché non si sente un «clac» a conferma del blocco dell'ago.

2 Se non si hanno superfici a disposizione, premere con il pollice o l'indice sulla superficie strutturata dello scudo di protezione finché non si avverte il blocco dell'ago, confermato da un «clac» udibile. Attivare il meccanismo di sicurezza sempre evitando di rivolgere l'ago verso di sé o altre persone.





AGO

- Qualità Sterican® originale B. Braun:
Ago a parete sottile in acciaio al nichel-cromo con affilatura e leggero rivestimento in silicone per una puntura indolore
- Orientamento «bevel up» della punta aperta quando lo scudo di protezione dell'ago è posizionato sopra la camicia della siringa
- Compatibile con le siringhe Luer Lock e Luer in commercio



SCUDO DI PROTEZIONE DELL'AGO

- Lo scudo di protezione avvolge l'ago irreversibilmente dopo l'attivazione
- Lo scudo di protezione si può attivare con una sola mano
- Lo scudo di protezione si può rovesciare all'indietro con un solo gesto e rimane nella posizione in cui viene regolato



CONFEZIONE SINGOLA

- In comode confezioni singole – non è necessario separare i pezzi

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Sterican® Safety	Gauge	Ø esterno mm	Lunghezza		Scudo di protezione dell'ago	Pharmacode	Cod. art.
			mm	pollici			
	G 30	0.30	13	1/2	corto	7743318	4670002S-01
	G 27	0.40	13	1/2	corto	7743319	4670005S-01
	G 26	0.45	13	1/2	corto	7743320	4670008S-01
	G 25	0.50	16	5/8	corto	7743321	4670012S-01
	G 24	0.55	25	1	lungo	7743322	4670022S-01
	G 23	0.60	30	1 1/4	lungo	7743323	4670027S-01
	G 22	0.70	30	1 1/4	lungo	7743324	4670032S-01
	G 21	0.80	40	1 1/2	lungo	7743325	4670045S-01
	G 20	0.90	40	1 1/2	lungo	7743326	4670050S-01
	G 19	1.10	40	1 1/2	lungo	7743327	4670052S-01
	G 18	1.20	40	1 1/2	lungo	7743328	4670055S-01

Confezione da 100 pezzi

B. Braun Medical SA | Hospital & Out Patient Market | Seesatz 17 | 6204 Sempach | www.bbraun.ch
 Hospital Market: Tel. 0848 83 00 44 | Fax 0800 83 00 43 | sales-hospital.bbmch@bbraun.com
 Out Patient Market: Tel. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32 | sales-opm.bbmch@bbraun.com