



- Hautfreundliche Klebefläche
- Anatomisch geformt
- Doppeltes Verbindungs-Outlet


Urinocol® Pädiatrie

LATEX- UND PVC-FREIE URINENTNAHME-BEUTEL

SCHLUSS MIT LATEXALLERGIEN

Urinocol® Pädiatrie ist ein latex- und PVC-freier Urinentnahmebeutel für Babys und Frühgeborene. Der geschlossene Beutel eignet sich speziell für die einfache Entnahme von Urinproben zu anschließenden Laboruntersuchungen. Der offene Beutel ermöglicht ein Diurese-Management über mehrere Stunden. Dank dem zweifachen Verbindungs-Outlet kann eine schnelle Urinentnahme mit der Spritze auch während dem Diurese-Management erfolgen.


MIT DOPPELTEM VERBINDUNGS-OUTLET

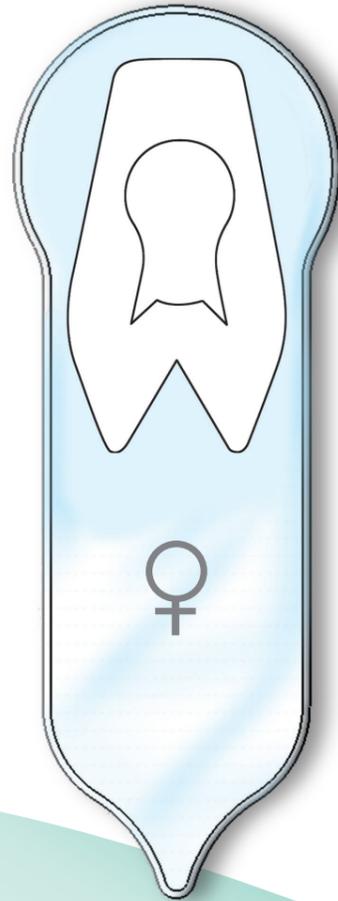

URINPROBE-BEUTEL FÜR LABOR-UNTERSUCHUNGEN



URINSAMMELBEUTEL FÜR DIURESE-MANAGEMENT

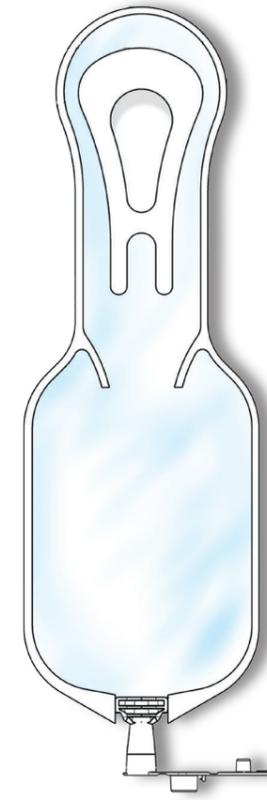


URINPROBE-BEUTEL FÜR FRÜHGEBURTEN



- Keine Latexallergien mehr
- Äusserst hautfreundlich






Ideale Passform für ♀ und ♂

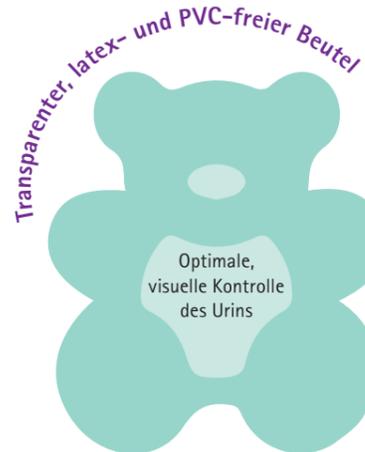

Wichtige Anwendungshinweise vor dem Aufkleben

- Die Haut muss **sauber, trocken und fettfrei** sein
- **Keine Babyfeuchttücher** verwenden
- **Keine Pflegesalben** für Babys verwenden
- **Kein Babypuder** verwenden

PRODUKTÜBERSICHT

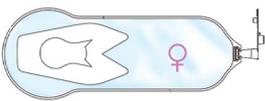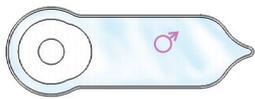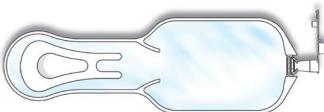ARTIKEL	GEWICHT	EINHEIT	ART.-NR.	PHARMACODE		
Urinocol® Pädiatrie steril, offen mit Outlet						
		Boy	> 2500 g	50	227546A	3535322
		Girl	> 2500 g	50	227566A	3534966
Urinocol® Pädiatrie steril, geschlossen						
		Boy	> 2500 g	100	227550A	3534972
		Girl	> 2500 g	100	227560A	3534995
Urinocol® Pädiatrie Frühgeborene, steril						
		Standard	1200 – 2500 g	50	227571A	3534989
		Mini	< 1200 g	50	227570A	3534937

B. Braun Medical AG | Hospital & Out Patient Market | Seesatz 17 | 6204 Sempach | www.bbraun.ch
 Hospital Market: Tel. 0848 83 00 44 | Fax 0800 83 00 43 | sales-hospital.bbmch@bbraun.com
 Out Patient Market: Tel. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32 | sales-opm.bbmch@bbraun.com