



Dossier d'information Euro Pharmat

DISPOSITIF MEDICAL

Flexima® 3S fermée

Remarque : Selon le dispositif médical (DM) concerné, ce dossier concernera une référence, un type ou une famille de DM

1. Renseignements administratifs concernant l'entreprise		Date de mise à jour : 02/04/2020
1.1	Nom : B. BRAUN MEDICAL SAS	
1.2	Adresse complète : 26 Rue Armengaud 92 210 Saint-Cloud FRANCE	Tel : 01 41 10 53 00 Fax : 01 70 83 45 00 e-mail : infofrance@bbraun.com Site Internet : http://www.bbraun.fr
1.3	Coordonnées du correspondant matériovigilance : Manuelle SCHNEIDER-PONSOT	Tel : 01 41 10 53 00 Fax : 01 70 83 44 95 E-Mail : vigilance_qualite.fr@bbraun.com

2. Informations sur dispositif ou équipement	
2.1	Dénomination commune : Poche colostomie et supports poches colostomie
2.2	Dénomination commerciale : Flexima® 3S poches fermées et supports
2.3	Code nomenclature : Code CLADIMED : A57DA02 Poche colostomie deux pièces A57EA01 supports poches recueil
2.4	Code LPPR* (ex TIPS si applicable) : cf. tableau p.3 * Dispositifs médicaux de classe I pris en charge en ville au titre I de la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR) prévue à l'article L165-1 du code de la Sécurité Sociale. Pour les conditions de prise en charge, se reporter au site ameli.fr .
2.5	Classe du DM : I Directive de l'UE applicable : 93/42/CEE Selon Annexe n° VII Numéro de l'organisme notifié : NA Date de première mise sur le marché dans l'UE : Avril 2013 Fabricant du DM : B. BRAUN MEDICAL SAS 26 Rue Armengaud 92210 Saint-Cloud FRANCE

2.6 Descriptif du dispositif :

Poche fermée et support, appareillage 2-pièces à couplage mécanique


Poche

- Voilé non-tissé
- Forme ergonomique




Filtre laminaire

- Le filtre laminaire avec membrane imperméable aux liquides mais perméable aux gaz

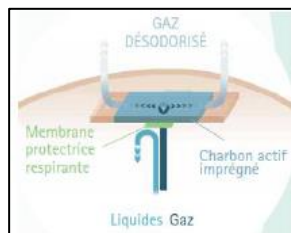

Le couplage

- Mise en place en 3 étapes
- Guide de pose avec 3 fentes pour pouvoir orienter la poche selon les besoins (1)
- Anneau flottant qui permet de passer l'index sous l'anneau du support pour l'emboîtement des 2 anneaux
- Fermeture finale avec les boutons de sécurité (3)
- Possibilité de mettre une ceinture : 3 positions possible (2)

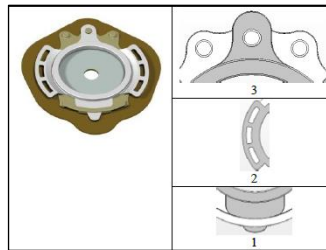

2.7 Références Catalogue :

Références poches

Ø	Taille	Poches Beiges			Poches Transparentes		
		Références	Code LPPR fabricant	GTIN	Références	Code LPPR fabricant	GTIN
45 55 65	Midi	931045FR 931055FR 931065FR	6156520	4046955576210 4046955576241 4046955576272			
45 55 65 80	Maxi	931445FR 931455FR 931465FR 931480FR	6156520	4046955576456 4046955576487 4046955576517 4046955576548	931545FR 931555FR 931565FR 931580FR	6156520	4046955576579 4046955576609 4046955576630 4046955576661

UCD (Unité de Commande) : 1 paquet

CDT (Multiple de l'UCD) : 30 pièces

QML (Quantité minimale de livraison) : 1 paquet

Références supports plan

	Ø(mm)	Références	Code LPPR fabricant	GTIN
Support plan	45/15-30	936415FR	6157062	4046955577590
	45/20	936420FR		4046955577620
	45/25	936425FR		4046955577651
	45/30	936430FR		4046955577682
	55/15-40	936515FR		4046955577712
	55/35	936535FR		4046955577774
	55/40	936540FR		4046955577804
	65/15-50	936615FR		4046955577835
	65/45	936645FR		4046955577897
	80/15-65	936815FR		4046955577927

UCD (Unité de Commande) : 1 paquet

CDT (Multiple de l'UCD) : 10 pièces

QML (Quantité minimale de livraison) : 1 paquet

	Ø(mm)	Références	Code LPPR fabricant	GTIN
Support convexe	45/15-26	937415FR	6157079	4046955577958
	45/25	937425FR		4046955577989
	55/15-36	937515FR		4046955578016
	55/30	937530FR		4046955578047
	65/15-46	937615FR		4046955578078

UCD (Unité de Commande) : 1 paquet

CDT (Multiple de l'UCD) : 5 pièces

QML (Quantité minimale de livraison) : 1 paquet

2.8	Composition du dispositif et Accessoires :	
	Composants	Matériaux
	1/ Poche de recueil	
	Poche de recueil	<ul style="list-style-type: none"> Film : film protecteur multicouche (chlorure de vinyle/EVA/PE chloré) Non tissé : microfibre polyéthylène Poches beiges : 2 films beiges et 2 non-tissés de chaque côté Poches transparentes : film beige opaque et non tissé beige du côté du protecteur cutané, film transparent sur l'autre côté
	Filtre laminaire HP	<ul style="list-style-type: none"> Bande de mousse en polyuréthane imprégnée de charbon actif, complément scellé (film EVA/PP/EVA). L'entrée des gaz est protégée par une membrane (en PE) imperméable aux liquides
	Système de couplage (=anneau poche)	<ul style="list-style-type: none"> Copolymère d'éthylène – Vinyl acétate (EVA)
	Obturbateur adhésif	<ul style="list-style-type: none"> Polyéthylène
	2/ Support	
	Interface adhésive (gomme)	<ul style="list-style-type: none"> Protecteur cutané total : hydrocolloïdes, résines et élastomères
	Protecteur cutané	<ul style="list-style-type: none"> Gomme Film protecteur siliconé (film à retirer) Film protecteur transparent
	Système de couplage (anneau)	<ul style="list-style-type: none"> Anneau de couplage : polyéthylène injecté (PEBD) Film anneau flottant : film multicouche transparent (PEBD) avec bords débordants
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Absence de latex/PVC ✓ Absence de phtalates (DEHP) ✓ Absence de produit d'origine animale ou biologique 	
Dispositifs et accessoires associés à lister. N/A		
2.9	Domaine – Indications :	
Domaine d'utilisation (selon liste Europharmat) : Digestif		
Indications (selon liste Europharmat) : Colostomie		

3. Procédé de stérilisation :	
	DM stérile : NON
	Mode de stérilisation du dispositif : N/A

4. Conditions de conservation et de stockage	
	La date de péremption des poches et des supports est de 3 ans
	Conserver à l'abri de la chaleur
	Conserver dans un endroit sec

5. Sécurité d'utilisation	
5.1	Sécurité technique : N/A
5.2	Sécurité biologique (s'il y a lieu) : N/A

6. Conseils d'utilisation	
6.1	Mode d'emploi : cf. notice en annexe
6.2	Indications : Poche fermée et support d'appareillage 2 pièces pour le recueil des effluents pour patient ayant subi une dérivation de type colostomie
6.3	Précautions d'emploi : N/A
6.4	Contre- Indications : N/A

7. Informations complémentaires sur le produit	
	Bibliographie, rapport d'essais cliniques, ou d'études pharmaco-économiques, amélioration du service rendu : recommandations particulières d'utilisation (restrictions de prise en charge, plateau technique, qualification de l'opérateur, etc) ... : N/A

8. Liste des annexes au dossier : Notice d'utilisation – Etiquetage	
<p>FR Mode d'emploi</p> <p>Le système de recueil 2 pièces pour patients entérostomisés ou urostomisés est composé :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ D'un support plan > une surface adhésive principalement composée d'hydrocolloïdes pour Flexima® 3S / Softima® 3S (A), ou composée d'hydrocolloïdes et d'un adhésif protecteur en non tissé Flexima® 3S / Softima® 3S avec renfort acrylique (A'); et un anneau pour coupler la poche; ■ D'un support convexe > une surface adhésive principalement composée d'hydrocolloïdes pour Flexima® 3S / Softima® 3S (A) et un anneau pour coupler la poche; ■ De différents types de poches* : > Fermées > Vidables avec un système de clamp souple intégré « Roll'Up » ou avec bouchon vidable Haut débit, connectable à une poche de recueil à distance; > Vidangeables (pour urostomies) munies d'un bouchon de vidange connectable à une poche de nuit. <p>L'originalité de ce système réside dans le guide de mise en place du système mécanique de couplage semi-souple, qui confère au produit une facilité d'utilisation accrue.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Avant la mise en place du support <ul style="list-style-type: none"> ■ Découpez le protecteur cutané à la taille de votre stomie (A) à l'aide de la cible de découpe, en respectant la découpe maximum possible et en ménageant toujours 2 à 3 mm autour de votre stomie : elle ne doit pas être étranglée par le support. 2 Préparation de la peau <ul style="list-style-type: none"> ■ Nettoyez la zone péristomiale doucement à l'eau tiède. L'éther, l'alcool ou tout autre antiseptique peuvent empêcher la bonne tenue du support et sont donc à bannir. ■ Séchez soigneusement par tamponnements. 3 Mise en place du support <ul style="list-style-type: none"> ■ Enlevez le revêtement protecteur. ■ Placez le support autour de votre stomie en prenant garde à placer les 3 boutons de sécurité vers le haut (B). ■ Faites soigneusement adhérer le protecteur cutané sur la peau. 4 Mise en place de la poche (fermée et vidable) <ul style="list-style-type: none"> ■ Vérifiez que le robinet des poches uro est fermé. ■ Séparez les parois de la poche en la froissant légèrement afin d'y faire pénétrer de l'air; ■ Saisissez la poche par les ailettes latérales (C); ■ Insérez la languette du guide de positionnement situé en bas de l'anneau de couplage de la poche dans l'une des fentes en bas de l'anneau du support (en fonction de l'orientation que vous souhaitez donner à votre produit) (D); ■ Engagez l'emboîtement des deux anneaux en commençant par le bas et en appuyant sur les deux anneaux (E1, E2). Il est possible de passer les pouces sous l'anneau du support pour avoir une meilleure prise et éviter ainsi l'appui sur l'abdomen. Cette opération doit être faite en douceur pour éviter toute perforation involontaire du film qui se trouve sous l'anneau de couplage du support (F); ■ Finalisez le couplage des deux anneaux en procédant de manière progressive du bas vers le haut sur tout le pourtour (G); ■ Clipez la languette supérieure de la poche sur le bouton du support correspondant (H). 5 Retrait de la poche <ul style="list-style-type: none"> ■ Déclipez la languette supérieure de la poche (I); ■ Séparez les deux anneaux en tirant doucement sur la languette supérieure de la poche de haut en bas (J1, J2); ■ Nettoyez le support si nécessaire à l'aide d'un tissu ou une 	

serviette en matière non pelucheuse.

6 Utilisation des obturateurs adhésifs sur le filtre
 Avant de prendre une douche ou un bain, bouchez l'évent d'évacuation des gaz du filtre. Pour cela, collez une pastille adhésive sur les orifices (M).

> Les orifices sont situés sur le même côté de la poche.

7 Poche vidable

Poche vidable avec clamp intégré Roll'Up :

■ Fermeture du manchon de vidange :

> Repliez quatre fois le manchon en vous servant de l'indicateur de pli et rabattez la languette;

> Appliquez une pression sur les deux bandes auto-agrippantes qui se font face pour fermer hermétiquement la poche.

■ Vidange de la poche :

> Positionnez-vous pour effectuer la vidange, détachez les deux bandes auto-agrippantes et déroulez le manchon. Attention, la vidange débute à ce moment. Pour ouvrir complètement le bas du manchon, placez vos doigts de chaque côté des languettes blanches (K1).

> La vidange achevée, expulsez au maximum les matières qui pourraient encore se trouver dans le manchon, en le pressant légèrement du haut vers le bas. Nettoyez soigneusement son extrémité (attention ne pas utiliser de matière pelucheuse) (K2).

> Puis refermez la poche.

Veillez noter que le manchon, une fois fermé est dissimulé sous le non-tissé (K3).

Poche vidable Haut Débit :

■ Pour vider votre poche, retirez le capuchon en le tirant droit et dirigez l'ouverture de la poche dans la cuvette des toilettes (N-O-P). Après la vidange,

nettoyez avec du papier toilette et refermez au moyen du bouchon. (Q)

■ En cas de besoin, la poche peut être connectée à une poche de recueil de plus grande capacité (Flow Collector).

8 Poche vidangeable (uro)

Manipulation du robinet de vidange :

■ Dirigez le système de vidange dans la cuvette des toilettes, faites tourner doucement le bouchon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à obtenir la vitesse d'écoulement désirée (L1).

■ Pour refermer le bouchon une fois la poche vidée, tournez le bouchon jusqu'à sa position initiale dans le sens des aiguilles d'une montre (L2).

Connexion à une poche de nuit ou de jambe:






■ Raccorder le bouchon de la poche à la poche de nuit ou de jambe via le connecteur fourni. Ouvrir le robinet de la poche vidangeable pour permettre l'écoulement des urines. Refermer le robinet avant la déconnexion de la poche de recueil.

NB: Si vous souhaitez utiliser une ceinture, veillez à utiliser 2 encoches diamétralement opposées.

* La disponibilité peut être différente d'un pays à un autre.

Les réglementations nationales pour la destruction des matériaux potentiellement infectieux doivent être observées.

9. Images (s'il y a lieu)




Flexima® 3S			REF 931045FR
30	Ø 45 mm	6156520	DIGESTIF, POC REC. MAT. FÉCALES, SS SUPP (2 PC). NON-VID. B/30,B.BRAUN MEDICAL
Système 2 pièces, poche fermée Midi beige			
 LOT 000000	 0000-00	Plant n° 000000	V181219
(01) 04046955576210 (17) 000000 (10) 000000			






Dossier d'information Euro Pharmat

DISPOSITIF MEDICAL

Flexima® 3S

Système 2 pièces, poche fermée Midi beige

<p>REF 931045FR</p> <p>12 x 30</p>  <p>(01)04046955576227(17)000000(10)000000</p> <p>B BRAUN</p> <p style="font-size: small;">V120819</p> <p style="font-size: x-small;">B. BRAUN MEDICAL SAS 26 Rue Armengaud 92210 Saint-Cloud FRANCE</p>	<p>LOT 000000</p> <p> 0000-00</p> <p> CE</p>
--	--

Flexima® 3S		 6157062	REF 936415FR
10	\varnothing 45 mm  15-30 mm	COLLECTEUR, SUPPORT POCHE D'UROSTOMIE OU REC MAT FECAL STD B/10,B.BRAUN MEDICAL	
Système 2 pièces, support standard, à découper			 (01)04046955577590(17)000000(10)000000
LOT 000000  0000-00 Plant n° 000000		V161219	

Dossier d'information Euro Pharmat

DISPOSITIF MEDICAL

Flexima® 3S

Système 2 pièces, support standard, à découper

REF 936415FR

20 x 10



(01)04046755577606(17)000000(10)000000

B | BRAUN

V120019

B. BRAUN MEDICAL SAS
26 Rue Armengaud
92210 Saint-Cloud
FRANCE

LOT 000000



0000-00



CE