

# EZCOVER® Kurzanleitung

## Generisches Ultraschallbezug-Set



1 Beutel öffnen und Set auspacken



2 Mittelfalte der Schutzhülle lokalisieren – dazu nach dem Aufkleber «Hand here» suchen



3 Hand in den Ultraschallbezug stecken



4 a Eine geringe Menge des sterilen Gels entweder auf die Schutzhülle (a) oder auf den Schallkopf (b) geben



5 a Den Ultraschallkopf (a\*) aufnehmen oder sich reichen lassen (b)  
\*Hinweis: «Probe here» nur bei STOP-Modellen sichtbar



6 Den Bezug über den Schallkopf und das Kabel ziehen (Aufkleber «Pull here»)



7 Mithilfe der Gummibänder fixieren



8 Time-out durchführen und den Aufkleber abziehen (nur bei den STOP-Modellen)



9 a Für klare Ultraschallbilder darauf achten, dass sich unter dem Ultraschallbezug keine Luftblasen befinden