



# Urimed<sup>®</sup> Vision Étui pénien

Améliorez la qualité de vie de vos patients souffrant d'incontinence urinaire


Dans votre quotidien professionnel, vous rencontrez souvent des patients souffrant d'incontinence urinaire – une maladie qui peut avoir des répercussions importantes sur le système de santé et également sur la qualité de vie des patients.



## Le saviez-vous ?

**423 millions**  
de personnes dans le monde souffrent  
d'incontinence urinaire.<sup>1</sup>

Seuls **22 %**

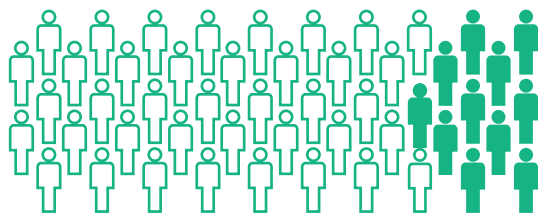

des hommes concernés  
**consultent un médecin**  
pour leurs symptômes.<sup>2</sup>

L'incontinence non traitée peut entraîner des frais d'hospitalisation et de santé considérables :

1,4 à 2,1 hommes sur 100.000 atteints d'incontinence urinaire sont **hospitalisés entre 3,0 et 4,2 jours.**<sup>3</sup>

Les coûts annuels pour les personnes avec une incontinence urinaire à domicile sont estimés à **7,1 milliards de dollars américains.**<sup>3</sup>



L'étui pénien **Urimed® Vision** peut vous aider, ainsi que vos patients, à faire face à l'incontinence urinaire et donc améliorer la qualité de vie de vos patients.



**Une étude clinique a démontré des améliorations de la qualité de vie en lien avec les étuis pénien :**

- Les étuis pénien exercent une influence positive prouvée sur la qualité de vie des hommes avec une incontinence modérée à sévère.<sup>4</sup>
- Les patients préfèrent les étuis pénien aux protections.<sup>4</sup>

# Urimed<sup>®</sup> Vision

Une gestion efficace de l'incontinence pour une vie active

L'étui pénien Urimed<sup>®</sup> Vision est facile à utiliser, efficace et fiable.

Il peut être utilisé de manière tout aussi efficace pour soutenir vos patients lors d'une thérapie en milieu hospitalier ainsi qu'à domicile.



## Avantages

### Moins de risques de fuites urinaires et d'accumulation d'urine

- Grâce à un pouvoir adhésif équilibré, le produit ne glisse pas
- La protection anti-plies à la tige améliore l'écoulement et empêche l'engorgement de l'urine

### Matériau respectueux de la peau

- La haute tolérance cutanée du silicone réduit les réactions allergiques.<sup>5</sup>
- Le matériau entièrement transparent permet de surveiller facilement l'état de la peau

### Système efficace d'ajustement et de sélection de la taille

- La carte de mesures fournie facilite la détermination de la bonne taille du produit
- Différentes longueurs et diamètres pour un maintien optimal

### Une utilisation fiable au quotidien

- Autonomie du patient jusqu'à 24 heures
- Possibilité de raccordement à des poches Urimed<sup>®</sup>.



### Puissant


Par rapport aux produits comparables sur le marché Urimed® Vision montre :

### D'excellents résultats en termes de

- perméabilité à la vapeur d'eau pour une meilleure aération de la peau
- adhérence pour un risque de fuite réduit
- épaisseur des bords pour un meilleur confort

## Un emballage astucieux pour une utilisation facile


Carte de mesures inclus pour déterminer la bonne taille du produit

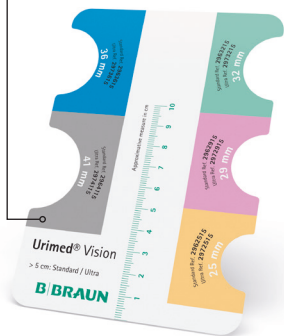

30 unités par boîte avec emballage blister individuel




Y compris un tissu lavable pour tous les utilisateurs qui ne retirent pas les poils intimes au préalable

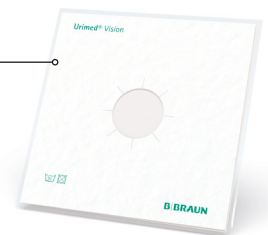




# Choisir le bon étui pénien

Choisissez l'Urimed® Vision qui vous convient

- 1** Déterminez la longueur et le diamètre avec la carte de mesures fourni

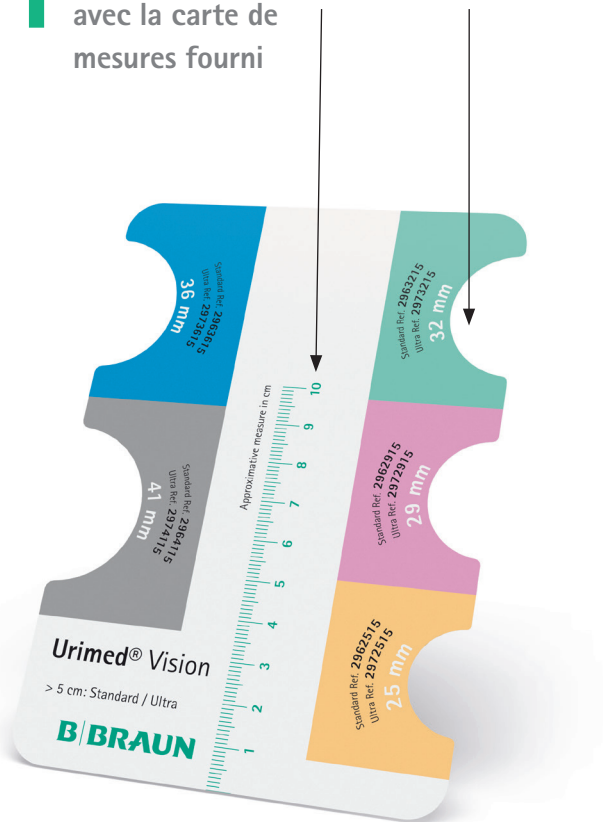


- 2** choisissez le produit adapté en fonction de vos résultats de mesure

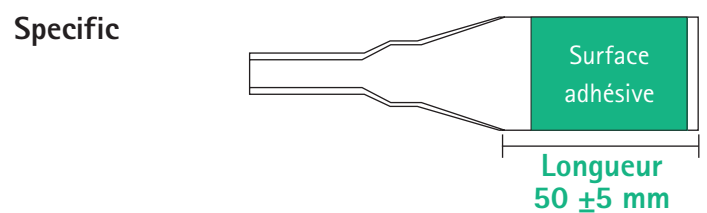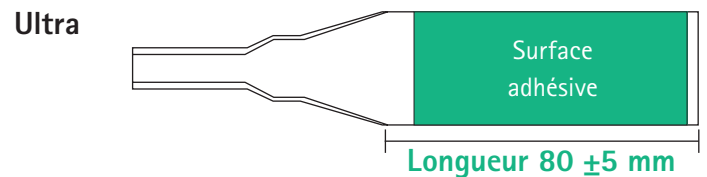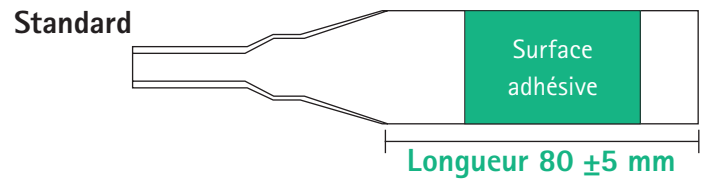

- 3** Choisissez la taille appropriée




25 mm

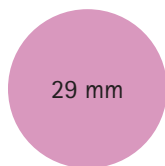

29 mm



32 mm

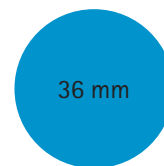

36 mm



41 mm

## Références

- 1 Irwin DE, Kopp ZS, Agate B, Milsom I, Abrams P. Worldwide prevalence estimates of lower urinary tract symptoms, overactive bladder, urinary incontinence and bladder outlet obstruction. *BJU Int.* 2011 Oct;108(7):1132-8. doi: 10.1111/j.1464-410X.2010.09993.x. Epub 2011 Jan 13. PMID: 21231991.
- 2 Shamlivan TA, Wyman JF, Ping R, Wilt TJ, Kane RL. Male urinary incontinence: prevalence, risk factors, and preventive interventions. *Rev Urol.* 2009 Summer;11(3):145-65. PMID: 19918340; PMCID: PMC2777062
- 3 Stothers L, Thom D, Calhoun E. Urologic diseases in America project: urinary incontinence in males--demographics and economic burden. *J Urol.* 2005 Apr;173(4):1302-8. doi: 10.1097/01.ju.0000155503.12545.4e. PMID: 15758786.
- 4 Chartier-Kastler E, Ballanger P, Petit J, Fourmarier M, Bart S, Ragni-Ghazarossian E, Ruffion A, Le Normand L, Costa P. Randomized, crossover study evaluating patient preference and the impact on quality of life of urisheaths vs absorbent products in incontinent men. *BJU Int.* 2011 Jul;108(2):241-7. doi: 10.1111/j.1464-410X.2010.09736.x. Epub 2010 Oct 15. PMID: 20950307
- 5 Lund HG, Turkle J, Jewell ML, Murphy DK. Low Risk of Skin and Nipple Sensitivity and Lactation Issues After Primary Breast Augmentation with Form-Stable Silicone Implants: Follow-Up in 4927 Subjects. *Aesthet Surg J.* 2016 Jun;36(6):672-80. doi: 10.1093/asj/sjv266. Epub 2016 Apr 26. PMID: 27118002; PMCID: PMC5127413.

# 4 Choisissez la poche à urine qui convient

À quel moment de la journée l'incontinence se manifeste-t-elle ?  
 Quel est le volume des pertes d'urine quotidiennes ?



Jour



Nuit



1 verre = 250 mL

**Urimed® Bag Plus** Volume: 0.5l

**Urimed® Tribag Plus** Volume: 0.8l  
 Volume: 0.5l

**Medicare®** Volume: 2l  
**Urimed® B'Bags** Volume: 2l

\* Volume des pertes d'urine quotidiennes

# 5 Choisissez les accessoires adaptés à la poche à urine

Accessoires pour poches de jambe

**Urimed® Fix**

**Urimed® Straps**




**Urimed® Klett**

Accessoires pour poches de nuit




**Urimed® Handle**

## Aperçu des produits Urimed® Vision

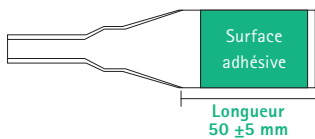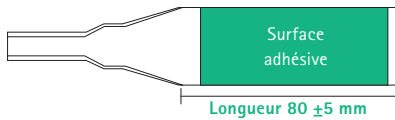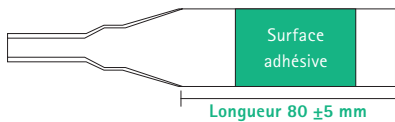Article	Taille (mm)	Unité	N° art.	Pharmacode	MiGeL
<b>Urimed® Vision Standard</b>	● 25	30	2962530	1561341	15.16.02.00.1
	● 29	30	2962930	1561342	15.16.02.00.1
	● 32	30	2963230	1561343	15.16.02.00.1
	● 36	30	2963630	1561344	15.16.02.00.1
	● 41	30	2964130	1561345	15.16.02.00.1
<b>Urimed® Vision Ultra</b>	● 25	30	2972530	1561346	15.16.02.00.1
	● 29	30	2972930	1561347	15.16.02.00.1
	● 32	30	2973230	1561348	15.16.02.00.1
	● 36	30	2973630	1561349	15.16.02.00.1
	● 41	30	2974130	1561350	15.16.02.00.1
<b>Urimed® Vision Specific</b>	● 25	30	2982530	1561336	15.16.02.00.1
	● 29	30	2982930	1561346	15.16.02.00.1
	● 32	30	2983230	1561338	15.16.02.00.1
	● 36	30	2983630	1561339	15.16.02.00.1
	● 41	30	2984130	1561340	15.16.02.00.1




## Aperçu du produit poche urinaire

Article	Unité	N° art.	Pharmacode	MiGeL
<b>Urimed® Bag Plus</b> 500 ml avec valve de sécurité, longueur de tubulure de 60 cm (Cut to fit), non-stérile	10	28501A	7806352	15.14.03.00.1
 <b>Urimed® Tribag Plus</b> 800 ml avec valve de sécurité, longueur de tubulure de 60 cm, emballage individuel stérile	10	28305	7798497	15.14.04.00.1
<b>Urimed® Tribag Plus</b> 500 ml avec valve de sécurité, longueur de la tubulure 40 cm, emballage individuel stérile	10	28204	7798495	15.14.04.00.1
<b>Poche Medicare®</b> 2l avec robinet coulissant et dispositif anti-reflux, emballage individuel stérile	10	28115	7798492	15.15.04.00.1
 <b>Poche Medicare®</b> 2l avec robinet coulissant et dispositif anti-reflux, emballage non-stérile	10	28114	7798491	15.15.03.00.1
 <b>Urimed® B'Bags</b> 2l avec robinet coulissant dispositif anti-reflux tubulure de 90 cm, non-stérile	200	29450	6322153	15.15.03.00.1
<b>Urimed® B'Bags</b> 2l avec robinet coulissant dispositif anti-reflux tubulure de 90 cm, non-stérile	30*	29451	6380989	15.15.03.00.1

\* y compris 1 accroche pour fixer la poche

## Aperçu des produits accessoires

Article	Unité	N° art.	Pharmacode	MiGeL	
<b>Accessoires pour poches de jambe</b>	Urimed® Fix taille S	2	68520R	6133239	15.14.99.01.1
	Urimed® Fix taille M	2	68530R	6133245	15.14.99.01.1
	Urimed® Fix taille L	2	68540R	6133251	15.14.99.01.1
	Urimed® Strap 1 x 2 pièces	10	68551	7798498	15.14.99.02.1
	Urimed® Klett Small	10	29260	7848607	
	Urimed® Klett Large	10	29261	7848608	
 Urimed® Handle	50	68548R	7806349	7806349	