


ISTRUZIONI PER L'USO Actreen® MiniSet

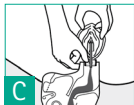

Actreen® MiniSet è un catetere monouso rivestito di lubrificante, sterile e immediatamente pronto all'uso. E' indicato in particolare per l'autocaterismo intermittente delle donne.

PREPARAZIONE

- 1) Prima di aprire la confezione accertarsi che sia integra.
- 2) Dispiegare il set rimuovendo l'adesivo bianco presente sul retro. **A**
- 3) Lavarsi accuratamente le mani prima e dopo il cateterismo. Detergere anche la zona genito-urinaria.
- 4) Strappare e rimuovere l'involucro protettivo. **B**
- 5) Afferrare il catetere per il connettore con tecnica «no touch».

CATERIZZAZIONE

- 6) Con una mano allargare le grandi labbra della vagina in modo da esporre il meato uretrale. Con l'altra introdurre con cautela il catetere nell'uretra finché non raggiunge la vescica e l'urina inizia a defluire. **C**
- 7) Per garantire il completo svuotamento della vescica, verso la fine del cateterismo esercitare una leggera pressione con la mano sulla parte inferiore dell'addome.
- 8) Quando non esce più urina il catetere può essere rimosso.

SVUOTAMENTO E SMALTIMENTO

- 9) Per svuotare la sacca strapparla in corrispondenza alla linea «punteggiata» sul bordo superiore. **D**
- 10) Per uno smaltimento discreto, ripiegare nuovamente Actreen® MiniSet, applicare l'adesivo **E** e gettarlo in un contenitore dei rifiuti.

AVVERTENZE



L'autocaterismo va praticato unicamente su consiglio del medico e solo conformemente alle istruzioni impartite.



ISTRUZIONI PER L'USO Actreen® MiniCath

Actreen® MiniCath è un mini catetere rivestito con lubrificante, sterile e immediatamente pronto all'uso.

E' indicato in particolare per l'autocateterismo intermittente delle donne.

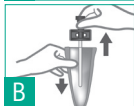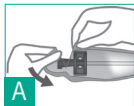

PREPARAZIONE

- 1) Prima di aprire la confezione accertarsi che sia integra.
- 2) Lavarsi accuratamente le mani prima e dopo il cateterismo. Detergere anche la zona genito-urinaria.
- 3) Rimuovere il foglio protettivo dal connettore del catetere strappandolo in corrispondenza alla marcatura. <math>\leftarrow\right> \mathbf{A}
- 4) Afferrare il catetere per il connettore per estrarlo dall'involucro protettivo. Fare attenzione a usare la tecnica «no touch». **B**

CATERIZZAZIONE

- 5) Con una mano allargare le grandi labbra della vagina in modo da esporre il meato uretrale. Con l'altra introdurre con cautela il catetere nell'uretra finché non raggiunge la vescica e l'urina inizia a defluire. **C**
- 6) Per garantire il completo svuotamento della vescica, verso la fine del cateterismo esercitare una leggera pressione con la mano sulla parte inferiore dell'addome.
- 7) Quando non esce più urina il catetere può essere rimosso.

SMALTIMENTO DEL CATETERE

- 8) Il catetere può quindi essere eliminato, in tutta discrezione, nel suo foglio protettivo gettandolo in un contenitore dei rifiuti. **D**

AVVERTENZE

Actreen® MiniCath può essere utilizzato in combinazione con una sacca per urine come ad es. l'Urimed® Bag di B. Braun. L'autocateterismo va praticato unicamente su consiglio del medico e solo conformemente alle istruzioni impartite.

