

Guide rapide EZCOVER®

Set de protection générique pour sonde échographique



1 Ouvrez le sachet et déballez le set



2 Localisez le pli central du manchon en cherchant l'autocollant « Hand here »



3 Insérez la main dans la housse de protection



4 a Appliquez une petite quantité de gel stérile sur le manchon (a) ou sur la sonde (b)



5 a Prenez le transducteur à ultrasons (a*) ou faites-le vous remettre (b)
*Remarque : « probe here » visible pour les variantes STOP uniquement



6 Placez la housse de protection sur le transducteur et le câble (autocollant « pull here »)



7 Fixation avec des élastiques



8 Faites une pause et retirez l'autocollant (variantes STOP uniquement)



9 a Pour obtenir des images échographiques nettes, assurez-vous qu'il n'y a pas de bulles d'air sous la housse de protection de la sonde