

ISTRUZIONI PER L'USO Actreen® Hi-Lite^{Cath}

Actreen® Hi-Lite^{Cath} è un catetere monouso sterile, rivestito con lubrificante e immediatamente pronto all'uso. E' indicato in particolare per l'autocateterismo intermittente delle donne.



Lunghezza: 20 cm

PREPARAZIONE

- 1) Prima di aprire la confezione accertarsi che sia integra.
- 2) Lavarsi accuratamente le mani prima e dopo il cateterismo. Detergere anche la zona intima circostante il meato uretrale.

APERTURA DEL PRODOTTO

Afferrare la pellicola protettiva con pollice e indice sul retro, nei pressi del connettore, e rimuoverla. **A**

Afferrare la pellicola protettiva con pollice e indice in corrispondenza alla marcatura «A» e staccarla. **B**






La parte di pellicola rimanente può essere completamente rimossa oppure può essere utilizzata per tenere il catetere. **E**

In caso di limitata funzionalità delle mani


Tenere fermo il catetere con una mano, inserire il pollice dell'altra nella linguetta in corrispondenza alla marcatura «A» e rimuovere la pellicola protettiva. **C**

Quindi tenere fermo il catetere con una mano (sulla pellicola protettiva), inserire il pollice nella linguetta sopra al catetere e rimuovere la pellicola. **D**

La parte di pellicola rimanente può essere rimossa completamente oppure essere utilizzata per tenere il catetere. **E**

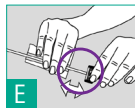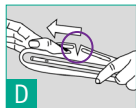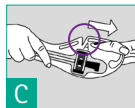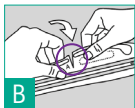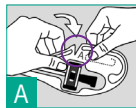

ISTRUZIONI PER L'USO Actreen® Hi-Lite^{Cath}

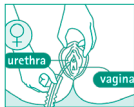

CATERISMO NELLA DONNA

- 1) Con una mano allargare le grandi labbra della vagina in modo da esporre il meato uretrale.
- 2) Con l'altra introdurre cautamente il catetere nell'uretra finché non raggiunge la vescica e l'urina inizia a defluire.
- 3) Per garantire il completo svuotamento della vescica, verso la fine del cateterismo esercitare una leggera pressione con la mano sulla parte inferiore dell'addome.
- 4) Quando non esce più urina il catetere può essere cautamente rimosso.

SMALTIMENTO DEL CATETERE

Il catetere può quindi essere smaltito, in tutta discrezione, nella sua pellicola protettiva gettandolo in un contenitore dei rifiuti.

AVVERTENZA

Actreen® Hi-Lite^{Cath} può essere utilizzato in combinazione con una sacca per urine, ad es. Urimed® Bag di B. Braun.
L'autocaterismo va praticato esclusivamente su prescrizione medica e solo conformemente alle istruzioni impartite.